

- Tarkista tuotteen virheettömyys ennen sen käyttöä.
- Jos sinulla on kysyttyvä tuotteen käyttörajoituksesta, säädöstä tai kunnossapidosta, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Älä ylitä käyttäjän painorajoitusta  tai tuotteen etikettiin merkityä enimmäiskuormitusta .
- Varmista aina, että tuote vastaa tarpeita. Jos sinulla on kysyttyvä, ota yhteys terveydenhoitoalan ammattilaiseen.
- Valtutetun korjaajan on vahdettaa kuluneet, vahingoittuneet tai puuttuvat osat välittömästi.
- Älä jätä tuotetta ulos tai säilytä sitä ulkona.
- Varmista säännöllisesti tuotteen tukevuus ja lijuus ja tarvittaessa ruuvien kunnollinen kiinnitys sekä kumihollkien kunto.
- Noudata suuria varovaisuuksia, kun käytät tuotetta kostealla alustalla.

## 7762 / H335 (TUKINOJA)

### Esittely

Ylös nostettava tukinoja on kuvattu karsittuna perusmallina ilman tukijalkaa (Kuva A).

### Asennuskorkeuden määrittely

Mittaa peukalon ylemmän nivelten korkeus käyttäjän seisossa ilman kenkiä. Tämä korkeus vastaa tukinojan korkeinta kohtaa (Kuva A1).

### Asennus

- Aseta kiila 2° (Kuva A6).
- Piirrä reikiat paikat seinään (2 ylös ja 2 alas ulkopuolelle) ottaen huomioon aikaisemmin mitattu korkeus ; sijoita sen mukaisesti tukinojan jalusta (Kuva A5).
- Tee reiät, laita 4 seinän laatuun sopivaa tappia reikiin. Ruuva kiinni (Kuva A3).
- Napsauta suojuksen jalustan päälle (Kuva A2).
- Pujota kiila alitse (Kuva A4).

### Korkeuden muuttaminen

Tukinoja toimitetaan yhdellä kiillalla 2° (Kuva A4 ja A6) varustettuna. Muuta tukinojan korkeutta käytäällä vaihtoehtoa 7768 (3 kiila 0°, 2° ja 4°). Toimi seuraavasti :

- Ota kiila 2° pois.
- Laske yhden senttimetrin verran laittamalla kiila 0°.
- Nosta yhden senttimetrin verran laittamalla kiila 4°.

### Tukinojan liike

**Nosto** : nosta tukinoja vaakasuorasta asennosta maksimipystyasentoon saakka. Lukitus on automaattinen viimeksi mainitussa asennossa.

**Lasku** : nosta tukinojaa noin senttimetri avataksesi lukiutuksen ja laske se vaakasuoraan asentoon saakka.

## 7763 (KANNATIN)

### Esittely

Lattian kiinnitetyt kannattimen avulla tukinoja voidaan kiinniittää (7762, 7770, 7772 tai 7773), kun seinä ei soveltu kiinnitykseen.

### Asennus

- Aseta jalusta (Kuva B3). Lattialla lepäävän aluslevyn pisin sivu on oltava tukinojan alla (Kuva B6).
- Merkitse 4:n reiän paikat. Tee reiät, laita 4 lattian laatuun sopivaa tappia. Ruuva kiinni (Kuva B5).
- Aseta levy – pyöristys kohdistettu alaspäin (Kuva B2) ja tukinoja (Kuva B7). Kiinnitä levy ja noja kiristämättä (myöhempi säättö) kahden mukana toimitetun pidikkeen (Kuva B1), renkaiden ja muttereiden kanssa.
- Käyttäjän seisossa ilman kenkiä sijoita levy siten, että tukinojan korkein kohta yltää käyttäjän peukalon ylemmän nivelten korkeudelle. Kiristä mutterit (Kuva B4) kahdesta pidikkeestä (Kuva B1).
- Tarkista kokonaisuuden tukevuus.

### LISÄVARUSTEET

Perusmalli 7762 / H335 voidaan varustaa seuraavilla lisävarusteilla :

- Tukijalka (7764 / H335) vahvistaa tukinojan kuormituskykyä (Kuva C).
- WC-paperitelinen (7765) asennettu tukinojaan (Kuva D9).
- Pehmeät ja mukava käsinoja (7766) liimattu ylemmän tukinojan päähän (Kuva E3).
- Peitesuojuks (7767) tarkoitettu peittämään alempi putki (Kuva D2).

## 7764 / H345 (TUKIJALKA)

### Asennus

- Poista jalustan suojuksen (Kuva A2).
- Poista tarvittaessa holkki (Kuva C3) tai peitesuojuksen (Kuva D2) alempasta putkesta (Kuva C4).
- Asenna nivelaosa (Kuva C2) liu'uttamalla se alempaan putken päälle. Käytä tarvittaessa muovivasaralla. Kiinnitä kahdella ruuvisarjalla, muttereilla (Kuva C1) ja laita kaksi peitesuojusta.
- Ota jalustan vasemmanpuoleinen alakiinnitysruuvi pois (Kuva C7).
- Aseta ohjain (Kuva C10), seinänivelle varustettu pää (Kuva C6) kohdistettuna tuen tai kannattimen seinäpuolella, tukinojan ulkopuolella.
- Kiinnitä seinänivel (Kuva C6) kahdella kiinnitysruuville jalustan vasemmalle puolelle alas (Kuva C7).
- Laita ohjaimen (Kuva C10) toinen pää tukijalan soikeaan reikään (Kuva C9).
- Laita ohjaimen toisen pään pitosuojuksen tiukasti paikoilleen (Kuva C8).
- Tarkista kokonaisuuden moitteeton toiminta ja tukevuus.

## 7765 (WC-PAPERITELINE)

### Asennus

- Poista tarvittaessa holkki (Kuva C3) tai peitesuojuksen (Kuva D2) tai tukinojan alempaan putken nivel (Kuva C11).
- Ota peitesuojuksen pois ruuvimeisselin avulla (Kuva D8 tai C11).
- Laita paperiullateline (Kuva D9) kiinnityssuojuksen (Kuva D2) tai niveleen (Kuva C11).
- Aseta väliholkk (Kuva D3) ja lukitse kokonaisuus lukiutusrenkaalla (Kuva D6).
- Asenna kokonaisuus (Kuvat D2, 6, 7, 9) liu'uttamalla se alempaan putken päälle (Kuva D5). Käytä tarvittaessa muovivasaraa. Kiinnitä ruuvilla (Kuva D1) ja mutterilla (Kuva D7) ja laita peitesuojuksen (Kuva D7).
- Tarkista kokonaisuuden tukevuus.

## 7766 (KÄSINOJA)

### Asennus

- Poista tarvittaessa tukinojan ylemmän putken musta holkki (Kuva E5).
- Puhdista liimattavat osat asetonilla ennen liiman levitystä (Kuva E2).

- Levitä liimaaka koko putken alueelle käsinojan sisäpuolelle (Kuva E1) ja aseta viimeksi mainittu suoraan tukinojan ylempään osaan. Pidä huoli, että levitys tapahtuu tasasuhtaisesti (Kuva E3).
- Purista noin 30 sekunnin ajan. Liimaus on kuivunut lopullisesti noin 24 tunnin kuluttua. INVACARE® ei ole vastuussa virheellisestä kiinnityksestä tai käytöstä aiheutuvista vahingoista.

## 7767 (MUOVISUOJUS)

### Asennus

- Poista tarvittaessa tukinojan aleman putken holkki (Kuva C3).
- Pujota muovisuojuksen (Kuva D2) alempaan putkeen. Käytä tarvittaessa muovivasaralla peitesuojuksen kiinnittämiseksi täysin.
- Laita ruuvi (Kuva D1) ja mutteri paikoilleen (Kuva D7) ja kiristä. Aseta suojuksen.

### KUNNOSSAPITO

Puhdista tukinoja ja sen lisävarusteet säännöllisesti tavallisella, ei liian voimakkalla puhdistusaineella. Noudata hygienia-asiantuntijan ohjeita desinfinoitaessa sairaalaympäristössä.

### TEKNISET OMINAISUUDET

- Metalliputkissa iskunkestävä Rilsan-päällyste.
- Nivelkohdat ruostumattomasta tai karkaistusta teräksestä.
- Käsinojojen polyuretaanista.
- säädettävän nojan korkeus henkilön mukaan.
- Saattavissa ovat pituudet 50 - 100 cm.
- Perusmallin paino 7762 / H335 : noin 4 kg.

### KÄYTÄJÄN PAINORAJOITUS

Katso taulukko asiakirjan lopussa.

## II. NORSK

Du har nå blitt eier av et INVACARE®-produkt. Våre produkter er designet og fabrikert ifølge de aller strengeste kvalitets- og sikkerhetsstandarder, og de er i overensstemmelse med de europeiske direktiv (MDD 93/42/EEC). De har ett års garanti. Imidlertid har enkelte produkter lengre garanti. Venligst ta kontakt med din forhandler. Våre støttestenger har to års garanti. Vanlig slitasje og ikke skjønnsom bruk, dekkes ikke av garantien. INVACARE® kan ikke holdes ansvarlig for all skade som er forårsaket av uriktig bruk av disse støttestengene.

**Det er absolutt nødvendig å overholde følgende bruks- og vedlikeholdsinstruksjon:**

- Kontroller at produktet er levert i god stand før det tas i bruk.
- I tilfelle tvil angående produktets bruksrestriksjoner, justering eller vedlikehold, venligst ta kontakt med din forhandler.
- Ikke overskrid maksimumsvekt for bruker  eller maksimums-lastvekt 

## 7762 / H335 (STØTTESTANG)

### Utforming

Støttestangen, som kan løftes opp, er laget i en modell med minimal sokkel, uten støttefot (Figur A).

### Fastsettelse av monteringshøyde

La brukeren stå opprett uten sko. Mål høyden for tommelens øvre ledd. Denne høyden stemmer overens med høyden på støttestangens øverste punkt (Fig. A1).

### Montering

- Plasser 2°-kilen (Fig. A6).
- Sett et merke på veggen for hullene (2 oppe og 2 nede på yttersiden) samtidig som du tar høyden du målte tidligere med i betraktning. Plasser sokkelen for støttestangen (Fig. A5) i samsvar med dette.
- Bor hull og sett inn 4 pluggar som egner seg for veggen. Skru til (Fig. A3).
- Smekk fast dekslet på sokkelen (Fig. A2).
- Stikk kile innunder (Fig. A4).

### Endring av høyden

Støttestangen leveres med en 2°-kile (Fig. A4 og A6). Hvis du vil endre høyden på støttestangen, bruk alternativ 7768 (3 kiler på 0°, 2° og 4°). Gå fram som følger:

- Fjern 2°-kilen.
- For å senke en cm, plasser 0°-kilen.
- For å heve en cm, plasser 4°-kilen.

### Bevegning av støttestangen

**For å heve den:** Løft støttestangen fra dens vannrette stilling helt til maksimal loddrett stilling. Den løses automatisk i denne siste stillingen.

**For å senke den:** Loft støttestangen ca. en cm opp for å løse den opp og senk den helt ned i vannrett stilling.

## 7763 (KONSOLL)

### Utforming

Dette alternativet, som er forankret i gulvet, gjør det mulig å feste støttestangen (7762, 7770, 7772 eller 7773) når veggen ikke egner seg til dette.

### Montering

- Plasser sokkelen (Fig. B3). Platen som ligger på gulvet skal ha den lengste siden under støttestangen (Fig. B6).
- Merk plasseringen for de 4 hullene med en prikk. Bor hull og sett inn de 4 pluggene som egner seg for gulvtypen. Skru til (Fig. B5).
- Plasser platen med den avrundete siden nedover (Fig. B2) og støttestangen (Fig. B7). Fest platen og stangen uten å stramme (foreta justering senere) med de to leverte beslagene (Fig. B1), skivene og mutrene.
- La brukeren stå opprett uten sko, og plasser platen slik at det øverste punktet på støttestangen kommer på høyde med brukerens øvre tommelredd. Stram til mutrene (Fig. B4) på de to beslagene (Fig. B1).

- Kontroller at enheten er solid.

## ALTERNATIVER

Grunnmodellen 7762 / H335 kan utstyres med følgende alternativer:

- En støttefot (7764 / H335) som forsterker støttestangens lastekapasitet (Fig. C).
- En toalettpapirholder (7765) som er montert på støttestangen (Fig. D9).
- Et mykt og behagelig armlene (7766) som er limet på enden av den øvre støttestangen (Fig. E3).
- En estetisk skjuleinnretning (7767) for å dekke det nedre røret (Fig. D2).

## 7764 / H345 (STØTTEFOT)

### Montering

- Fjern dekselet fra sokkelen (Fig. A2).
- Fjern eventuelt endestykket (Fig. C3) eller skjuleinnretningen (Fig. D2) på det nedre røret (Fig. C4).
- Monter hengseldelen (Fig. C2) ved å løslate gliet på det nedre røret. Om nødvendig, kan du bruke en plasthammer. Fest med de to settene med skruer og mutter (Fig. C1) og plasser de to skjuleinnretningene.
- Fjern venstre, nedre festeskrue fra sokkelen (Fig. C7).
- Plasser ledeskinnen (Fig. C10). Enden med veggengsellet (Fig. C6) skal være rettet mot støtteveggen eller stativet, på yttersiden av støttestangen.
- Fest veggengsellet (Fig. C6) med sokkelsens venstre, nedre festeskrue (Fig. C7).
- Sett inn den andre enden (Fig. C10) av styreskinnen i støttefotens avlange hull (Fig. C9).
- Før støttedekselet i den andre enden av styreskinnen fast inn (Fig. C8).
- Kontroller at enheten fungerer og at den er solid.

## 7765 (TOALETTPAPIRHOLDER)

### Montering

- Fjern eventuelt endestykket (Fig. C3) eller skjuleinnretningen (Fig. D2) eller hengselsellet (Fig. C11) fra det nedre røret på støttestangen.
- Fjern skjuleinnretningen med et skrujern (Fig. D8 eller C11).
- Sett inn toalettpapirholderen (Fig. D9) i festeskjuleinnretningen (Fig. D2) eller i hengselsellet (Fig. C11).
- Sett på mellomhylsen (Fig. D3) og lås enheten med låseskiven (Fig. D6).
- Monter enheten (Fig. D2, 6, 7, 9) ved å løslate gliet på det nedre røret (Fig. D5). Om nødvendig, kan du bruke en plasthammer. Fest med en skrue (Fig. D1) og en mutter (Fig. D7) og plasser skjuleinnretningen (Fig. D7).
- Kontroller at enheten er solid.

## 7766 (ARMLENE)

### Montering

- Fjern eventuelt det sorte endestykket (Fig. E5) fra det øvre røret på støttestangen.
- Rengjør de delene som skal limes med aceton før du smører limet på (Fig. E2).
- Påfør alt limet på armenets innside (Fig. E1) og plasser armlenet direkte på støttestangens øvre del, samtidig som du sørger for å påføre limet symmetrisk (Fig. E3).
- Trykk i ca. 30 sekunder. Limet er helt tørket etter ca. 24 timer. INVACARE® er ikke ansvarlig for ødeleggelse forårsaket av uriktig festing eller bruk.

## 7767 (PLASTSKJULEINNRETNING)

### Montering

- Fjern eventuelt endestykket (Fig. C3) fra det nedre røret på støttestangen.
- Tre plastskjuleinnretningen (Fig. D2) på det nedre røret. Bruk eventuelt en plasthammer for å feste skjulerinnretningen helt.
- Sett inn skruen (Fig. D1) og mutteren (Fig. D7) og stram til. Sett på hettene.

### VEDLIKEHOLD


Støttestangen og dens tilbehør rengjøres regelmessig med et mildt vaskemiddel. For desinfisering i sykehus, følg prosedyrene i hygieneforskriftene.

### TEKNISKE DATA


- Metallrør dekket med Rilsan-belegg, motstandsdyktig mot støt.
- Hengspunkt i rustfritt stål eller herdet stål.
- Armlene i polyuretan.
- Justerbar støttehøyde ifølge personen.
- Tilgjengelige lengder fra 50 til 100 cm.
- Grunnmodellens vekt 7762 / H335: ca. 4 kg

### BRUKERENS MAKSIMUMSVEKT


Se skjema på slutten av dokumentet.

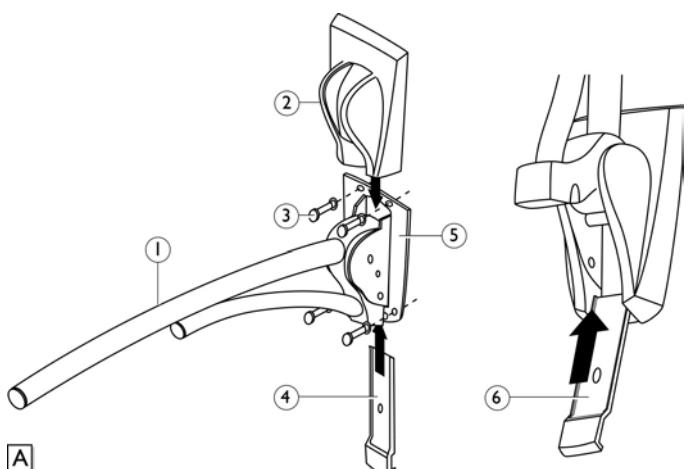


A

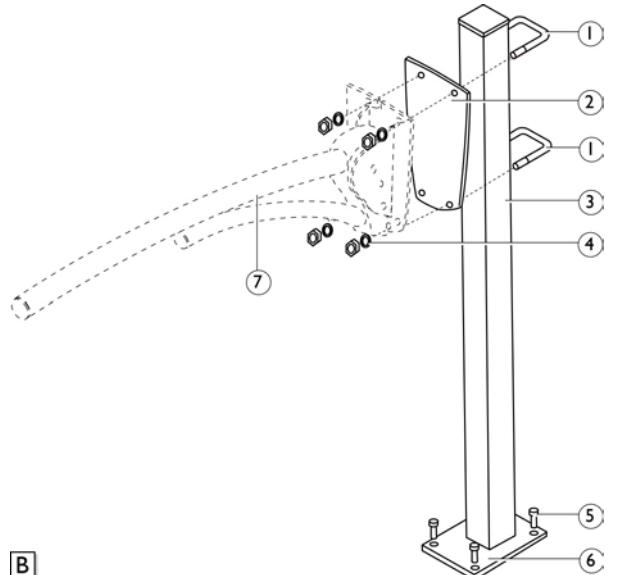


B

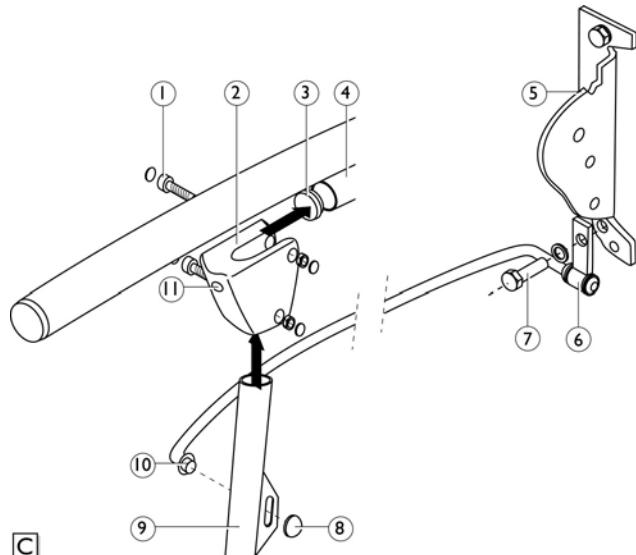

C

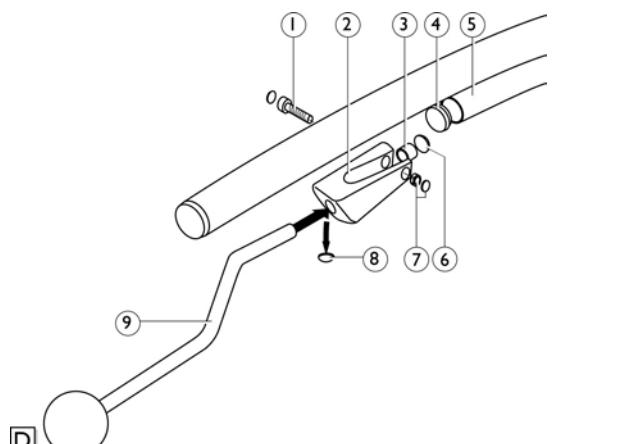

D

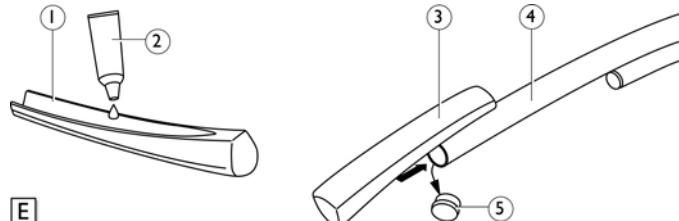

E

|                    |      |
|--------------------|------|
| 7762 – H335 – H345 | (kg) |
| 50 (→)             |      |
| 125 (↓)            |      |