

MASTER Sengebånd®



The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System



Art. nr. 36414
MASTER Sengebånd Soft
L 180 x B 10 cm
Antall håndtak: 9



Art. nr. 36415
MASTER Sengebånd Hard
L 180 x B 14 cm
Antall håndtak: 8



Art. nr. 20017
MASTER Sengebånd Single
L 150 x B 5 cm
Antall håndtak: 1

Når mobiliteten forringes ...



... forbedrer vi livskvaliteten !

MASTER Sengebånd® CE

The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System

BRUKERVEILEDNING




A. Montering av MASTER Sengebånd Soft




1

Før den nederste del av MASTER Sengebånd Soft igjennom f.eks. sengegavlens rør.

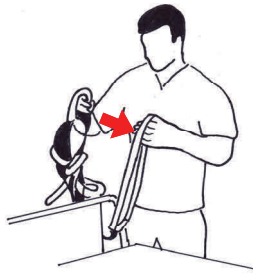


2

Hold deretter i det nederste øye og før sengebåndet igjennom dette.

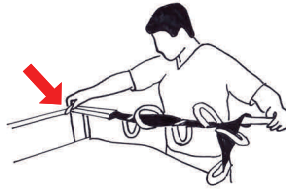


3

Trekk deretter inntil sengebåndet er strammet helt til rundt sengegavlens rør.

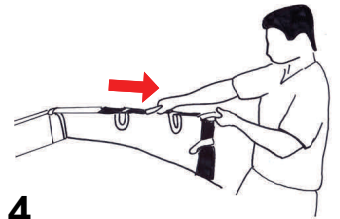


4

MASTER Sengebånd Soft er nå klart til bruk

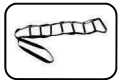

B. Montering av MASTER Sengebånd Hard

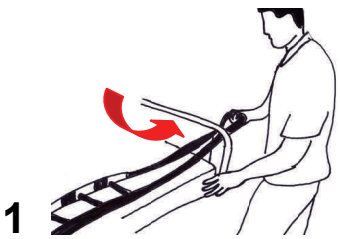

1

Før den nederste del av MASTER Sengebånd Hard igjennom f.eks. sengegavlens rør.




2

Hold deretter i det nederste øye og før sengebåndet igjennom dette.



3

Trekk deretter til sengebåndet er strammet helt til rundt sengegavlens rør.

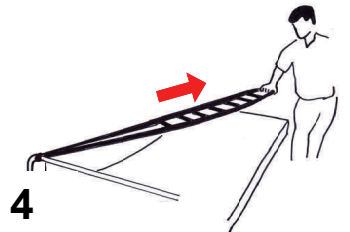


4

MASTER Sengebånd Hard er nå klart til bruk



C. Montering av MASTER Sengebånd Single

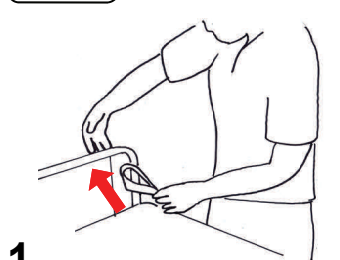


1

Før den nederste del av MASTER Sengebånd Single igjennom f.eks. sengegavlens rør.



2

Hold deretter i det nederste øye og før sengebåndet igjennom dette.

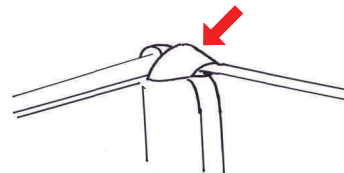

3

Trekk deretter til sengebåndet er strammet helt til rundt sengegavlens rør.



4

MASTER Sengebånd Single er nå klart til bruk


MASTER Sengebånd® CE

The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System

BRUKERVEILEDNING




D. MASTER Sengebånd Single gjøres kortere

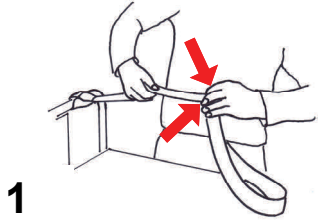


1

Ta fatt i den sorte reguleringsspenne med tommel og pekefinger.

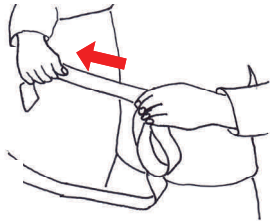


2

Trekk i den løse enden av båndet.

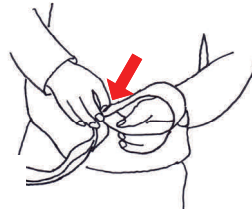

3

Ta fatt igjen i den sorte reguleringsspenne.

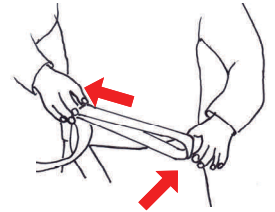


4

Ta fatt i sengebåndets øye som danner håndtaket og flytt øyet lengre inn, inntil du har den ønskede lengde av MASTER Sengebånd Single.




E. MASTER Sengebånd Single gjøres lengre

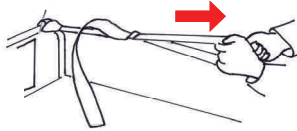


1

Nå er MASTER Sengebånd blitt kortere

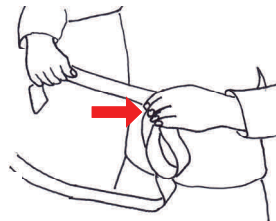


2

For å gjøre MASTER Sengebånd Single lengre tar man fatt i båndets ende med den ene hånden

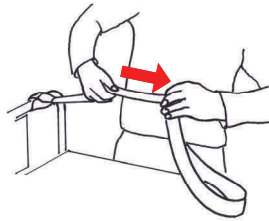

3

Ta deretter fatt i den sorte reguleringsspenne og skyv denne ut igjen.

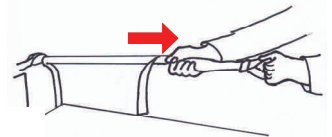


4

Nå gjøres MASTER Sengebånd Single lengre.




F. Noen muligheter med MASTER Sengebånd

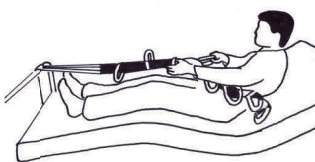


1

MASTER Sengebånd er en god hjelp når man skal sette seg opp i sengen.

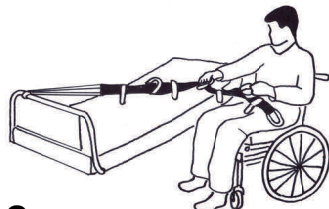

2

MASTER Sengebånd brukes til å gripe i ved overflytning mellom seng og rullestol. Gjerne i kombinasjon med våre Master GLIDE Glidebrett.

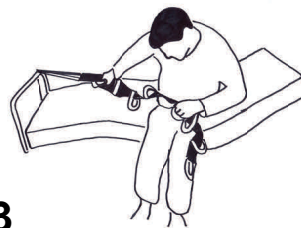

3

MASTER Sengebånd er en god støtte når man står ved sengen og skal sitte ned på denne eller reise seg opp.

Beskrivelse av de forskjellige modeller

MASTER Sengebånd® Soft

Består av et mykt sengebånd med polstrede håndtak.

MASTER Sengebånd® Hard

Består av et mykt sengebånd med avstivede håndtak. Dette for å få behagelige grep og for at de ytterste fingrene ikke klemmes sammen, når man griper i håndtakene.

MASTER Sengebånd® Single

Regulerbart sengebånd med 1 håndtak i enden. Dette er et mykt bånd av 100% bomull, som er enkelt og har trinnløs regulering.

Vaskeanvisning

MASTER Sengebånd kan vaskes på 80 grader C.



ADVARSEL

Sørg alltid for at det punktet sengebåndet er festet kan tåle belastningen som oppstår når man trekker i sengebåndet. Fjern evt. sengebåndet fra sovende bruker. Dette for å unngå at vedkommende vikles inn i sengebåndet med alvorlige ulykker til følge.

VIKTIG

Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjelpemiddel er intakt ved å jevnlig etterse sømmer. Hvis dette hjelpemiddel har en kritisk slitasje eller på annet vis har skader må det ikke benyttes. Er du i tvil om bruken av dette hjelpemiddelet skal du omgående kontakte Arcus Vita As.

ANSVAR

Ved feil eller uhensiktsmessig bruk av dette hjelpemiddelet, fraskrives ethvert ansvar for ulykker, som medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse

MASTER Sengebånd leveres i 3 forskjellige modeller.

MASTER Sengebånd er kjennetegnet av høy kvalitet. MASTER Sengebånd Soft har bløte behagelig polstrede håndtak.

MASTER Sengebånd Hard er en mere avstivet utgave med harde håndtak. Disse gir bruker følelse av stabilitet og gode grep.

MASTER Sengebånd Single er et enklere sengebånd som kan reguleres trinnløst i lengden.

Anvendelsesmuligheter:

MASTER Sengebånd kan bl.a. anvendes til å sette seg opp i seng, reise seg opp fra seng, toalett eller gulv, til overflytning mellom rullestol og seng/ bilsete

Erfaringsmessig holdbarhet:

Minimum 5 år

Norge:

Arcus Vita As
Pb 213
5591 Etne

Tlf. 53 75 77 50
Epost: post@arcus-vita.no
www.arcus-vita.no

