



OBS! Läs följande instruktioner noga före montering.

Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information som måste överlämnas till brukaren vid leverans.

Innan selens placering fastställs ska du se till att brukaren sitter i en korrekt position med rumpan så långt bak på sitsen som möjligt, för att selen ska kunna positioneras korrekt.

TRANSPORT I FORDON

Invacare rekommenderar inte att tryckavlastningssele används vid transporter.

UNDERHÅLL

Före varje användning:

Leta efter sprucket tyg/sömmar samt lösa eller slitna skruvar.

Vartannat år:

Kontrollera att selen inte har lösa eller slitna infästningar och att momentinställningarna kontrolleras av en kvalificerad person. Kontrollerna bör ske oftare om brukaren är tyngre, då det kan medföra större belastning.

Denna produkts förväntade livslängd är 30 månader.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Invacare rekommenderar inte att selen används vid transporter.

Selen passar för användning i de flesta rullstolar.

UTBILDNING

Om du behöver ytterligare utbildning för montering av denna utrustning ber vi dig att kontakta oss på något av numren nedan, där du erbjuds rådgivning och support.

KOMPATIBILITET

Vi rekommenderar att selen användas tillsammans ett lämpligt positioneringsbälte.

KVALITET

Vi förbehåller oss rätten att ändra konstruktioner utan att meddela detta i förväg, för att kunna infria vår policy om ständig förbättring. Alla rättigheter reserverade.

RENGÖRING OCH VÅRD

Selen kan rengöras med ett neutralt rengöringsmedel (t.ex. varmt tvålsvatten) och/eller våtservetter för engångsbruk. De nylontäckta neoprendynorna kan enkelt lossas och tvättas i maskin vid 60°C. Låt dem lufttorka. Torktumling är inte lämplig. Läs tvättinstruktionen på etiketten.

Monteringsbeslagen kan rengöras med vanliga hushållsrengöringsmedel och en mjuk trasa.

Be den infektiösa personen på din arbetsplats om råd om produkten skulle bli smittad. Förvaras torrt.



VARNING!



Skador kan förhindras om selen monteras på rätt sätt. En sele som sitter för löst fungerar inte som den ska och ger möjlighet till yvigare rörelser vilket kan orsaka personskada. En sele som sitter för hårt kan stoppa blodflödet och orsaka obehag. Får inte användas som fastspänningssele.

Kontraindikationer

- Höftförskjutningar, skadad hud och irritation i området runt ljumskarna.
- Observera att denna produkt kan påverka en sittdynas effektivitet gällande tryckfördelningen.



Anti-Thrustsele
Antal: 1



Monteringssats
Antal: 2

MONTERINGSANVISNING

STEG 1 — Packa upp selen och övriga komponenter ur förpackningen.

STEG 2 — Kontakta leverantören om produkten levereras i oönskat skick.

STEG 3 — När selen anpassats rätt ska användaren sitta på större delen av ytan (se bild 1). Lägg selen på rullstolens sits när den ska sättas fast. Selens bakkant skall vara placerad i nivå med rullstolens ryggstöd (se bild 1). Fäst spännena med de tre spåren (se bild 2) på önskad plats i rullstolens ram med hjälp av universalklämmorna. De passar runda rörramar med 19 mm, 22 mm och 25 mm tjocklek (se bild 3).

STEG 4 – Placera brukaren på selen med de främre vadderade remmarna över benen (se bild 4). Montera spännena med de tre spåren som sitter på selens främre remmar på önskad plats i rullstolens ram med hjälp av universalklämmorna. De passar runda rörramar med 19 mm, 22 mm och 25 mm tjocklek (se bild 3).

Det rekommenderas att alla skruvar dras åt till 8,5 Nm.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

BRUKSANVISNING

Selen kan enkelt lossas och spännas fast. Alla remmar har ett snabbspänne för att lossa selen från stolen (se bild 6). Kläm på spännet med tummen och pekfingeret för att dra ut remmen och lossa selen. Upprepa för den andra remmen på motstående sida för att flytta brukaren, eller samtliga fyra remmarna för att lossa selen helt.

Justering av remmarna

Alla remmar kan justeras (se bild 6). När du drar i remmen spänns den åt runt användaren. Upprepa för samtliga remmar tills selen sitter bekvämt och är ordentligt åtdragen.

Bild 4



Bild 5



Bild 6



GARANTI

Selen Flo-tech PT Anti-Thrust har en garanti på 12 månader.