

Invacare® | **SoftAIR®**  
\*Prisforhandlet



OPPDATERT CPR-VENTIL  
FRA JULI 2015

## Dynamiske vekseltrykkmadrasser

Invacare **SoftAIR** madrasser gir effektiv og komfortabel avlastning til brukere med høy og ekstra høy risiko for å utvikle trykksår. **SoftAIR**-madrassene understøtter behandling av trykksår til og med kategori 4. Segmentet omfatter **SoftAIR Super** og **SoftAIR Excellence**.

\* Prisforhandlet

Post 2: Dynamisk madrass for barn og voksne

**INVACARE**  
Yes, you can.®

**SoftAIR sortiment****Invacare SoftAIR Super**

**SoftAir Super** er en fullhøyde-madrass som er bygget opp av 21 luftfylte celler (cell-in-cell) hvorav 3 statiske celler er i hodeseksjonen. Luften i cellene fylles og tømmes i faser på 10 til 12 minutter utfra sykluser med 2 opp og 1 ned. Madrasstrekket er elastisk og pustende og alle sømmene er høfrekvent sveiset.

**Invacare SoftAIR Excellence**

**SoftAir Excellence** en fullhøyde-madrass som er bygget opp av 19 luftfylte celler (cell-in-cell), 3 statiske celler i hodeseksjonen. Luftfylte sideceller gir stabil og trygg inn- og utstigning for brukeren. De stabiliserende luftfylte sidecellene gir også sikkerhet for brukeren ved bevegelse i sengen. **SoftAir Excellence** har en sone bestående av 5 mindre celler i bendelen for bedre trykkavlastning under hælene.

**Invacare SoftAIR Pumpe**

Med **SoftAir**-pumpens manøverpanel kan du enkelt stille inn trykk, sette alarmen i stillemodus eller låse manøverpanelet. Pumpen kan stilles inn på dynamisk eller statisk trykk. **SoftAir** pumpen stilles i utgangspunktet inn etter brukervekt. Dersom det er behov for hardere eller mykere madrass utover vektinnstillingen, kan dette justeres opp eller ned for økt komfort. Om brukeren skal sitte høyt i sengen, anbefales det å stille pumpen på statisk trykk. Pumpen har audiovisuell alarm som aktiveres ved for lavt eller høyt trykk, ved strømbrudd eller om vekslingen mellom cellene hindres.

**Egenskaper og tilbehør****Celler med vekslende trykk**

Det tredelte vekseltrykkssystemet (2 opp og 1 ned) skjer i 10 til 12 minutters sykluser ved at hver 3. celle til enhver tid har null trykk mot huden. Dette skjer for å stimulere blodsirkulasjonen og dermed gi optimale forhold for huden. For å øke brukerens komfort er cellene i hodeseksjonen statiske. Det er enkelt å komme til cellene slik at de kan skiftes ved feil/skade.

**Elastisk inkontinenstrekk med sveisede sømmer**

Sømmene er høyfrekvent sveiset og glidelåsen dekket med en dryppkant for å sikre at væske ikke trenger inn i madrassen. Trekket er produsert i mykt polyuretanmateriale som er pustende og elastisk to veier. Dette for å gi brukeren best mulig komfort og minimere risikoen for trykk i forhold til skyv- og friksjonskreftene. Trekket har «quick release» glidelås som gjør det enkelt å ta av overdelen. Madrasstrekket kan vaskes med temperatur opp til 95 °C.

**OPPDATERT CPR-VENTIL  
FRA JULI 2015****CPR stropp (CPR = Hjerne Lunge Redning)**

Dersom det oppstår en situasjon hvor det er behov for HLR, skal man dra i den gule stroppen merket CPR. Madrassen tømmes da umiddelbart for luft i bryst- og hodedelen.

**Transportbag**

**SoftAir**-madrassen kan rulles og oppbevares i vesken som leveres sammen med madrassen. Bagen er utstyrt med en sidelomme for oppbevaring av pumpen.

## Egenskaper og tilbehør



### «Quick release» glidelås

En «quick release» glidelås gjør at man enkelt kan ta av overdelen på madrassstrekket.



### Håndtak

Solide bærehåndtak er plassert på begge sider av madrassen.



### Feste for laken

Sikrer et «løst» feste av lakenet i hvert hjørne samtidig som det gir fri tilgang til CPR-utløser.



### Hengslet rygg

Madrassen er konstruert for å hindre at luftcellene glir ned når hjertebrettet heves, og for å motvirke friksjon (gjelder kun **SoftAir Excellence**).



### Transport

I luftslangens håndtak kan en adapter settes i som sikrer at luften holder seg i madrassen inntil 72 timer når den er frakoblet pumpen. Adapteren sitter på luftslangens munnstykke.



### Sikkerhetsremmer

Sikkerhetsremmer for fastgjøring av madrassen til sengens liggeflate.

## Tekniske data

<b>SoftAIR Super</b>	Smal modell 2000 x 830 x 200 mm	10,5 kg	180 kg	95 °C
	Bred modell 2000 x 880 x 200 mm	10,5 kg	185 kg	
<b>SoftAIR Excellence</b>	Smal modell 2000 x 830 x 250 mm	10,8 kg	180 kg	95 °C
	Bred modell 2000 x 880 x 250 mm	12,5 kg	200 kg	

Produsert i henhold til europeisk standard:  
BS EN 597-1 BS EN 597-2 Match, BS7177: 1996 Crib Source 5

Art. nr.	HMS.-nr	Beskrivelse
1532815	191091	Softair Super 83x200 cm m/pumpe
1532816	191093	Softair Super 88x200 cm m/pumpe
1532813	200867	Softair Excellence 83x200 m/pumpe
1532814	191089	Softair Excellence 88x200 m/pumpe

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
Telefaks: +47 22 57 95 01  
E-mail: [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

© 2015 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykkesidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Softair - NO - 07/2015



**Yes, you can.®**