



Yes, you can.

Bruksanvisning Takløft Invacare[®] Robin[™]

Allment

- Forflytt løftmotoren med å dra i løftebåndet. **Håndkontrollen eller nødsenkings-snoen skal ikke brukes til dette formålet.**
- Manøvreringen av løfteren skjer med knappene på håndkontrollen.
- Da løften kjøres opp eller ned ubelastet må løftebåndene henge fritt.
- Ved bruk av løftemotoren tennes den blå indikatorlampen og lyser i ca 30 sekunder etter avsluttet bruk av løftemotoren.
- Blinkende indikatorlampe og lydsignal betyr lav batterispennning – sett omgående løfteren til lading - reserve finnes for ca 5 løft.

Løft og forflytning

- Plasser seilet ved å kople løfteseilets ryggband først til løftekrokene og deretter benbåndene til løftekrokene. Les også igjennom bruksanvisningen som følger med hvert seil.
- Strekk båndene, kontroller hvordan løfteseilet sitter på brukeren og at båndene sitter riktig i løftebåndskrokene.
- Løft brukeren eller senk sengen.
- Forflytt brukeren.
- Sett løftemotoren til parkering og plasser håndkontrollen til laderholderen etter hver gang løfteren er i bruk.

Nødstopp og nødsenk

- For **Nødstopp**, dra lett i snoen på løftemotorens underside.
- Tilbakestill nødstoppen ved å trykke inn den røde knappen ved snoen.
- For **Nødsenkning**, trekk videre i nødstoppen og senkingen begynner. For å avbryte nødsenkningen, slip snoen.
- Knappene på løftemotoren kan brukes for heving/senkning om håndkontrollen ikke skulle fungere.
- **OBS. Håndkontrollen og lading fungerer ikke om nødstoppen er aktivert.**

Våtrom

- Når løftemotoren brukes i våtrom skal løftemotoren forflyttes bort fra dusjområdet når den ikke er i bruk.

Friløft (frittstående løftestilling)

- Ved arbeid med friløft, tenk på tippefaren. Forflytning skal alltid utføres rett under skinene.

Øvrig

- Les nøye igjennom vedlagte manual til løftemotoren og løfteseilet.
- Kontroller daglig løfteseilet og løftemotorens løftebånd. Skadete løfteseil skal kastes.

Invacare A/S

Grensevingen 9, Postbox 6230, Etterstad, N-0603 Oslo. Tel: 22-57 95 00 - Fax: 22-75 9501
E-mail: norway@invacare.com, www.invacare.no

Ident. nr.: 1451710
Version 02 05.2005