

# Forenklet brukerveiledning\*

Invacare | **Perfecto<sub>2</sub> / Perfecto<sub>2</sub> V**

Homefill -kompatibel



\* Dette er en FORENKLET brukerveiledning. **FØR bruk er det er svært viktig å alltid lese komplett brukerveiledning som følger med produktet.** Ta kontakt med BHM dersom du mangler denne.

For mer informasjon om Invacares produkter, deler og tjenester, se gjerne vår hjemmeside [www.invacare.no](http://www.invacare.no).

Trusted Solutions,  
Passionate People



## HÅNDBTERING

Oksygenkonsentratoren skal alltid stå oppreist under transport. Om konsentratoren skal forsendes og emballasje mangler, kan dette skaffes fra Invacare.

## BETJENINGSANVISNING

Din oksygenkonsentrator er ment for individuell bruk. Det er et elektronisk apparat som skiller ut oksygen fra luften i rommet og tilfører oksygen direkte til deg via nesekanylen.



Avdeling for behandlinghjelpemidler (BHM) kan vise deg hvordan du bruker oksygenkonsentratoren. Du bør kontakte BHM dersom du har spørsmål eller problemer som gjelder oksygenkonsentratoren. Den komplette brukerhåndboken gir deg grunnleggende informasjon om produktet.

**Advarsel:** Luftinntaket på apparatet må **aldri** blokkeres. Pass på at det ikke er lo, hår og lignende i luftinngangene. Enheten plasseres i god avstand fra vegger, gardiner, møbler og lignende. Konsentratoren går på hjul og kan enkelt trilles fra rom til rom. Maksimal lengde på slangen er 15 meter.

**MERK:** Bruk av utstyr som PreciseRx™ pediatrik flowmeter og HomeFill-kompressor vil føre til at alarmer om mulig blokkering deaktiveres

## VEDLIKEHOLD

Kabinetfilteret må rengjøres én gang per uke. Det kan støvsuges eller vaskes med mildt såpevann. Filteret må være helt tørt når det settes på plass igjen.

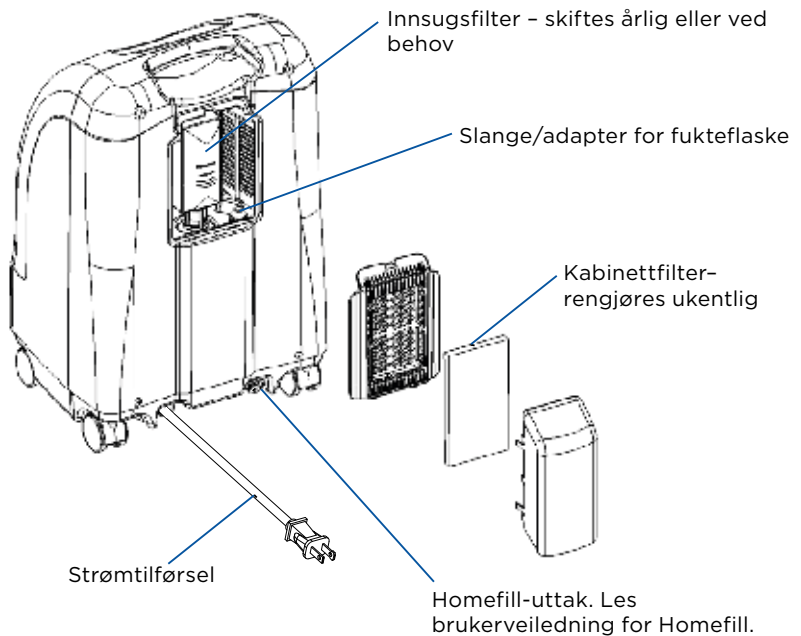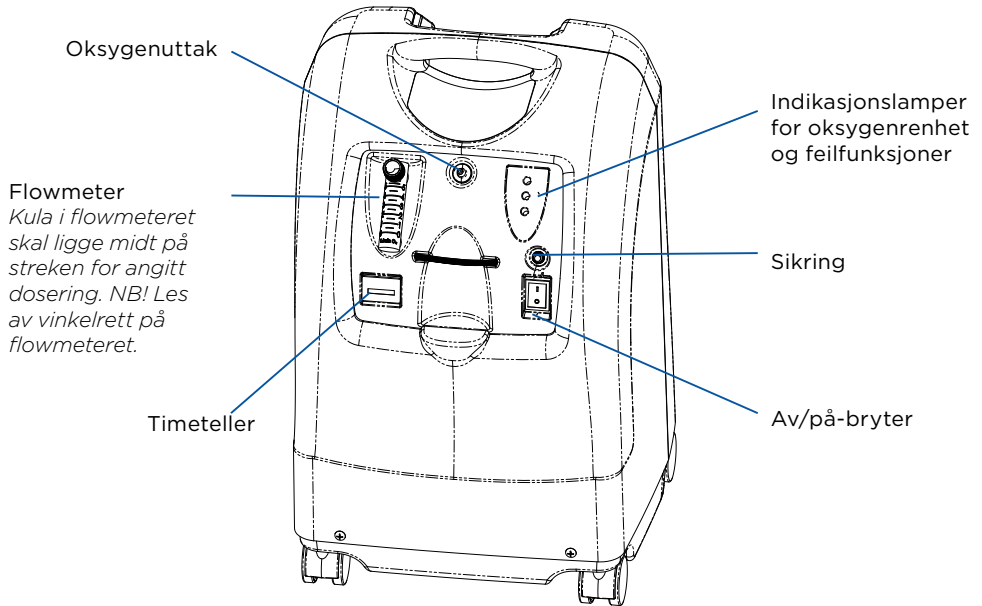

## FORKLARING AV INDIKATORLYS FOR OKSYGENRENHET

**GRØNT** lys (O<sub>2</sub>): normal drift, O<sub>2</sub> 85–96 %.

**GULT** lys (⚠), O<sub>2</sub> 73–85 %: ring BHM øyeblikkelig. Du kan fortsette å bruke konsentratoren hvis du ikke har fått annen beskjed. Sørg for at det er en reserveløsning for oksygentilførsel i nærheten.

**RØDT** lys (🔔), O<sub>2</sub> lavere enn 73 %. Enheten er helt avstengt. Skift øyeblikkelig til reserveoksygen og ring BHM.

**GRØNT** lys med **GULT** blinkende lys: ring BHM øyeblikkelig. Oksygensensoren fungerer ikke riktig; du kan fortsette å bruke konsentratoren.

### OKSYGENRENHET

Automatisk stengning  
(bruk reserveløsning)



← **RØD (kontakt BHM)**

Under  
normalt



← **GUL**

Normalt

O<sub>2</sub>



← **GRØNN**



Symbolforklaring indikatorlys for oksygenrenhet

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
E-post: norway@invacare.com  
www.invacare.no

© 2016 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

All informasjon er korrekt  
ved trykketidspunkt. Invacare  
forbeholder retten til å endre  
produktspesifikasjoner uten  
videre konsultasjon.

Perfecto2 V user manual - NO  
- 12/2016

**Ved spørsmål, ta kontakt med din avdeling for  
behandlingshjelpemidler.**



**Yes, you can.®**