

---


## *Brukerveiledning - bytte ut CPR-stroppen på SoftAir madrassene*

---


23.07.2015



## Trekk ut CPR- stroppen

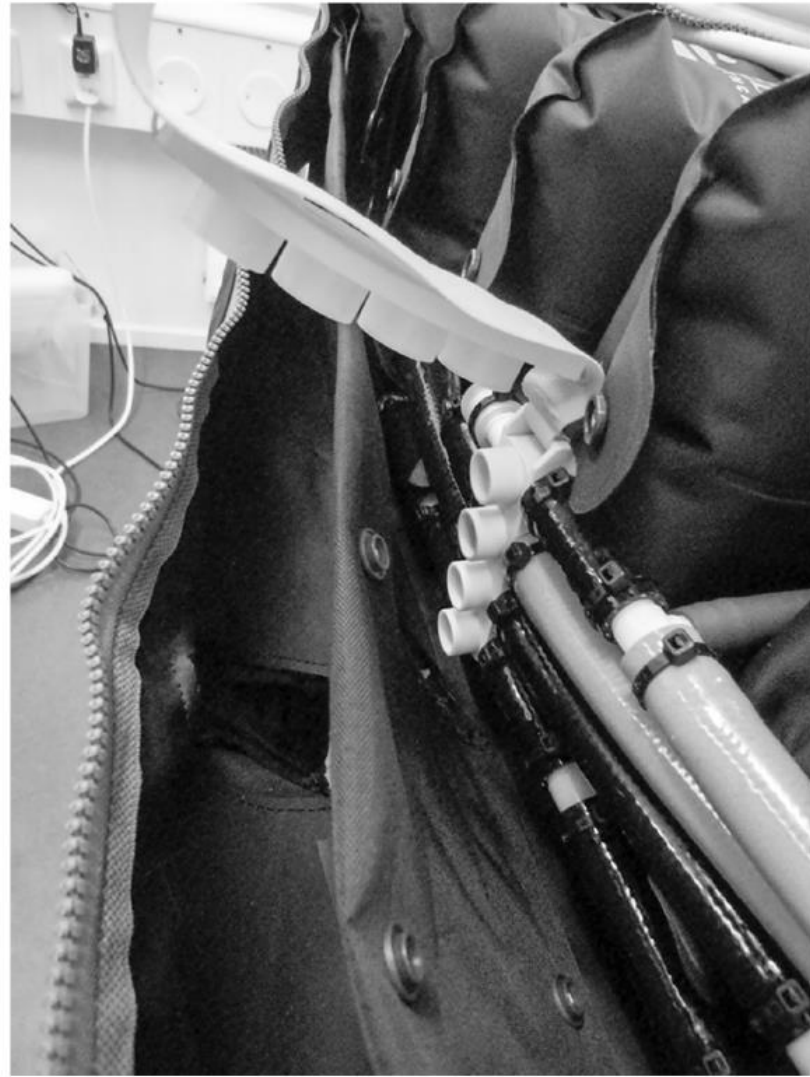

Skjær av den nåværende CPR-stroppen forsiktig og kast den

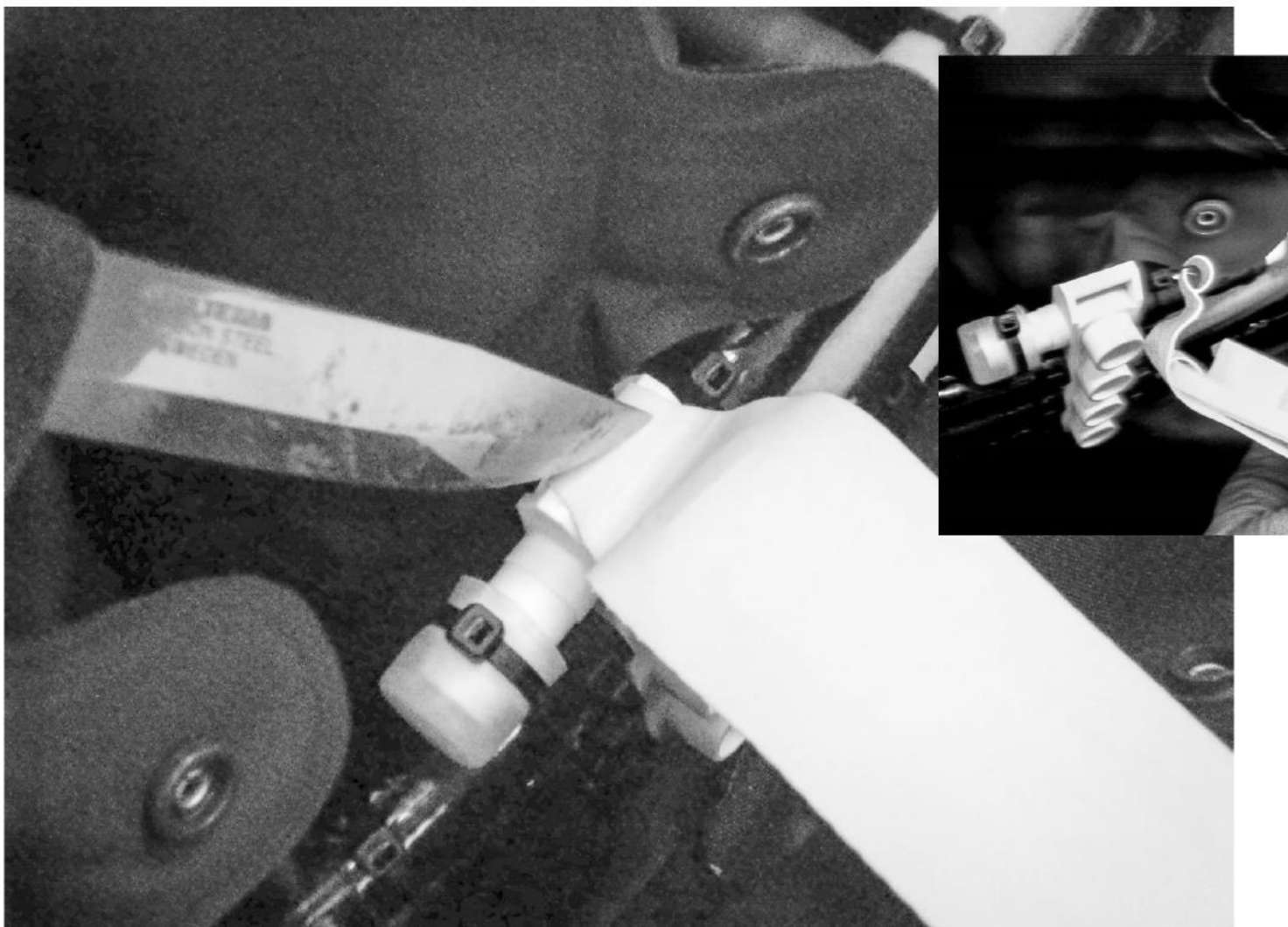

Ta den nye CPR-stroppen og før øverste del gjennom CPR festet. Trekk låsepinnen gjennom hullet for å sikre CPR-stroppen.



Sett på plass den nye stroppen og sørg for at forseglingene er godt festet. Husk å sett hurtighåndtaket godt på plass når CPR – stroppen er festet.

