




### **Hybrid teknologi - statisk/dynamisk madrass**

**Softform Premier Active 2** er en videreutvikling av det klinisk utprøvde Active-systemet, nå med nye og forbedrede egenskaper designet for å øke brukerens komfort ytterligere.

**Softform Premier Active 2** er velegnet til pasienter med middels og høy risiko for å utvikle trykksår i kategori 3 og 4. Madrassen er en kombinasjonsmadrass som har et innlagt vekseltrykk mellom ett lag profilert- og ett lag stabiliserende høykvalitetsskum.

**Softform Premier Active 2** kan brukes med eller uten aktivering av vekseltrykket. Uten vekseltrykket aktivert, beholder den posisjon som en statisk skummadrass for brukere med middels risiko for trykksår. Dersom brukeren har behov for en dynamisk madrass, kan man enkelt koble til en pumpe som gir madrassen en overflate med vekslende trykk som gir enda bedre trykkavlastning. Dette kan gjøres uten å flytte brukeren, slik at brukerens komfort ivaretas.

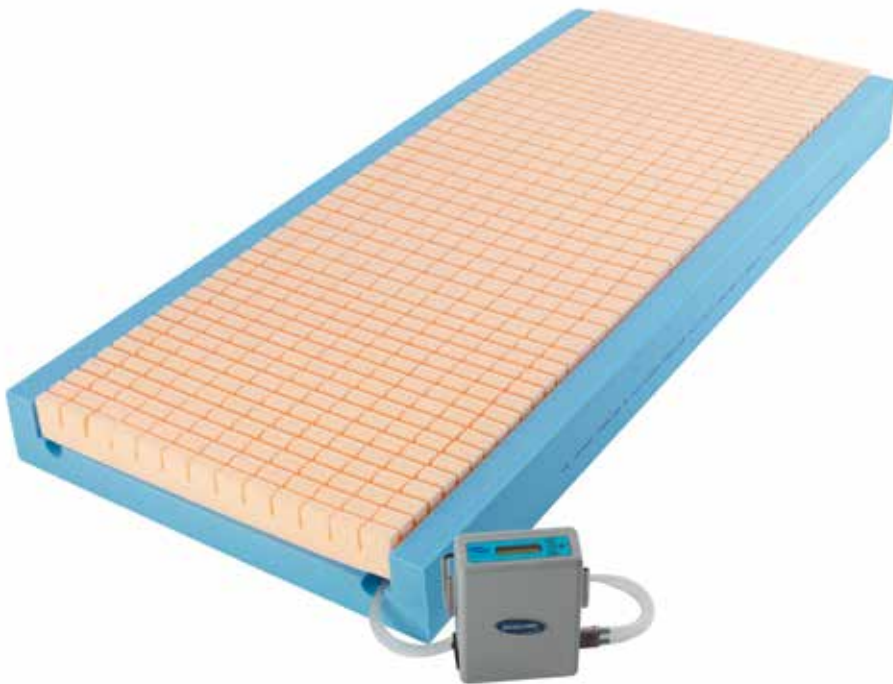

### Statisk/dynamisk madrass

Det dynamiske luftinnlegget mellom de to skumlagene gjør det mulig å veksle mellom statisk madrass og dynamiske vekseltrykkssystem uten ubehag for brukeren. Luftcellene under skummet veksler i sykluser på 10 minutter og gir trykkavlastning under vekslingene.

### Digital pumpe

Den digitale pumpen justerer trykket etter brukerens vekt og sikrer dermed at trykket til en hver tid er optimalt. Pumpen er utstyrt med alarm i tilfelle strømstans eller feil.

### Elastisk inkontinenstrekk

Madrassstrekket er svært elastisk og tilpasser seg skumkjernens formbare overflate uten å skrukke, samtidig

som brukeren synker godt ned i materialet.

### Fra statisk til dynamisk



For å fylle madrassen løsner man slangen fra fotenden av madrassen.



Fest slangen til den digitale pumpen.



Trykk på «on». Dette krever ingen tilleggsjusteringer.



Pasienten har nå en dynamisk madrass med en overflate som veksler i sykluser på 10 minutter.

## Egenskaper og tilbehør



Den innovative digitale pumpen har LCD-skjerm og alarm med lyd.



Pumpens status vises på LCD-skjermen.



Når madrassen virker med vekslende trykk sørger det unike\* designet av luftcellene for at pasienten har god støtte under hele kroppen.\*Patentsøkt



LED-skjermen kan stilles inn på ni forskjellige språk.



Ved punktering kan hvert enkelt luftinnlegg enkelt byttes.




Pumpeslangen har et trekk rundt seg av hygienehensyn.



Pumpens kroker er designet for å passe sengegavler i ulike størrelser.

Kombinasjonsmadrass med dynamiske luftceller som gjør at man enkelt kan veksle mellom en statisk og en dynamisk madrass.

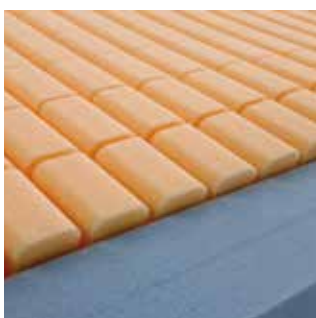

Invacares **Softform Premier** er en klinisk utprøvd madrass som er ledende innen trykkavlastning.



**Softform Active 2** har et elastisk trekk som puster godt.



Madrasen beholder sin posisjon også ved strømstans.



Madrasen er konstruert slik at det er enkelt å skifte ut de ulike bestanddelene.


## Tekniske data



Bredde:  
830 - 900 mm



Lengde:  
1810 - 2100 mm

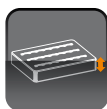

Høyde:  
152 mm



Vekt:  
14 kg



Maks. brukervekt:  
247.6 kg



Vask: 95°

**Softform  
Premier  
Active 2**

### Pumpe

Syklustid: 10 minutter (1 i 2 sykluser)

### Madrasen oppfyller følgende standarder:

- Europeisk standard: BS EN 597-1 Cig
- Europeisk standard: BS EN 597-2 Match
- BS7177:1996 Crib 5 og Crib 7.

## Farge



Baltisk blå



Trekk av type SRT (Strikethrough Resistant Technology) laget av høyresistent polyuretan som gjør det ekstra robust. Kan fås enten med Crib 5 eller Crib 7 for brannhemming. Tilgjengelig som tilbehør.

Art. nr.	Skum- og luftmadrass	Madrassmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
1554088	Softform Premier Active 2	83x200x15,2	Spesialskum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk u/pumpe
1554089	Softform Premier Active 2	88x200x15,2	Spesialskum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk u/pumpe
1554778	Pumpe til Premier Active 2			