

## • Demontering

1. Forsikre deg om at bremsene står på.
2. Tilpass sengen til egnet høyde.
3. Demonter alt tilleggsutstyr.
4. Juster sengen til riktig høydenivå slik at sveisepunktene på understellets ramme og løftearm står på tvers overfor hverandre.
5. Trekk ut strømledningen.
6. Fjern låsekammen fra styringsenheten.
7. Koble fra ledningene ryggstøtte-, lår- og benmotoren, og forsikre deg om at kablene ikke sitter fast i understellet.
8. Løft opp setedelen.
9. Trekk hodetdelen av liggeflaten ut til den stopper og senk den ned til gulvet.
10. Utløs de to smekklåsene i benenden ved å vri låsebolten med klokken.
11. Vipp bendelen ned, løft den av understellet og plasser seksjonen på gulvet.
12. Sett inn strømledningen og juster sengens høyde til laveste posisjon.



### Det delelige understellet kan demonteres på følgende måte:

1. Håndkontroll og kontrollenhet vippes opp og fjernes.
2. Smekklåsen på kontrollenheten (på hode- og fotende) utløses
3. Den mekaniske armen heves til vertikal posisjon ved å bruke håndtaket, og løftes vekk fra understellet
4. Montering utføres i omvendt rekkefølge.

Ident. no.: I525012  
Version: 01 04.2009




## Scanbed 755™

Yes, you can.®

- **Betjening av den innebygde madrassstøtteforlengeren**
- **Montering**
- **Plassering av sengen i transportposisjon**
- **Demontering**

- **Betjening av den innebygde madrassstøtteforlengeren**

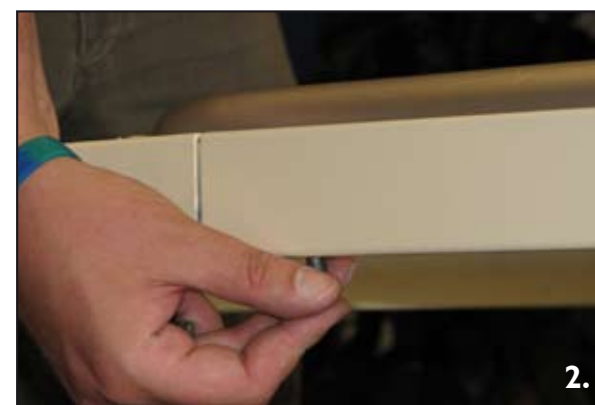

**SB755™** kan forlenges henholdsvis fem og ti cm i både hode- og fotende, 20 cm til sammen. For å forlenge sengen i begge ender, må man benytte unbrakonøkkelen. Nøkkelen sitter på innsiden av tverrstangen i hodeenden.

1. Sidegrinden fjernes
- 2a. Fotenden: Fjern de to skruene som holder sengens gavlfeste i fotenden ved å bruke unbrakonøkkelen.
- 2b. Hodeenden: Fjern de to skruene som sitter ca. 20 cm fra sengegavlen ved å bruke unbrakonøkkelen.
3. Dra ut sengens gavlfeste fem eller ti cm, og sett i/stram skruene.
4. Løsne begge skruene som holder madrassforlengeren på plass, dra ut forlengeren til ønsket posisjon og stram begge skruene.
5. Legg madrassen på plass, eller legg inn madrassforlengeren
6. Sett sidegrinden(e) på plass.

## • Montering

1. Forsikre deg om at bremsene står på.
2. Sidegrindene og sengegavlene må fjernes fra transportkrokene.
3. Transportkrokene foldes opp og distansestangen foldes inn.
4. Sett strømledningen i en stikkontakt.
5. Juster saksen til riktig høydenivå slik at sveisepunktene på understellets ramme og løftearm står på tvers overfor hverandre.



6. Plasser hodeenden på enden av understellet og vipp hodeenden slik at glidestykkene glir inn i styresporet.

7. Plasser benenden slik at de to smekklåsene settes inn i de to leddene på den mekaniske armen etter at benenden er vippet til horisontal stilling. Det er viktig at smekklåsene festes ordentlig og at innleggene settes i motsatt ende av åpningene i hodeenden.



8. Løft hodeenden til horisontal posisjon og legg den over innleggene til den stopper.

9. Dytt ned setedelen, og hode- og bendelen låses sammen.



10. Monter kablene til motorenei styringsenheten og monter låsekammen på styringsenheten.

11. Monter tilleggsutstyr.

## • Plassering av sengen i transportposisjon

1. Løftesaksen må være i laveste posisjon. Hode og bendelen henges på basens transportkroker, som vist. Det er ikke viktig hvilken side seksjonene henger.




2. Hode og bendelen skal tiltes noe innover når de festes på krokene. Etter at de er tiltet tilbake i vertikal posisjon, står de ved egen hjelp.



3. Hode og bendelen låses med distansestangen. Dette sikrer at de ikke velter.



4. Opphengsbøyler er foldet ut. Det er viktig at ikke tilbehøret henges på krokene før distansestangen er montert.

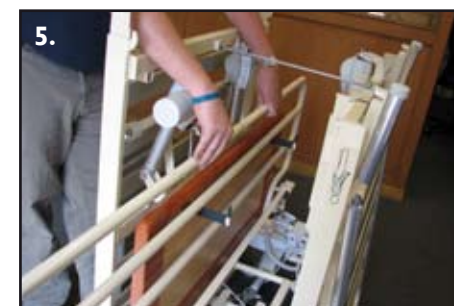

5. Sidegrinder og endegavler henges på opphengsbøylene og løftebøylen festes i understellet fotende.



6. NB! En madrass kan nå plasseres mellom hode og bendelen.