



## Forebygging av trykksår ved hjelp av trykkveksling


Invacare **Scandi-Puls** sørger for maksimal komfort ved at det skjer en trykkveksling under brukeren. Ved hjelp av to uavhengige luftkanaler veksler trykket fra et sted på kroppen til et annet med jevne mellomrom. **Scandi-Puls** kan brukes til forebygging av trykksår hos brukere med lav risiko for å utvikle sår.

## Forebygging av trykksår

Invacare **Scandi-Puls** er konstruert med to uavhengige luftkanalsystem som vekselvis pumpes opp og tømmes. På denne måten blir det en trykkveksling under brukeren, slik at trykkpunktene mot kroppen avlastes med jevne mellomrom. For å gjøre trykkvekslingen komfortabel for brukeren, fylles det ene kanalsystemet med luft før det andre tømmes. Trykkvekslingen skjer hvert 3.minutt.

## Optmal konstruksjon

**Scandi-Puls** er laget av et mykt materiale som er antibakterielt og motstandsdyktig mot væske. Overflaten er dessuten lett strukturert for å hindre at brukeren glir ned i sengen. Madrassen leveres med en nesten lydløs kompressor som er meget enkel i bruk.

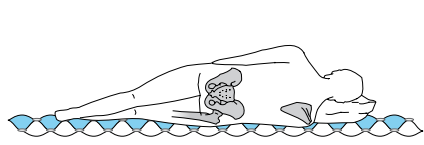

## Egenskaper



### Folie

Lett strukturert overflate hindrer brukeren å gli ned i sengen.



### Kompressor

Leveres med en meget støysvak kompressor.



### Lappesaker

Madrassen repareres enkelt med lappesakene som følger med hver madrass.

## Tekniske data



### Scandi-Puls

Størrelse:  
800 x 1800 x 60 mm



Vekt: 3,8 kg



Maks brukervekt:  
90 kg



Rengjøring: Se  
vaskeanvisning i  
bruksanvisningen

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
Telefaks: +47 22 57 95 01  
E-mail: [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

© 2011 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykkesidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Scandi Puls - NO - 10/2011