

# Brukermanual

Invacare® | **Sonnet Combi**



Norsk brukermanual

**ID-nr.: 913988**

**Versjon: 02.09.2002**



**Sonnet Combi** er spesielt utviklet til bruk i helsesektoren, og har en rekke funksjoner og egenskaper som er designet for å imøtekomme denne sektorens behov.




Figur 1

Sideklappbordet klappes ut ved å løfte i håndtaket samtidig som det vippes ned. Når bordet senkes mer enn 45° låses det i valgt posisjon. Se figur 1.

Sideklappbordet slås sammen ved å løfte det i håndtaket og la det gli tilbake i stående posisjon.

Sengebordet kan betjenes fra både høyre og venstre side av sengen.

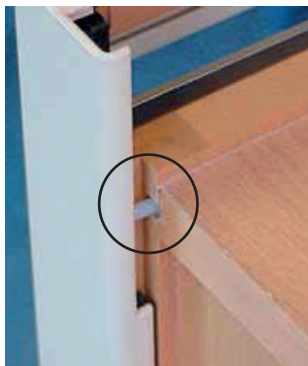

Figur 2

Sideklappbordet kan monteres på begge sider av sengebordet.

Trekk da klappbordet loddrett opp med den ene hånden, trykk inn låsetappen med den andre hånden og dra beslaget på klappbordet over denne. Låsetappen sitter øverst på sengebordets bakside. Se figur 2.

Monter klappbordet på den andre siden ved å trykke låsetappen inn og føre beslaget over denne.



Figur 3

Sideklappbordet høyderuleres ved å løfte det til 45° og føre det til ønsket høyde. Det låses i denne høyden ved å senke det til vannrett posisjon. Se figur 3.



Figur 4

For å forenkle rengjøring ved tilsmussing, kan skuffeinnsatsen demonteres og rengjøres i skyllerom.

Skuffen trekkes da ut til den stopper, løftes opp og trekkes helt ut slik at skuffeinnsatsen kan tas ut. Se figur 4.

Etter rengjøring settes innsatsen tilbake og skuffen dyttes/løftes tilbake på plass.

Sengebordet kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler og klut eller myk børste. Bruk ikke etsende midler eller løsemidler.

De avtagbare plastikkdelene kan rengjøres i oppvaskmaskin. Bordet tåler ikke høytrykkspyling.

Ingen av sengebordets bevegelige deler krever smøring. Sørg imidlertid for at de er rene.

*Invacare **Sonnet Combi*** må oppbevares i et rom med luftfuktighet tilsvarende et vanlig oppholdsrom (10–80 %) og temperatur mellom 0–50°.

Under transport må sideklappbordet være slått opp langs sengebordet og dør og skuffer må være lukkede.

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
Telefaks: +47 22 57 95 01  
E-mail: [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

© 2015 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

All informasjon er korrekt  
ved trykketidspunkt. Invacare  
forbeholder retten til å endre  
produktspesifikasjoner uten videre  
konsultasjon.

Brukermanual Sonnet Combi -  
NO - 06/2015



**Yes, you can.®**