

# Madrasser



[www.invacare.no](http://www.invacare.no)



---

## Vi kan madrasser!

---

Invacare er en ledende leverandør av tekniske hjelpemidler, og har lang erfaring med store og små leveranser til det norske markedet.

I denne katalogen presenterer vi hele bredden i vårt madrass-sortiment som vil kunne dekke mange av de behov som finnes i ulike helseinstitusjoner.

Valg av rett madrass er viktig for å sikre god pasientkomfort, og for å forebygge og behandle trykksår. Før madrassene kan du se vår madrassmatrise, *Invacare **Stairway***, som vi håper kan bidra til å forenkle valget av rett madrass basert på sårstadiet til den aktuelle pasient. Du vil også kunne lese mer om hva som forårsaker trykksår, hvordan trykksår kan forebygges samt madrasskontroll. Vi har madrasser som ivaretar behovene til pasienter som har fra lav til høy risiko for å utvikle trykksår. Sortimentet er sammensatt av produkter som er fremstilt av skum, statisk- og dynamisk luft.

Dersom du vil vite mer om oss og hva vi kan gjøre for deg, om våre madrasser eller andre produkter, last ned produktbrosjyrer, brukermanualer og reservedelskataloger fra vår hjemmeside [www.invacare.no](http://www.invacare.no) eller ta kontakt med vår representant i ditt distrikt for råd og veiledning.

Vi håper du gjennom denne katalogen vil bli bedre kjent med våre produkter.

Vi gleder oss til å hjelpe deg!

Med vennlig hilsen fra oss i Invacare

---

## Kontaktinformasjon

---

Distrikt	Kontaktperson	E-post	Telefon
Hele Norge	Kundeservice - forespørsler, support etc.	<a href="mailto:norway@invacare.com">norway@invacare.com</a>	22 57 95 00
Hele Norge	Kundeservice - nye ordre	<a href="mailto:ordernorway@invacare.com">ordernorway@invacare.com</a>	22 57 95 00
Hele Norge	Teknisk service	<a href="mailto:teknisk@invacare.com">teknisk@invacare.com</a>	22 57 95 00
Oslo, Akershus og Østfold	Aina Evensen	<a href="mailto:aevensen@invacare.com">aevensen@invacare.com</a>	976 09 418
Innlandet	Bjørn Sæther	<a href="mailto:bsaether@invacare.com">bsaether@invacare.com</a>	917 33 399
Vestfold og Telemark, Buskerud	Tom Inge Paulsen	<a href="mailto:tipaulse@invacare.com">tipaulse@invacare.com</a>	915 14 513
Agder	Tom Inge Paulsen	<a href="mailto:tipaulse@invacare.com">tipaulse@invacare.com</a>	915 14 513
Rogaland	Oddmar Byberg	<a href="mailto:obyberg@invacare.com">obyberg@invacare.com</a>	907 43 640
Vestland	Trond Langeland	<a href="mailto:tlangela@invacare.com">tlangela@invacare.com</a>	907 40 097
Møre og Romsdal	Ødegaard Engros AS	<a href="mailto:ode@norengros.no">ode@norengros.no</a>	70 10 92 92
Sør-Trøndelag	Arild Nordgaard	<a href="mailto:anordgaa@invacare.com">anordgaa@invacare.com</a>	415 22 260
Nord-Trøndelag	Kathrine R. Pedersen	<a href="mailto:krokkepe@invacare.com">krokkepe@invacare.com</a>	911 53 091
Nordland	Knut Hagen	<a href="mailto:khagen@invacare.com">khagen@invacare.com</a>	917 73 709
Nordland	Helseservice Engros AS	<a href="mailto:hs@norengros.no">hs@norengros.no</a>	76 11 75 00
Troms og Finnmark	Helseservice Engros AS	<a href="mailto:hs@norengros.no">hs@norengros.no</a>	76 11 75 00
Salgssjef Region Øst	Karianne Nyrud Jansen	<a href="mailto:knjansen@invacare.com">knjansen@invacare.com</a>	915 42 478
Salgssjef Region Nord-Vest-Sør	Rune Sandbakk	<a href="mailto:rsandbakk@invacare.com">rsandbakk@invacare.com</a>	909 38 220

---

## Innhold

---

### Valg av madrass - Invacare Stairway madrasskontroll og informasjon om trykksår

---

#### Madrass

---

##### Statisk - Skum

<i>Invacare</i> <b>Essential Touch</b>	10
<i>Invacare</i> <b>Dacapo</b>	12
<i>Invacare</i> <b>Softform</b> Premier	20
<i>Invacare</i> <b>Softform</b> Premier MaxiGlide	22
<i>Invacare</i> <b>Softform</b> Premier Spinal	24
<i>Invacare</i> <b>Softform</b> Bariatri	28

##### Hybrid (statisk/dynamisk) - Skum og luft

<i>Invacare</i> <b>Softform</b> Premier Active 2 RX	30
---	----

##### Statisk - Luft

<i>Vicair</i> <b>Academy madrass</b>	34
--------------------------------------	----

##### Dynamisk - Luft

<i>Invacare</i> <b>SoftCloud</b> ™ Top (overmadrass)	36
<i>Invacare</i> <b>SoftCloud</b> ™ Air	36
<i>Invacare</i> <b>SoftCloud</b> ™ Ace	36
<i>Invacare</i> <b>SoftCloud</b> ™ Pro	36

#### Overmadrass

---


##### Statisk - Luft

<b>Carebed</b>	42
----------------	----

##### Tilbehør

---

<i>Invacare</i> <b>Soft Tilt</b> ™ 2.0	44
<i>Invacare</i> <b>Softform</b> Heelpad	48
<i>Invacare</i> <b>Flexipad</b>	50
<i>Invacare</i> <b>Maxxcare</b> Heel Pro Evolution hælavlaster	52

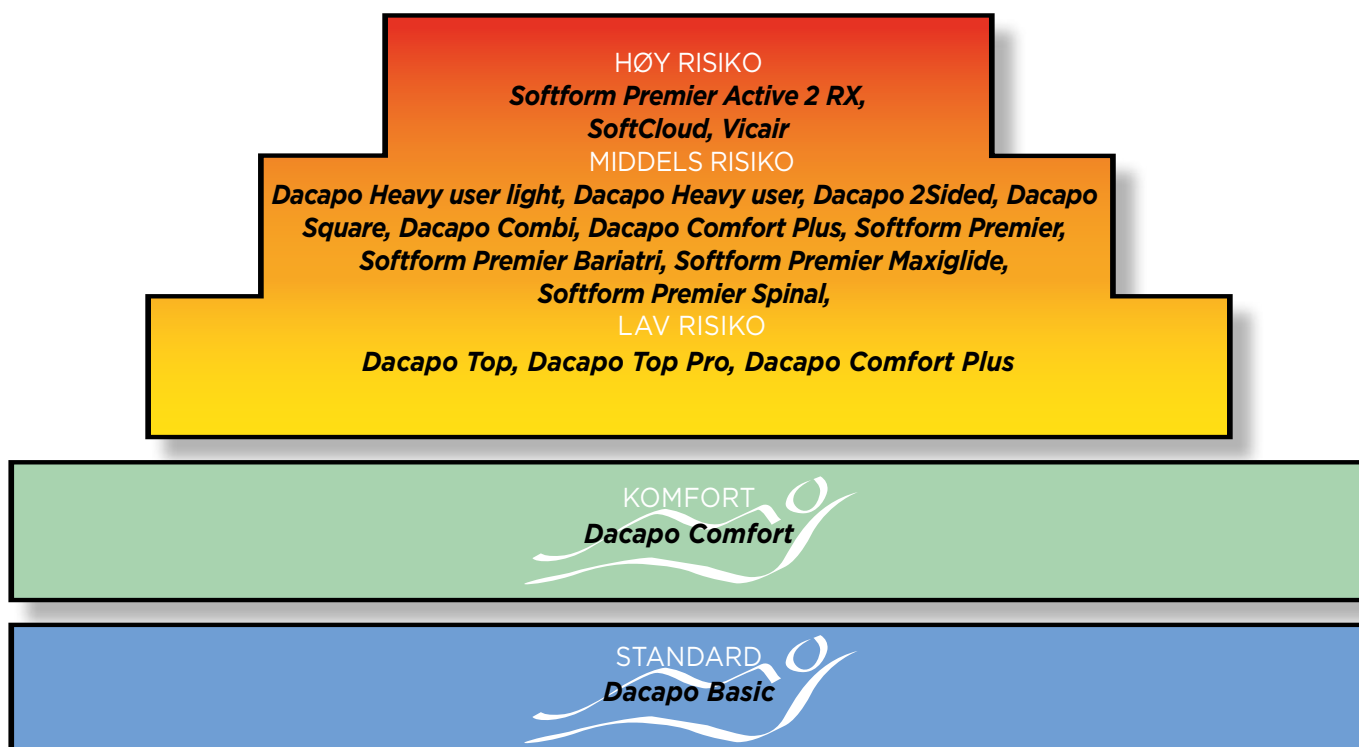

Invacare **Antidecubitus Stairway** beskriver våre anbefalinger ved valg av madrass til ulike risikogrupper, eller brukere som allerede har trykksår.

**Merk! Selv den aller beste madrassen kan ikke alene forhindre eller helbrede trykksår, den skal alltid inngå i en komplett pleieplan.**



Forebygging hos brukere med høy og svært høy risiko for å utvikle trykksår.

Brukere med trykksår i stadium 3 eller 4 eller massive sår i stadium 2.

Brukere som til stadighet har tilbakevendende trykksår.



Forebygging hos brukere med middels risiko for å utvikle trykksår.

Brukere med trykksår i stadium 1 og 2.




Forebygging hos brukere med lav risiko for å utvikle trykksår.

Brukere med trykksår i stadium 0 og 1.



Brukere med høyere krav til liggekomfort.

Ingen risiko for å utvikle trykksår.

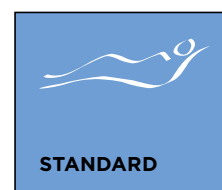

Ingen risiko for å utvikle trykksår.

---

## Hva forårsaker trykksår?

---

Et trykksår er skader på huden og det underliggende vev, som regel på huden hvor det er benfremspring. Skadene er oftest forårsaket av trykk, eller trykk i kombinasjon med skyvkrefter eller friksjon.

Trykksår varierer i alvorlighetsgrad fra misfarging av huden til alvorlige, åpne sår der muskler og ben er synlige.

### Trykk

Trykk er en direkte (vertikal) kraft som oppstår når huden vår er i kontakt med en overflate, f.eks. når man sitter på en stol eller ligger på en madrass. Trykket mot huden fører til nedsatt blodsirkulasjon. Oksygen og næringsstoffer fraktes til huden vår via blodet, men trykk mot vevet, som utgjør huden vår, hindrer dette. Resultatet er at vevet blir skadet.

### Skyvkrefter

Skyvkrefter er også en kraft, men det virker i en annen retning en trykk. Skyvkrefter er en parallell eller horisontal kraft som fører til at huden og underliggende vev strekkes. Skyvkrefter kan oppstå når pasienten sklir ned i sengen eller stolen. Dersom huden henger fast i madrassen eller puten, vil dette forvrenge det underliggende vevet.

### Hvordan oppdage trykksår?

På lys hud, se etter vedvarende røde flekker som ikke forsvinner etter at trykket er fjernet fra området (figur 1). Se etter blå-lilla flekker på mørkere hud.



Figure 1

### Friksjon

Friksjon er når huden gnisser mot en annen overflate og kan inntreffe når en sklir ned i en stol eller seng. Denne typen skade er vanligvis ganske overfladisk og bør leges uten problemer. Imidlertid kan kroppens evne til å hele sår være nedsatt for syke eller eldre mennesker, og selv grunne sår kan utvikle seg til noe mer alvorlig.

### Temperatur

Økt kroppstemperatur er også antatt å øke risikoen for utviklingen av trykksår.

### Du bør også se etter:

- Hevelser
- Tørre områder
- Blemmer eller områder av sprukken hud etter blemmer
- Harde eller myke hudflekker som føles uvanlig røe eller svampete å ta på
- Endring i hudfarge
- Varme eller kalde områder over benfremspring

### Hvordan redusere risikoen for trykksår?

1. Sjekk huden for tegn på skader minst én gang om dagen hvis pasienten ligger eller sitter i lange perioder. Hvis det er mulig, anbefales det å reise seg og gå rundt i fem minutter hver time for å få i gang blodsirkulasjonen.
2. Bevegelse: Sørg for at pasienten snur seg og endrer posisjon regelmessig for å avlaste huden over de mest benete områdene på kroppen. Hvis pasienten ligger i sengen, kan han eller hun for eksempel oppfordres eller hjelpes til å rulle fra side til side hver halve time. Dette reduserer trykket og øker blodsirkulasjonen.
3. Det anbefales å bytte stilling i rullestol hvert 15. til 30. minutt. Dette kan gjøres ved å vugge fra side til side, lene seg fremover eller presse seg selv opp ved hjelp av armlenene for å avlaste presset på baken.
4. Hvis pasienten sitter eller ligger over lengre perioder, er det avgjørende å ha pute og madrass med trykkfordelende/trykkavlastende egenskaper for å redusere skaderisikoen.
5. Et balansert kosthold og rikelig med væske er viktig.
6. Beskytt huden: Holde huden ren og tørr og bruk milde såper som ikke tørker den ut. Tørk forsiktig uten å gni hardt. Hvis pasienten lider av inkontinens, vask huden med en mild såpe umiddelbart og klapp huden forsiktig tørr.




## Områder som er utsatt for trykksår?


Pasienter kan være i faresonen for å utvikle trykksår på svært kort tid dersom ikke reposisjonering og trykkavlastning finner sted.

## Tilleggseffekten av skyv- og friksjonskrefter


### Delvis liggende stilling

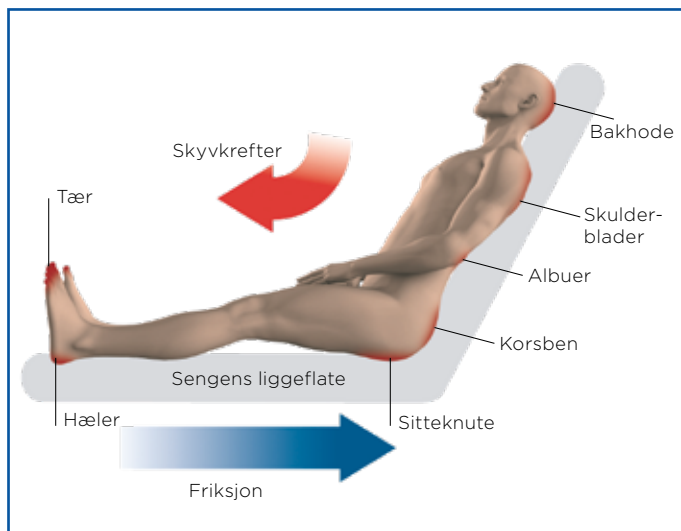


### Sittende stilling

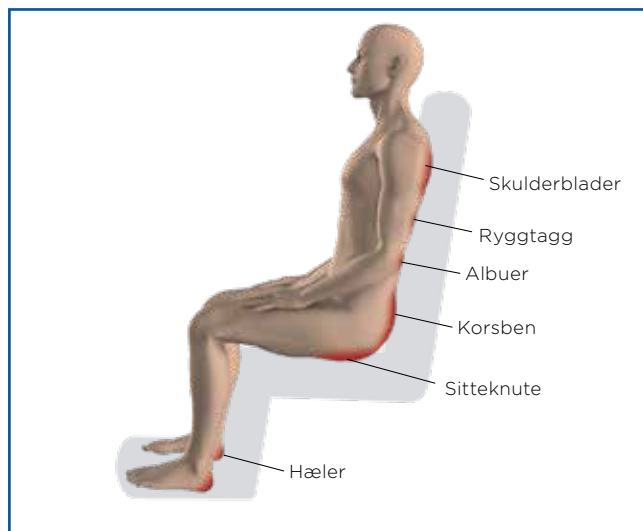

### Liggende stilling

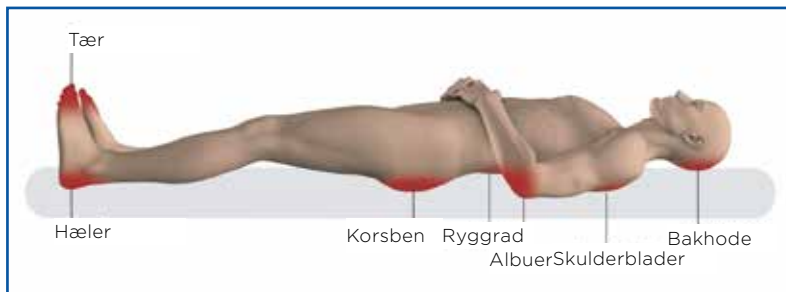


### Sideleie

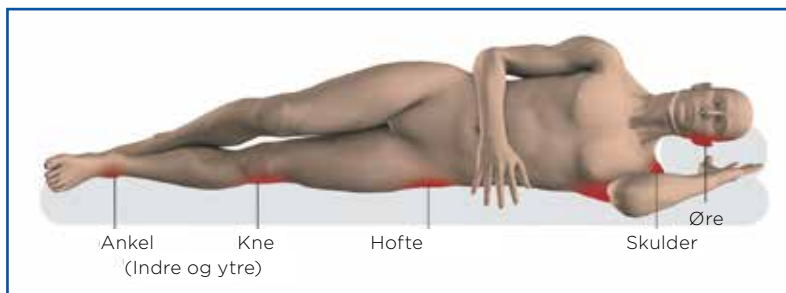

---

## Klassifisering av trykksår


---

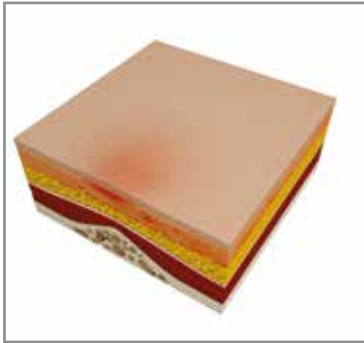

### Kategori/stadium 1:

---

Intakt hud med rødhet som ikke blekner på et lokalisert område, ofte over et benfremspring. Området kan være smertefult, fast, bløtt, varmere eller kaldere sammenlignet med nærliggende vev. Kategori 1 kan være vanskelig å oppdage på personer med en mørkere hudtone. Symptomene ovenfor kan antyde risiko for å utvikle trykksår.

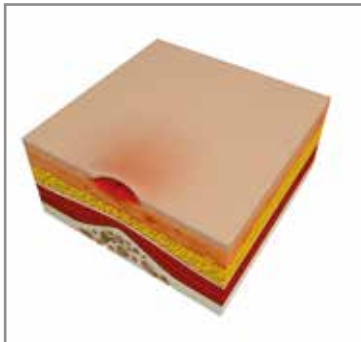

### Kategori/stadium 2:

---

Delvis tap av dermis (lær huden) som ser ut som et overfladisk åpent sår med rød-rosa sårbunn, uten dødt vev. Kan også se ut som en intakt eller revnet serumfylt eller blodfylt bløse. Ser ut som et skinnende eller tørt overfladisk sår uten dødt vev eller blåmerker.



### Kategori/stadium 3:

---

Tap av hele hudlaget. Underhuds fett kan være synlig, men ben, sener eller muskler er ikke eksponert. Dødt vev kan forekomme, men skjuler ikke dybden av vevstap. Kan inkludere underminering og tunneldannelse.



### Kategori/stadium 4:

---

Gjennomgående tap av vev med eksponerte ben, sener eller muskulatur. Dødt vev eller sårskorpe kan forekomme. Omfatter ofte underminering og tunneldannelse. Kategori 4 trykksår kan omfatte muskel- og/eller støttestrukturer som for eksempel hinner, sener eller leddkapsel.

Dette utdraget er hentet fra "Pressure Ulcer Prevention and Treatment EPUAP Review guideline" som er skrevet av European Pressure Ulcer Advisory Panel (2009). Denne oversikten er utformet kun som en veiledning. Invacare er ikke ansvarlig for eventuell medisinsk feilvurdering som følge av feiltolking av innholdet i dette dokumentet.

---

## Madrasskontroll

---

**Følgende informasjon er ment som en veiledning til hva man bør tenke på ved kontroll av madrasser.**

### Hvordan kontrollere madrassen?

#### 1. Madrasstype

---

Identifiser madrasstype og sjekk om madrassen har spesifikke eller særegne egenskaper av betydning for kontrollens utførelse og utfall.

#### 2. Madrassdybde

---

Mål madrassdybden ved bruk av linjal. Skummadrasser (ekskludert eventuell overmadrass) bør ha en dybde på minst 12 cm.

#### 3. Tilstanden på trekket

---

Ved kontroll skal man sjekke trekket både på utsiden og innsiden, og se etter synlige tegn på slitasje. Dette kan omfatte:

- Skade som f.eks. kutt og punktering
- Ødlagte sømmer
- Misfarging på glidleås
- Misfarging på innsiden av trekket eller på skummet
- Misfarging på utsiden av trekket\*
- Sjekk at trekket passer til selve madrassen

\*Husk å være ekstra oppmerksom når du leter etter flekker på mørkt eller mønstret trekk.

Hvis trekket er forurenset, skal madrassen tas ut av bruk inntil trekket er erstattet. For å unngå risiko for at pasient skal oppleve friksjon, er det viktig at det nye madrasstrekket passer til madrassen. Ta kontakt med Invacare om det usikkerhet rundt rett størrelse.

Hvis skummet og trekket er forurenset, bør hele madrassen erstattes. Dersom dette ikke gjøres, kan det være økt risiko for infeksjon for både pasient og pleier.

### Tips

Hver nye madrass bør bli tildelt et nummer og en merkelapp med dagen den ble tatt i bruk.



*Alle madrasser fra Invacare har egne felt for merking.*




## 4. Skummets tilstand

### a) Bunning

Det er viktig å sjekke om skummet har bunnet ut. Dette er tilfelle dersom man kjenner sengebunnen gjennom madrassen under testingen. Den anbefalte metoden for å avklare hvorvidt madrassen bunner er «knyttneve-test».

#### Gjennomføring av «knyttneve-test»

- 1) Kontroller at toppen av madrassen er på høyde med den som utfører kontrollen (ved hoftebenet)
- 2) Sørg for at madrassen ligger godt på plass
- 3) Stå på siden av sengen
- 4) Fold hendene sammen slik at du står med samlet knyttneve, hold albueene strake
- 5) Len deg forover med kroppsvekten og trykk knyttneven ned i madrassen på de syv punktene vist under

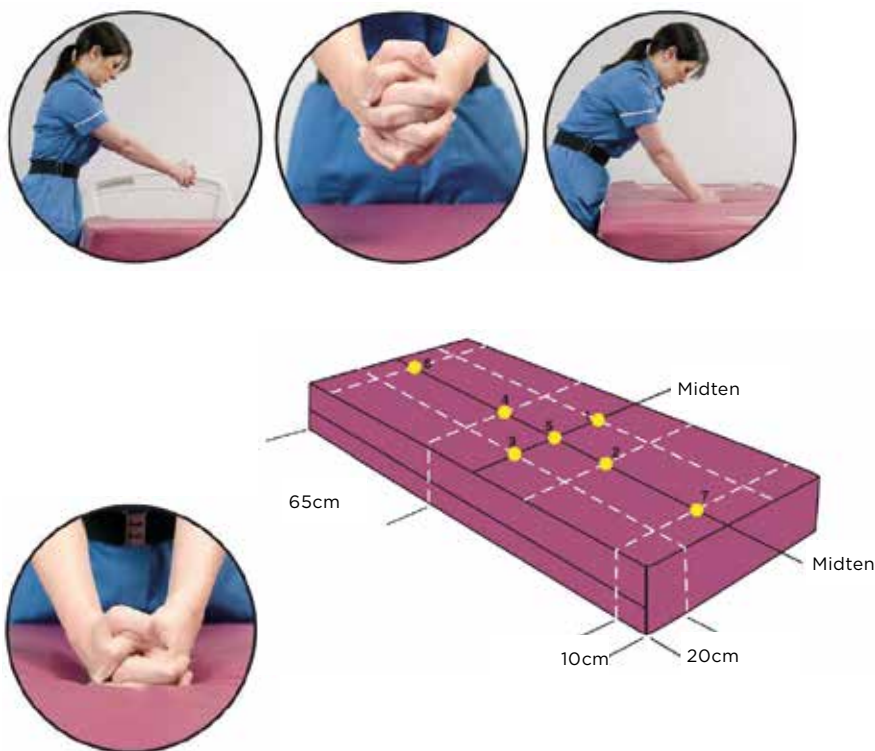

I tilfeller hvor madrassen bunner, bør madrassen tas ut av bruk umiddelbart. Dersom dette ikke gjøres kan pasienten utsettes for høy risiko for trykkskade.

### b) Indre skumkjerne

Ta av madrasstrekket og undersøk skumkjernen, og se etter følgende:

- Fuktighet med misfarging på innsiden av trekket
- Misfarging
- Lukt

Dersom noe av dette er tilfelle, anbefales det å bytte madrass. En forurenset skumkjerne kan utgjøre en betydelig risiko for smitte for både pasient og pleier.

# *Invacare* **Essential** Touch



Vendbar og trykkfordelende,  
komfortabel skummadrass



Invacare **Essential Touch** er en vendbar skummadrass som er praktisk, solid og gir god trykkfordeling og liggekomfort.

### Forebygger trykksår

- ▶ Madrassen har en nøkkelhull-formet profilering, der hver utskårede enhet er fleksibel og beveger seg slik at kroppen kan synke ned i materialet, trykket fordeles og optimal liggekomfort oppnås.


### Vanntett trekk

- ▶ Trekket i polyuretan er fireveis strekkbart og bidrar til å redusere friksjon og shearing. Stoffet er dampgjennomtrengelig og vannrett. Trekket har to håndtak på den ene siden som forenkler håndtering. Innsiden av trekket er hvitt, slik at det er enkelt å undersøke trekkets tilstand.



#### Profilering på begge sider

- ▶ Madrassen har utskjæring og kan vendes og brukes på begge sider. Dette bidrar til å øke produktets levetid.

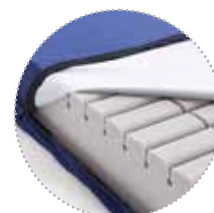

#### Glidelås på tre sider

- ▶ Gjør det enkelt å undersøke madrassen og fjerne trekket for vask.

## Tekniske data ▼

Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.

	Art. nr.	Størrelser	Maks. brukervekt	Vaskbart trekk	Skumtetthet
	Artikkelnr. ▼	Størrelser ▼	Maks. brukervekt ▼	Vaskbart trekk ▼	Skumtetthet (kg/m <sup>3</sup> ) ▼
<b>Essential Touch</b>	1631830	200 x 83 x 15 cm	150 kg	95°	40-42
	1631831	200 x 88 x 15 cm			
	1631884	220 x 83 x 15 cm			
	1631885	220 x 88 x 15 cm			

Sertifisert iht.:  
EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177: Crib Source 5

1. Merk! En madrass kan ikke alene forhindre eller helbrede trykksår, den skal alltid inngå i en komplett pleieplan.

# Dacapo-serien



BREDT SORTIMENT



# Dacapo-serien

Invacare **Dacapo** tilbyr et bredt utvalg av standard-, komfort- og trykkfordelende madrasser. **Dacapo**-sortimentet er utformet for å passe markedets tilbud av pleiesenger, samt tilgodese kravene til hygiene og miljøvennlighet. Madrassene er flammehemmende i samsvar med europeisk standard EN597-1 og EN 597-2.

## Egenskaper



### ◀ Inkontinenstrekk

Alle **Dacapo**-madrassene har inkontinenstrekk i polyuretanbelagt polyester. Allergitestet og innsatt med middel mot støvmidd.

- ▶ 100 % vanntett
- ▶ Dampgjennomtrengelig
- ▶ Pustende og skånsomt mot huden
- ▶ Fireveis strekkbart
- ▶ Kan vaskes på 95°



### ◀ Skum som raskt kommer tilbake til opprinnelig form

Polyuretanskum varierer i cellestruktur og tetthet. Skum med relativt uniform, tett cellestruktur gir god støtte under belastning, samtidig som det kommer raskt tilbake til sin opprinnelige form når det er uten belastning.



### ◀ Enkel å håndtere

Trekk med to håndtak som forenkler håndtering.



### ◀ Glidelås

Trekket har glidelås på tre sider som er dekket av dryppkant.

## Invacare **Dacapo Basic**

**Dacapo Basic** oppfyller grunnleggende krav for liggekomfort og hygiene til det fulle. Skumkjernen er av høy kvalitet med god bæreevne. Madrassen er konstruert med god ettergivelse slik at den gir et fast og støttende underlag. Det pustende og strekkbare inkontinestrekke er behagelig for brukeren å ligge på, og sikrer god hygiene. Et økonomisk meget godt alternativ.

Også tilgjengelig i **Basic Low** (5 cm høyde). Egnert som undermadrass til overmadrass, for eksempel til **SoftCloud Top**.



### **Dacapo Basic**

- ▶ 120 mm kaldskum
- ▶ Tetthet 38 kg/m<sup>3</sup>

### **Dacapo Basic Low**

- ▶ 50 mm kaldskum
- ▶ Tetthet 38 kg/m<sup>3</sup>

## Invacare **Dacapo Combi**

**Dacapo Combi** er en trykkfordelende standardmadrass som understøtter behandling og forebygging av trykksår ved lav og middels risiko. Den består av to lag; en øvre del av viskoelastisk skum, og en nedre del av kaldskum med høy kvalitet og god bæreevne. Denne kombinasjonen gir god trykkfordeling ettersom det viskoelastiske skummet former seg etter brukerens konturer og bevegelser. Skummet tillater brukeren å synke ned i materialet slik at trykket fordeles over en større flate.

Brukere med muskel- og leddsmerter kan oppleve lindring på denne madrassen. Den åpne cellestrukturen i det viskoelastiske skummet minimerer utvikling av varme og fukt, noe som øker komforten betydelig. Det nederste laget av kaldskum opprettholder madrassens stabilitet.



### Overdel

- ▶ 60 mm viskoelastisk skum
- ▶ Tetthet 50 kg/m<sup>3</sup>

### Underdel

- ▶ 80 mm kaldskum
- ▶ Tetthet 38 kg/m<sup>3</sup>



---

### Invacare **Dacapo Comfort Plus**


---

**Dacapo Comfort Plus** er en trykksårforebyggende madrass som understøtter behandling og forebygging av trykksår ved lav og middels risiko.

Den er skåret i nøkkelhull-formede firkanter i ulike størrelser. Dette gir en fleksibel overflate som gir god trykkfordeling ved at kroppen synker ned i materialet. Skummets åpne cellestruktur er dampgjennomtrengelig og lar kroppen puste.

Madrassen har god ettergivelse samtidig som den raskt får tilbake opprinnelig form.

Standard høyde er 140 mm. 150 mm høyde er tilgjengelig som spesial.

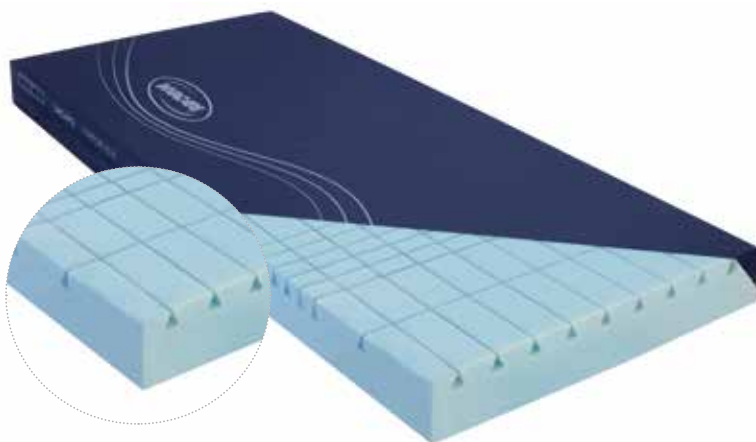

- ▶ 140 eller 150 mm miljøskum
- ▶ Tetthet 50 kg/m<sup>3</sup>


---

### Invacare **Dacapo 2Sided**

---

**Dacapo 2Sided** er en vendbar madrass med gode trykkfordelende egenskaper. Den ene siden er fastere enn den andre, som gir mulighet for individuell tilpasning uten å måtte bytte madrass. Madrassen har ikke definert hode- eller fotende. Madrassen har én side i viskoelastisk skum som former seg etter kroppens temperatur og bevegelser. Den åpne cellestrukturen minimerer utvikling av varme og fukt og gir økt komfort.

Den andre siden består av miljøskum skåret i firkanter som er individuelt fleksible og tillater kroppen å synke ned i materialet. Madrassen kommer raskt tilbake til sin opprinnelige form ved lette av trykk.

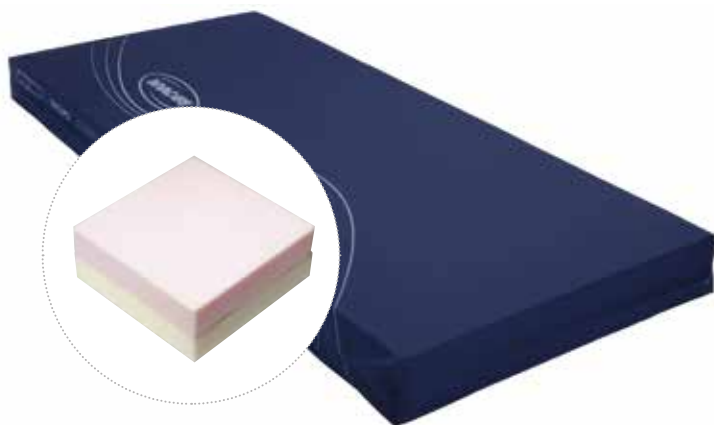


- Side i viskoelastisk skum
- ▶ Tetthet 50 kg/m<sup>3</sup>
  
- Side i miljøskum
- ▶ Tetthet 50 kg/m<sup>3</sup>

Bildet avviker noe fra virkeligheten.

## Invacare **Dacapo Square**

**Dacapo Square** er en standardmadrass med svært gode trykkfordelende egenskaper. Den understøtter behandling og forebygging av trykksår ved lav og middels risiko. Den har en base i kaldskum og et øvre lag i miljøskum. Det øvre laget er skåret i firkanter som er fleksible seg imellom. Kroppen synker dermed godt ned i materialet slik at det blir god trykkfordeling og friksjon og shearing minimeres. Den åpne cellestrukturen er dampgjennomtrengelig og lar huden puste. **Dacapo Square** gir høy liggekomfort. Skummets høye volumvekt gjør at madrassen raskt går tilbake til opprinnelig form. Basen i kaldskum gir stabilitet.

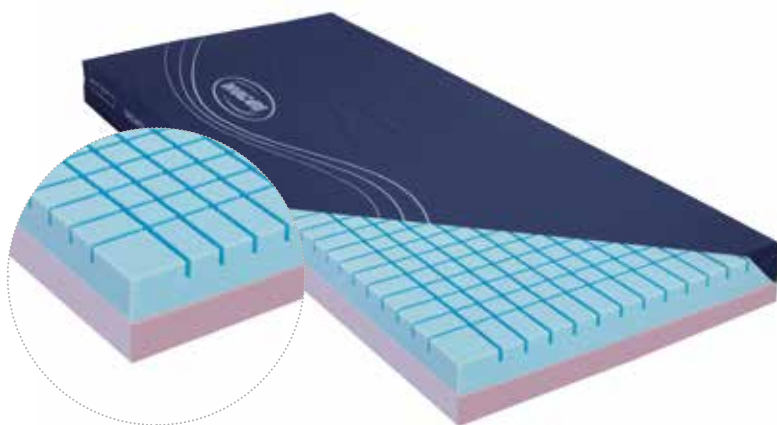

Overdel

- ▶ 80 mm miljøskum
- ▶ Tetthet 50 kg/m<sup>3</sup>

Underdel

- ▶ 60 mm kaldskum
- ▶ Tetthet 38 kg/m<sup>3</sup>

## Invacare **Dacapo Heavy User Light og Heavy User**

**Dacapo Heavy User** er skreddersydd for å imøtekomme tunge brukeres behov, samt gi et fast og støttende underlag.

Madrassen består av tre lag skum med ulik volumvekt og fasthet. Underlaget består av hardt, elastisk kaldskum som gir stabilitet og sikrer at madrassen ikke «ligges igjennom». Det midterste laget består av et mykere kaldskum og gir høy komfort. Overdelen er av viskoelastisk skum, som har trykkfordelende egenskaper.

**Dacapo Heavy User Light** har maks brukervekt 250 kg.



### **Heavy User Light**

Maksimal brukervekt 250 kg:

**Overdel:** (50 mm) Viskoelastisk skum 50 kg/m<sup>3</sup>. 100 N fasthet

**Midt:** (50 mm) Kaldskum 38 kg/m<sup>3</sup>. 140 N fasthet

**Underdel:** (50 mm) Kaldskum 50 kg/m<sup>3</sup>. 145 N fasthet

### **Heavy User**

Maksimal brukervekt 350 kg:

**Overdel:** (50 mm) Viskoelastisk skum 50 kg/m<sup>3</sup>. 100 N fasthet

**Midt:** (50 mm) Kaldskum 38 kg/m<sup>3</sup>. 140 N fasthet


**Underdel:** (50 mm) Kaldskum 50 kg/m<sup>3</sup>. 200 N fasthet

---

 Invacare **Dacapo Kid**


---

Dacapo Kid madrassen er designet spesielt til barnesengen **NordBed Kid**. Det øvre laget er skåret i firkanter som er fleksible seg imellom. Kroppen synker dermed godt ned i materialet slik at det blir god trykkfordeling og friksjon og shearing minimeres

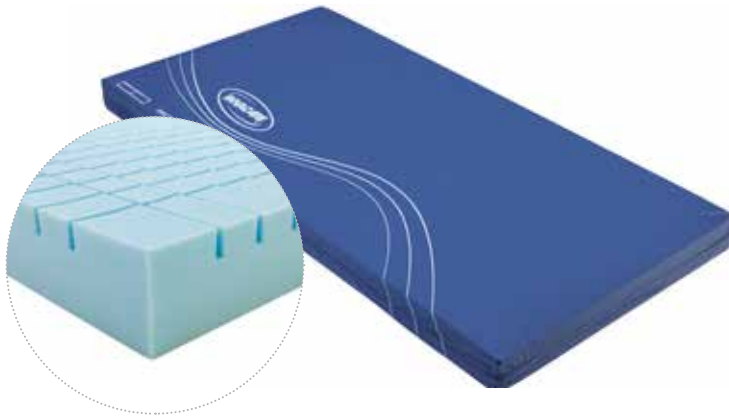
**Dacapo Kid Trekk**


- ▶ Inkontinestrekk
- ▶ Pustende polyuretan trekk
- ▶ Toveis strekkbart trekk
- ▶ Vaskbart på 95 grader
- ▶ Glidelås dekket med dryppkant

---

 Invacare **Dacapo Top**


---

**Dacapo Top** er en trykkfordelende overmadrass av høy kvalitet som kombineres med en standardmadrass. Madrassen er produsert i viskoelastisk skum som påvirkes av kroppstemperatur, og former seg etter brukerens konturer og bevegelser. Skummet tillater brukeren å synke ned i materialet slik at trykket fordeler seg over en større flate. Mange brukere med muskel- og leddsmerter kan oppleve smertelindring på denne madrassen. Den åpne cellestrukturen i det viskoelastiske skummet minimerer utvikling av varme og fukt, noe som øker komforten betydelig.

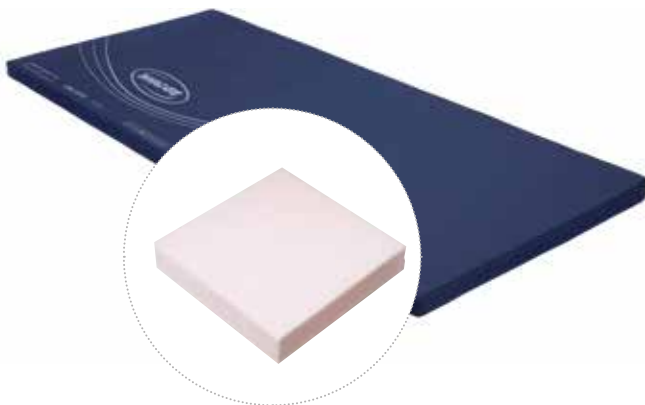


- ▶ 70 mm viskoelastisk skum
- ▶ Tetthet 50 kg/m<sup>3</sup>

---

## Invacare **Dacapo Top Pro**

---

**Dacapo Top Pro** er en trykkfordelende overmadrass av høy kvalitet. Den er skåret i rektangulære firkanter som er større på midten og mindre ut mot hode- og hælområdet. Madrassen former seg etter kroppens konturer, gir god trykkfordeling og omslutter godt områder med benfremspring, som er ekstra utsatt for trykk.

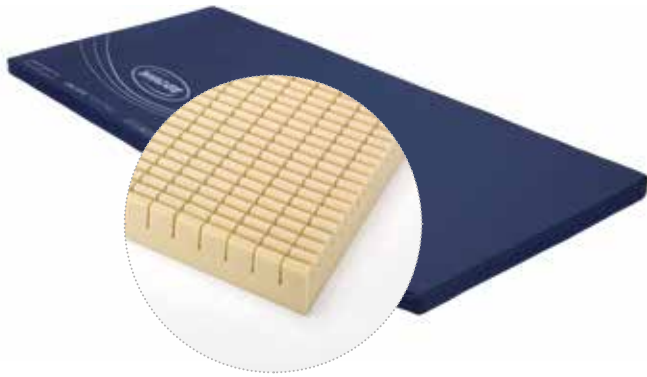

- ▶ 70 mm Høymotstands skum
- ▶ Tetthet 50 kg/m<sup>3</sup>

---

## Tilbehør

---



### **Evakueringstrekk**

Alle **Dacapo**-madrasser kan leveres med evakueringstrekk. Trekkets to stropper holder personen på plass ved evakuering. Madrasstrekket har solide «håndtak» som er kraftige nok til å trekke personen ut av sengen og ut av rommet.

### **Bomullstrekk**

Standard bomull, vaskbart på 40°.

## Tekniske data ▼



	Total vekt ▼	Maks. brukervekt ▼	Høyde ▼	Vask ▼	Tetthet (kg/m3) ▼
Basic	8.5 - 12.5 kg	130 kg	120 mm	95°	38
Heavy User Light	11 - 16.5 kg	250 kg	150 mm	95°	50 (øverst) 38 (midt) 50 (nederst)
Heavy User	12 - 17.5 kg	350 kg	150 mm	95°	50 (øverst) 38 (midt) 50 (nederst)
Comfort	11.5 - 17kg	130 kg	120 mm	95°	50
Comfort Plus	13.5 - 19kg	140 kg	140 mm	95°	50
Child	3 kg	100 kg	80 mm	95°	50
Square	10 - 15 kg	140 kg	140 mm	95°	50 (øverst) 38 (nederst)
Combi	8.5 - 13 kg	140 kg	140 mm	95°	50 (øverst) 38 (nederst)
2Sided	11.5 - 17 kg	130 kg	150 mm	95°	50 (miljøskum m/utskjæring) 50 (visko)
Top	5 - 7.5 kg	130 kg	70 mm	95°	50
Top Pro	4.5 - 5 kg	150 kg	70 mm	95°	50

Europeisk Standard EN 597 -1 og Europeisk Standard EN 597-2 gjelder for alle Dacapo-modeller med polyuretanbelagt trekk.

Art. nr.	Madrasser med inkontinestrek	Madrassmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
1432879	Dacapo Basic	85x200x12	Kaldskum	Standard skummadrass
1432878	Dacapo Basic	90x200x12	Kaldskum	Standard skummadrass
1523939	Dacapo Basic Low	85x200x5	Kaldskum	Standard skummadrass
1421489	Dacapo Combi	85x200x14	Kaldskum og viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass
1421490	Dacapo Combi	90x200x14	Kaldskum og viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass
1514894	Dacapo Comfort	85x200x12	Miljøskum	Standard skummadrass, komfort
1514897	Dacapo Comfort	90x200x12	Miljøskum	Standard skummadrass, komfort
1523859	Dacapo Comfort	85x215x12	Miljøskum	Standard skummadrass, komfort
1523860	Dacapo Comfort	90x215x12	Miljøskum	Standard skummadrass, komfort
1529614	Dacapo Comfort	90x220x12	Miljøskum	Standard skummadrass, komfort
1523121	Dacapo Comfort Plus	85x200x14	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1523122	Dacapo Comfort Plus	90x200x14	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1531497	Dacapo Comfort Plus	85x215x14	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1548735	Dacapo Comfort Plus	85x220x14	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1630929	Dacapo 2sided	80x200x15	Viskoelastisk skum	Vendbar trykkfordelende skummadrass
1630930	Dacapo 2sided	85x200x15	Viskoelastisk skum	Vendbar trykkfordelende skummadrass
1630612	Dacapo 2sided	90x200x15	Viskoelastisk skum	Vendbar trykkfordelende skummadrass
1630613	Dacapo 2sided	90x220x15	Viskoelastisk skum	Vendbar trykkfordelende skummadrass
1432901	Dacapo Square	85x200x14	Kaldskum og miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1432902	Dacapo Square	90x200x14	Kaldskum og miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1484652	Dacapo Heavy User Light	85x200x15	To lag kaldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
1484653	Dacapo Heavy User Light	90x200x15	To lag kaldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
1451307	Dacapo Heavy User Light	90x215x15	To lag kaldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
1543421	Dacapo Heavy User Light	90x220x15	To lag kaldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
1484429	Dacapo Heavy User Light	116x200x15	To lag kaldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
1451259	Dacapo Heavy User*	116x200x15	To lag kaldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 350 kg
1514560	Dacapo Child	60x140x8	Miljøskum	Skummadrass barn
1514561	Dacapo Child	70x160x8	Miljøskum	Skummadrass barn
1514562	Dacapo Child	80x180x8	Miljøskum	Skummadrass barn
1516944	Dacapo Top	80x200x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
1516954	Dacapo Top	85x200x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
1493398	Dacapo Top	85x215x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
1557314	Dacapo Top	85x220x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
1536947	Dacapo Top	90x200x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
1493400	Dacapo Top	90x215x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
1557315	Dacapo Top	90x220x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
1631806	Dacapo Top	90x200x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
1631805	Dacapo Top	85x200x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk

\*Flere størrelser kan bestilles ved forespørsel



# Softform Premier



Trykkfordelende skummadrass





Invacare **Softform Premier** er en antidecubitusmadrass som er utviklet med fokus på trykkfordeling og komfort. Under utformingen av **Softform Premier** er det lagt spesielt vekt på trykkredusering ved hælene. En praktisk og holdbar madrass som tilpasser seg godt sengens innstillinger.



### Forebygging av trykksår

Invacare **Softform Premier** er en todelt madrass som består av et u-formet underlag og en skumkjerne som er skåret i ulike store firkanter for tilpasset trykkfordeling. Den nøkkelhullsformede skjæringen av firkantene gir økt effekt med tanke på reduksjon av skyvkraftene.



**Softform Premier FS**  
(med helsveiset trekk)

### Helsveiset trekk -SRT

**Softform Premier** finnes også i en utgave med helsveiset trekk spesielt utviklet for miljøer som stiller høye krav til kvalitet, som sykehus eller helsehus (**Softform Premier FS**). Trekket er laget av høyresistent polyuretan og sveisede sømmer i stedet for glidelås, som gir en ekstra beskyttelse og minimerer risikoen for at væske skal trenge inn. Trekket kan fåes med Crib5 eller Crib7.


### Leveres med inkontinenstrekk

Trekket er elastisk og fremstilt av vannavstøtende polyuretan. Det har sveisede sømmer, og glidelåsen er dekket med en dryppkant. Trekket beskytter madrassen og forlenger dens levetid.

Standard trekk tilfredsstillers Crib 5 for brannhemming.



## Egenskaper

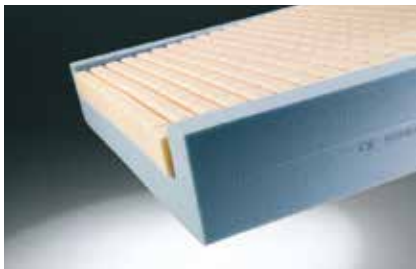


### Formet overflate ved hælene

Skummet i fotenden er formet for å avlaste brukerens hæler, ettersom det her ofte er høy risiko for trykksår.



### Praktiske bærehåndtak

To bærehåndtak gjør madrassen enkel å transportere.

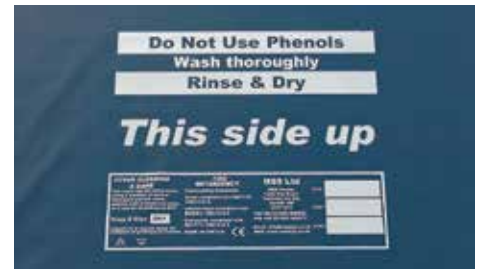

### Trekk og skum er merket med «This side up»

Madrassen krever ikke vending eller rotering. Dette gjør madrassen enkel å håndtere for helsepersonell.

## Tekniske data



**Softform Premier** Bredde: 830, 850, 880, 900 mm



Lengde: 2000 mm



Høyde: 152 mm



Vekt: 13 kg



Maks. brukervekt: 240 kg



Vask: 95°

## Farge



Baltisk blå

### Madrassen oppfyller følgende standarder:

BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match.  
Innvendig skum: BS 5852: 1990 Crib Source 5;  
Trekk: BS7175: 1989 Crib Source 5.

Art. nr.	Skum- og luftmadrass	Madrassmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
1486846	Softform Premier	83x200x15,2	Spesialskum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass
1486915	Softform Premier	88x200x15,2	Spesialskum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass
1486847	Softform Premier	85x200x15,2	Spesialskum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass
1486848	Softform Premier	90x200x15,2	Spesialskum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass



# Softform Premier MaxiGlide




Utviklet for å forebygge forskyvning  
og friksjon





Invacare **Softform Premier MaxiGlide** er en avansert, trykkavlastende skummadrass som gir god støtte. Den patenterte «Glide»-mekanismen sikrer at madrassen følger sengens innstillinger og gir en komfortabel madrass som minimerer forskyvning og friksjon.

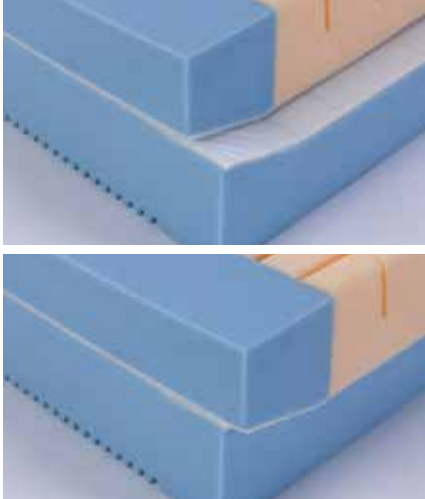

### Trykksårforebyggende «Glide»-mekanisme

Madrassen består av to lag. Dersom liggeflaten justeres, blir det nederste laget liggende mens det andre følger brukeren. Dette gjør madrassen svært komfortabel og minimerer forskyvning og friksjon samt reduserer behovet for reposisjonering av pasient. Det øverste laget har en kjerne som er skåret i dråpeformede firkanter for tilpasset trykkfordeling. Den lar bruker synke godt ned i materialet slik at trykket fordeles over en større flate og er forebyggende og behandlende mot trykksår opp til middels risiko.

### Egenskaper




#### Dryppkant som dekker glidelåsen

For å hindre at væske trekker inn i madrassen.



#### Elastisk, vannavstøtende trekk

Trekket beskytter madrassen og forlenger dens levetid. Oversiden av trekket er pustende og fireveis strekkbart for å redusere skyvkrefter og friksjon. Undersiden av trekket er forsterket for ekstra beskyttelse.

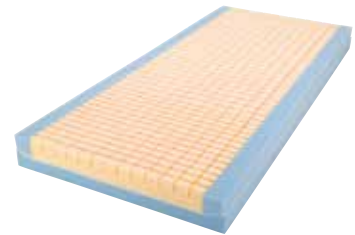

#### Modulbasert

Madrassen har en holdbar modulær overflate som gir effektiv trykkavlastning.

### Tekniske data



Bredde:  
850, 900 mm



Lengde:  
2000 mm



Høyde:  
152 mm



Produktvekt:  
13,5 kg



Maks. brukervekt:  
247,6 kg



Vask: 95°

**Softform  
Premier  
MaxiGlide**

**Art.nr**  
1533984  
1534012

**Madra**  
MaxiGlide  
MaxiGlide

**Madra**  
90x200x14,2  
85x200x14,2

**Material**  
Spesialskum/polyuretan  
Spesialskum/polyuretan

**Produkt**  
Statisk skummadrass  
Statisk skummadrass

### Farge



Baltisk blå

#### Madras

Madras

Trekk: BS 7175 Crib 5


# Softform Premier Spinal



En madrass med dobbel skuminnsats  
spesiellaget for ryggmargsskader





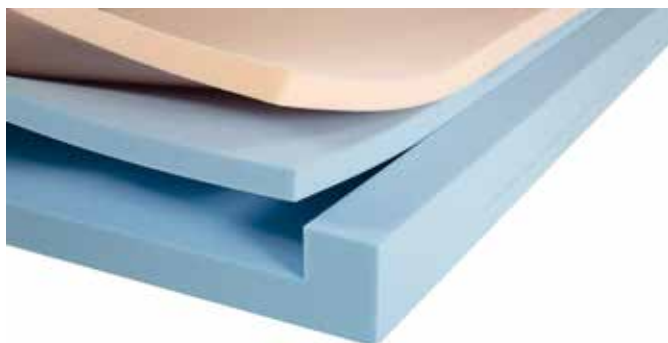

Invacare **Softform Premier Spinal** er en madrass designet spesielt for de med ryggmargsskader. Madrassen passer for dem med middels høy risiko for å utvikle trykksår. Invacare **Softform Premier Spinal** gir ekstra støtte for å dekke et bredt spekter av komfort- og justeringskrav ved ryggmargsskader. Den unike doble skuminnsetsen gir et mykere og mer komfortabelt underlag og større trykkfordeling, noe som er viktig i rehabiliteringsprosessen.



**Komfort-underlag**



**Fast underlag**

## Stabil støtteflate

Grad av skade og smerte i rygg varierer og er individuelt for hver pasient. **Softform Premier Spinal** tilbyr to ulike skuminnsetser, som gir mulighet for en skreddersydd løsning uten å måtte bytte madrass. Skummet kan raskt og enkelt byttes ved sengen, og reduserer dermed ventetiden for pasienten og behovet for langvarig forflytning. Det spesialproduserte skummet ligger parallelt med sidestøttene, og fremmer effektiv pleie, håndtering og transport uten å påvirke liggestilling og trykkfordeling.

Invacare **Softform Premier Spinal** sin unike løsning med to ulike skuminnsetser gir valget mellom to stabile støtteflater med god komfort. Valget av skuminnsetser er individuelt for hver pasient, og trykkfordeling og reduksjon av shear er ivarett uansett hvilken man velger. Madrassens utforming samsvarer godt med rammen på elektriske senger. **Softform Premier Spinal** er praktisk og holdbar, og vil med sine gode trykkfordelende egenskaper være en god bidragsyter i rehabiliteringsprosessen.

## Valg av madrass for riktig støtte


Overflaten er for myk



Overflaten er for hard



**Riktig støtte og rett ryggrad**

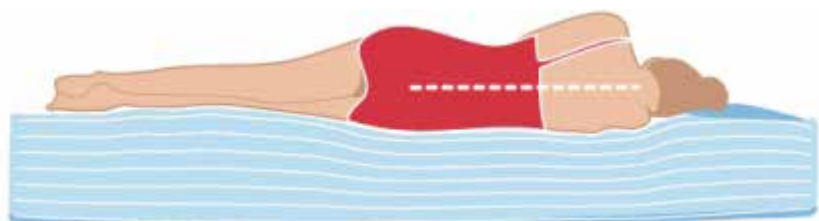

## Egenskaper




### Smittevern

En tynn platilon-film integrert i **Softform Premier Spinal** omgir det indre skummet og er med på å hindre væske fra å trenge igjennom. Dette gir en ekstra sikkerhet og beskyttelse mot infeksjon.

I kombinasjon med **SRT**-trekket, gir dette en dobbel beskyttelse og sikkerhet mot forurensning av madrassen.

**SRT** er et væskeavstøtende trekk, unikt for Invacare. Trekket er utviklet på en slik måte at det skal kunne tåle omfattende, men viktige rengjøringsprosesser i helsevesenet. **SRT**-trekket gir madrassen lenger holdbarhet.

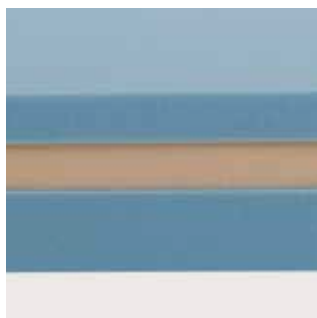


#### Den unike doble skuminnnsatsen gir valget mellom to ulike underlag

Den blå skuminnnsatsen gir en fastere overflate for ytterligere stabilitet. Når den oransje skuminnnsatsen plasseres øverst vil pasienten synke ned i madrassen for økt komfort og trykkavlastning.




#### Krever ikke snuing eller rotering

Madrassen krever ikke snuing eller rotering, og minimerer problemer med manuell håndtering.

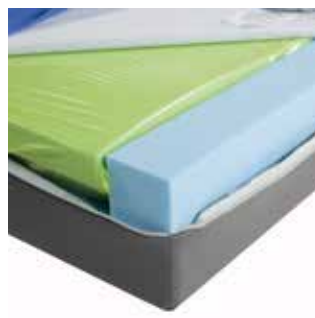

#### U-formet skumbase

Forenkler forflytning med effektiv sidestøtte. En robust skumbase som hindrer madrassen i å bunne ut.

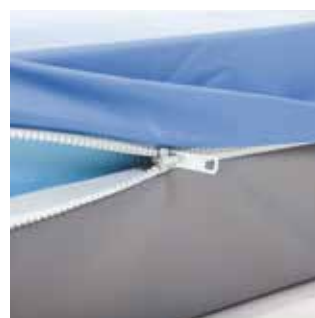







#### Klaff som skjuler glidelåsen

En klaff beskytter glidelåsen langs hele lengden. Dette reduserer faren for væskeinntrenging og forurensning av skumkjernen.

Multi stretch, pustende og vanntett materiale med sveisede hjørner hindrer ansamling av støv og væskerester.



## Tekniske data

						
<b>Enkel</b>	660-900mm Dobbelmadrass kan leveres ved forespørsel	1250-2100mm	152 mm	14 kg	Max. Bruklervekt: 247.6 kg	Vask: 95°

Produsert i henhold til Europeisk standard: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match.  
Foam Interior: BS 5852: 1990 Crib Source 5; Cover BS7175: 1989 Crib Source 5.  
Composite tested to BS 7177 Crib 5.

## Farge



Blå



Artikkelnummer fås ved forespørsel.

# Softform<sup>®</sup> Bariatri



Eksepsjonell trykkfordeling for  
tyngre brukere





**Softform Bariatri** gir en høy grad av komfort for brukeren samtidig som den gir effektiv trykkfordeling. Egnet for bruk på alle typer senger, og innfrir behov som ikke kan møtes med standardprodukter. Madrassen er designet for tyngre brukere med middels høy risiko for å utvikle trykksår.

### Utfordringene med overvektige pasienter

Overvektige pasienter (BMI>40, WHO 2000) har en økt risiko for å utvikle trykksår. På grunn av økt vaskularisering og vev hos overvektige personer er sårhelingen forlenget, og forebyggende tiltak mot trykksår avgjørende. Madrassen er spesielt utviklet for å møte behovene til tyngre pasienter og de utfordringer pleiere møter i omsorgen av disse pasientene.

### Unikt «Glide»-system

Det patenterte «Glide»-systemet og den delte ryggseksjonen på madrassen gjør at den enkelt tilpasser seg sengen. Dette reduserer uønskede og upassende bevegelser hos pasienten som kan bidra til skade på vevet som følge av shear og friksjon. Dette vil også redusere behovet for unødig forflytning, noe som er en vanskelig oppgave for denne gruppen av pasienter.




### Funksjoner og egenskaper



#### Ekstra beskyttelse og komfort

Multi stretch, pustende og vanntett materiale med sveisede hjørner hindrer ansamling av støv og væskerester.

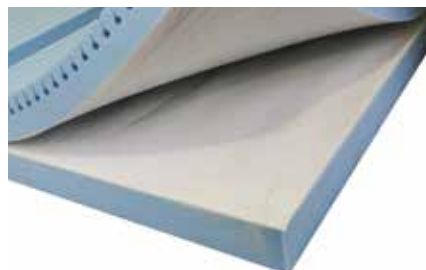

#### Ekstra beskyttelse

Sveisede og vanntette sømmer beskytter madrassens kjerne fra forurensing. Basen er laget av et herdet PU-belagt materiale som er utformet for å forlenge levetiden til madrassen. Stoffet tillater huden å puste og reduserer skade på huden forårsaket av svette, noe som kan være et vanlig problem for overvektige pasienter.



Rillene i skummet fordeler trykk og minimerer faren for trykksår for pasienter med begrensede bevegelsesmuligheter. Mange overvektige pasienter har problemer med å ligge helt flatt grunnet pusteproblemer, og **Softform Bariatri** er derfor kuttet dypere ved overgangen til ryggdelen slik at den følger liggeflatens bevegelser ved hev og senk av sengens ryggdel.

### Tekniske data



1150 - 1200 mm



Lengde:  
2000 mm



Høyde:  
152 mm



Vekt:  
15 kg



Maks. brukervekt:  
340 kg



Vask: 95°



Bariatrisk bruk

### Farge



Blå

Artikkelnummer fås ved forespørsel.



# Invacare® **Softform® Premier** **Active 2 RX**



Statisk og dynamisk trykkfordelende  
skummadrass

ENKEL OG TRYGG I BRUK | DIGITAL PUMPE | MODULÆR OPPBYGNING



Invacare® **Softform Active® 2 RX** er en hybridmadrass som har et innlagt vekseltrykk mellom et lag profilert- og et lag stabiliserende høykvalitetsskum. Madrassen brukes med eller uten aktivering av vekseltrykk. Uten vekseltrykk aktivert, beholder den posisjon som en statisk skummadrass for pasienter med middels risiko for trykksår. Dersom bruker har behov for en dynamisk madrass, kan man enkelt koble til pumpen, som gir madrassen en overflate med vekslende trykk. Dette kan gjøres uten å flytte brukeren, slik at pasientens komfort ivaretas.



### Statisk overflate

Spesialskummet tilbyr en komfortabel og effektiv trykkfordelende overflate for pasienter med middels risiko for utvikling av trykksår, samt for de med skader i huden. Skummet er soneinndelt i ulike firkanter, for tilpasset trykkfordeling. Dette gir madrassen helt spesielle mikroklimatiske og trykkfordelende egenskaper.

### Dynamisk overflate

Pumpen aktiveres enkelt og gir brukeren ytterligere terapeutisk behandling via de bueformede luftcellene som ligger mellom de to skumlagen. Luftcellene veksler i sykluser på 10 minutter og gir trykkavlastning under vekslingen.

### Hybridteknologi

Kombinasjonen av spesialskum og de spesialdesignede bueformede luftcellene, gir en komfortabel overflate som øker trykkfordelingen og egner seg til de fleste pasientgrupper. Hybrid-terapi er egnet for de aller fleste behov, fra intakt hud til alvorlige trykksår. Ved aktivering eller deaktivering av RX-pumpen, kan type behandling tilpasses raskt etter individuelle behov og ønske om komfort, uten å måtte flytte brukeren.

### Egenskaper



#### Luftceller

Invacares bueformede luftceller vinkler ergonomisk pasientens konturer og sørger for god støtte under hele kroppen og gir en optimal vekslende trykkfordeling.



#### Tildekket slange

Slangen har et trekk rundt seg av sikkerhets- og hygienehensyn.



#### Kabelhåndteringssystem

Et enkelt knappesystem langs kanten av madrassen sikrer at strømkabelen er trygt sikret mens madrassen er i bruk.

## Egenskaper



### «Plug 'n' play» Digital pumpe

Koble til, slå på, og pumpen er klar til bruk! Pumpen er stille i bruk og vil ikke forstyrre pasientens søvn.




### Modulær konstruksjon

Madrassen er konstruert slik at det er enkelt å skifte ut de ulike bestanddelene.



### Innovativ glidemekanisme

Shear-krefter er en av hovedårsakene til utvikling av trykksår (EPUAP Clinical Practice Guidelines, 2014). **Softform Premier Active 2 RX** tilbyr en innovativ glidemekanisme, som signifikant reduserer shear-kreftene ved bruk i en profilert seng.

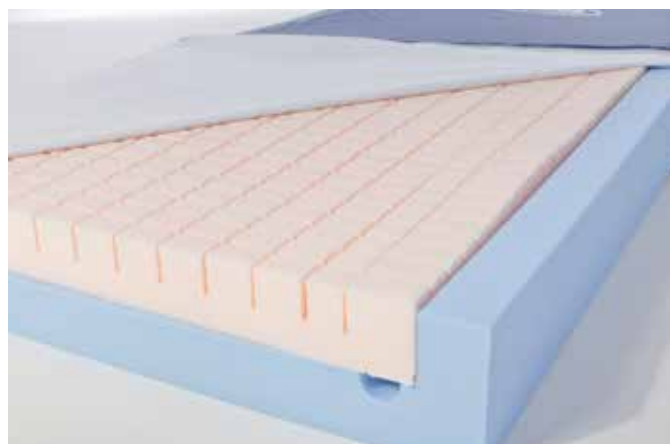

### Spesialsikum

Dersom det skulle oppstå strøbrudd, kan brukeren forbli liggende godt og trygt på madrassens spesialsikum, uten behov for akutt hjelp eller forflytning.

### En komplett løsning

**Softform Premier Active 2 RX** kombinerer trykkfordelende kvaliteter fra det oppskårede og sone-inndelte spesialsikummet, samt fra luftcellene i midten av madrassen. Luftcellene aktiveres etter eget ønske og behov for ytterligere terapi. Dette sikrer at brukeren alltid har god støtte og trykkfordelende egenskaper i madrassen.





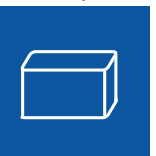


For å bekjempe kostbare og tidkrevende problemer som oppstår ved skadede madrassstrekk har Invacare utviklet et «gjennomtrengningsbestandig» trekk (SRT). Dette spesialtrekket er utviklet for å kunne møte rengjøringsregimene som er påkrevd i et helsemiljø. For mer informasjon om SRT, se [www.thinkpressurecare.co.uk/clinical-papers/strikethrough-resistant-clinical-articles/](http://www.thinkpressurecare.co.uk/clinical-papers/strikethrough-resistant-clinical-articles/)



## Tekniske data

	Bredde	Lengde	Høyde	Vekt	Maks brukervekt	Vask	Farge
<b>Softform Premier Active 2 Madrass</b>	 830 - 900 mm	 1810 - 2100 mm	 152 mm	 14 kg	 247,6 kg	 80°	 Baltisk blå
Flere størrelser kan produseres ved forespørsel							

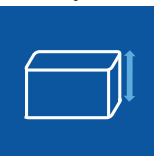	Bredde	Lengde	Høyde	Vekt	Pumpe	
<b>Active 2 RX pumpe</b>	 105 mm	 275 mm	 155 mm	 1,75 kg	 Støynivå = 24 dB	<b>Produsert i henhold til:</b> European Standard: BS EN 597-1 Cig European Standard: BS EN 597-2 Match BS7177:1996 Crib 5.

- Oppskåret, soneinndelt spesialsukum i madrassens overflate
- Aktiv luftcelle-behandling ved behov
- Klinisk bevist at madrassen passer til alle kategorier av trykksår
- Gjennomtrengningsbestandig (SRT) madrassstrekk
- Egnet for høyrisikopasienter
- Trekk med brannhemmende egenskaper, velg mellom: Crib 5 eller Crib 7
- Maksimal brukervekt 247,6 kg

## Artikkeloversikt

Artikkelnummer	Hybrid madrass - Luft og Skum	Madrass mål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
1630033	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	83x200x15,2	Spesialsukum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk med pumpe
1630034	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	85x200x15,2	Spesialsukum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk med pumpe
1630035	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	88x200x15,2	Spesialsukum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk med pumpe
1630036	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	90x200x15,2	Spesialsukum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk med pumpe
1629800	Pumpe Softform Premier active 2 RX			

**For mer informasjon og kliniske studier, besøk gjerne:**  
[www.thinkpressurecare.co.uk](http://www.thinkpressurecare.co.uk)

**For mer informasjon og brukermanual: [www.invacare.no](http://www.invacare.no)**


Selv den aller beste madrassen kan ikke alene forhindre eller helbrede trykksår, den skal alltid inngå i en komplett pleieplan.

# Vicair<sup>®</sup> Academy Madrass



Effektiv trykkfordeling og minimering av skyvkrefter



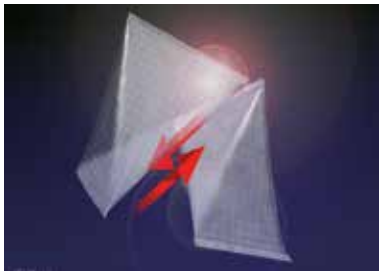

**Vicair Academy madrass** gir fremragende trykkfordeling og støtte til brukere med høy risiko for å få trykksår uten bruk av elektrisk utstyr.


Madrassen består av flere hundre trekantede lavfriksjons-luftceller, **SmartCells™**, som gjør at madrassen former seg etter kroppens konturer og bevegelser. Konseptet tilbyr en optimal kombinasjon av trykkfordeling, støtte og stabilitet, samtidig som skyv- og friksjonskreftene effektivt minimeres.

### Unikt design

**Vicair Academy-madrassen** benytter seg av **Vicair Technology™**, en unik og innovativ metode som gir en fleksibel liggeflate og god støtte til kroppen. **Vicair Academy** består av 36 bøtteformede kamre fylt med **SmartCells™**. Disse trekantede cellene har en lavfriksjonsoverflate som glir lett mot hverandre slik at madrassen former seg etter kroppens konturer. De bøtteformede kamrene som SmartCellene ligger i er forskyvelige seg i mellom, slik at skyvkreftene minimeres.

### Effektiv trykkfordeling

Den enkelte **SmartCell** sin evne til forskyvning og individuell tilpasning tillater kroppen å synke ned i madrassen, og gir svært effektiv trykkfordeling. Madrassen er i tillegg meget komfortabel og stabil å ligge på. **Vicair Technology** gjør at det er mulig selv for brukere med alvorlige deformiteter å synke ned i madrassen og oppnå optimal komfort, støtte og trykkfordeling.

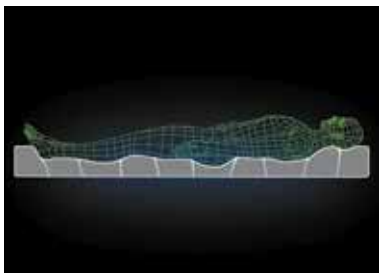

## Egenskaper



### Trekk

**Vicair Academy madrassen** leveres med et løst to-lags inkontinestrekk, som både tillater at brukeren synker ned i madrassen og minimerer skyv- og friksjonskreftene.



### Fleksibel innstilling

**Vicair Academy madrassen** følger sengens innstillinger.



### Bøtteformede kamre

De 36 kamrene er plassert på en bunn av skum. Kamrene er formet slik at de gir en stor overflate for kroppen å synke ned i og dermed god understøttelse for hele kroppen.

## Tekniske data



850-1200 mm



2000-2150 mm



140 mm



8 / 9 kg



Maks. 250 kg



95°

**Vicair Academy Madrass**

Trekket kan vaskes ved 95°.  
Se vaskeanvisning i bruksanvisning.

## Farge



Blå

Art. nr.	Madrass, statisk luft	Madrassmål	Materiale	Produktbeskrivelse
ARM415/LF/68140	Madrass Vicair Academy	60x140x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/70140	Madrass Vicair Academy	70x140x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/85200	Madrass Vicair Academy	85x200x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/85215	Madrass Vicair Academy	85x215x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/90200	Madrass Vicair Academy	90x200x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/90215	Madrass Vicair Academy	90x215x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/105200	Madrass Vicair Academy	105x200x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/105215	Madrass Vicair Academy	105x215x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/120200	Madrass Vicair Academy	120x200x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/120215	Madrass Vicair Academy	120x215x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft

# SoftCloud™

Vekseltrykkmadrasser



ALLSIDIG | INTUITIVT DESIGN | KOMFORT



# Invacare SoftCloud-serien

---

Vekseltrykk-teknologi anbefales for å oppnå forebygging og håndtering av trykksår døgnet rundt, kombinert med individuell overvåkning, reposisjonering og sårpleieprogram.

Helsepersonell møter ofte situasjoner hvor pasienten ikke selv er i stand til reposisjonering. Under disse omstendighetene anbefaler EPUAP å bruke et aktivt støtteprogram som en del av trykksårforebyggingen.

Invacare **SoftCloud** madrasser og overmadrasser består av aktive støtteflater av høy kvalitet, designet for pasienter med svært høy risiko for å utvikle trykksår. Det vekslende trykket er designet for å omfordele trykk flere ganger hver time, selv om pasienten ikke beveger seg.



---

"Bruk en aktiv støtteoverflate (overmadrass eller madrass) for personer med høy risiko for trykksår når hyppig manuell reposisjonering ikke er mulig" (EPUAP,2014)

---



**NYE**

**EGENSKAPER**

**1**

### Intuitivt design

- ▶ En moderne og intuitiv kontrollenhet



**2**

### Automatisk justering

- ▶ Sørger for klinisk riktig støtte for å sikre pasientens komfort







3

### Maks. fast-knapp

- ▶ Gir en fast overflate for enklere sengetøyskift og reposisjonering av pasient.



#### ▶ Håndtak

For enkel madrasshåndtering og transport.

#### ▶ Sikkerhetsremmer

Tillater sengen å være løst festet til madrassen samtidig som tilgangen til HLR-sikringen er fri.

#### ▶ Trekk med glidelås

360-graders glidelås på toppen av trekket forenkler fullstendig fjerning av trekket ved vask.

#### ▶ Hengslet rygg

Madrassen er konstruert for å hindre at luftcellene glir ned når hjertebrettet heves, og for å motvirke friksjon (gjelder kun SoftCloud Pro).

#### ▶ Permanent avlasting av hælen

De fem hælcellene på SoftCloud Pro tillater permanent avlasting av pasientens hæl. Denne funksjonen er ideell for de fleste pasienter med eksisterende hælssår.

#### ▶ Kabelstyringsystem

Ingen etterfølgende strømkabler.

#### ▶ Stropp

Dersom det oppstår en situasjon hvor det er behov for HLR, skal man dra i den gule stroppen merket CPR. Madrassen tømmes da umiddelbart for luft i bryst- og hodedelen.

#### ▶ Transportmodus

En transportklemme kan festes på slangen under transport, for å sikre at luften holder seg i madrassen når den er frakoblet pumpen.



# SoftCloud-serien

Serien består av fire alternativer, som alle er enkle i bruk:



## SoftCloud Top

- ▶ Overmadrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 12 minutter
- ▶ 1 av 2 Syklus
- ▶ Dampgjennomtrengelig trekk med sveisede sømmer
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden
- ▶ Egen hældel for sensitive hæler

## SoftCloud Air

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 12 minutter
- ▶ 1 av 2 Syklus
- ▶ Dampgjennomtrengelig trekk med sveisede sømmer
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

## SoftCloud Ace

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 10 minutter
- ▶ 1 av 3 Syklus
- ▶ Dampgjennomtrengelig trekk med sveisede sømmer
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

## SoftCloud Pro

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 10 minutter
- ▶ 1 av 3 Syklus
- ▶ Permanent oppblåste luftvegger gir fast sidestøtte med en stabil forflytningsplattform
- ▶ Dampgjennomtrengelig trekk med sveisede sømmer
- ▶ Egen hældel for sensitive hæler
- ▶ Disse kan også kobles helt fra ved behov for enda mer avlastning.
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

## Intuitive kontrollenheter

Kontrollenhetene til **SoftCloud** har et intuitivt display som kan brukes til å justere komfortnivåer ved å gi enten en 1 av 2 eller 1 av 3 vekslende trykkmodus sammen med et statisk alternativ.

Videre tillater en automatisk detekteringsfunksjon i kontrollenheten å automatisk registrere trykk fra kroppen, og justerer trykknivået deretter. Kontrollenhetene har både visuelle alarmer og lydalarmer som aktiveres ved lavt trykk eller strømbrudd. Det er også mulig å skru av alarmene ved rengjøring.



## Tekniske data ▼


For mer informasjon om produktet samt produktets brukermanual, se [www.invacare.no](http://www.invacare.no)



Bredde ▼



Lengde ▼

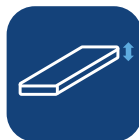

Høyde ▼



Maks. brukervekt ▼

	Bredde ▼	Lengde ▼	Høyde ▼	Maks. brukervekt ▼
<b>SoftCloud Top</b>	83-88 cm	200 cm	13 cm	200 kg
<b>SoftCloud Air</b>	83-88 cm	200 cm	18 cm	200 kg
<b>SoftCloud Ace</b>	83-88 /103-116 cm	200 cm	20 cm	220 kg/ 350 kg
<b>SoftCloud Pro</b>	83-88 cm	200 cm	20 cm	220 kg



Dybde ▼



Bredde ▼



Høyde ▼

	Dybde ▼	Bredde ▼	Høyde ▼	Art.nr	Madras, dymanisk luft	Madrassmål
<b>Kontrollenhet 1</b>	12 cm	25 cm	24 cm	1630815	SoftCloud Top, Overmadras inkl.pumpe	88x200x13
<b>Kontrollenhet 2</b>	12 cm	29 cm	25 cm	1630814	SoftCloud Top, Overmadras inkl.pumpe	83x200x13
				1630823	SoftCloud Pro, madras inkl.pumpe	88x200x20
				1630823+1421564	SoftCloud Pro m/pumpe + forlengerkloss	88x210x20
				1630822	SoftCloud Pro, madras inkl.pumpe	83x200x20
				1630822+1487853	SoftCloud Pro m/pumpe + forlengerkloss	83x210x20
				1630817	SoftCloud Air, madras inkl.pumpe	88x200x18
				1630816	SoftCloud Air, madras inkl.pumpe	83x200x18
				1630819	SoftCloud Ace, madras inkl.pumpe	88x200x20
				1630818	SoftCloud Ace, madras inkl.pumpe	83x200x20
				1630820	SoftCloud Ace, madras inkl.pumpe	103x200x20
				1630821	SoftCloud Ace XL, madras inkl.pumpe	116x200x20

## Farge ▼



Mørk blå

Fargen kan variere litt fra fargen vist ovenfor.

## Regulatoriske data ▼

### Madrasen er produsert i henhold til:

European Standard: BS EN 597-1 Cig  
European Standard: BS EN 597-2 Match  
BS7177:1996 Crib 5.

### Kontrollenhet

Lydnivå: ≤ 30 dB

## Annen informasjon ▼

Denne madrassen vil bidra positivt i en komplett pleieplan for trykksårforebyggende omsorg.



# Carebed Overmadrass



Trykkfordeling basert på statisk luft



**Carebed** gir effektiv trykkfordeling både ved forebygging og behandling av trykksår. **Carebed** kan brukes til pasienter med middels risiko for å utvikle trykksår.



Madrasen har individuell tilpasning, og er svært enkel i bruk, noe som sikrer en korrekt og enkel håndtering for pleiepersonalet. **Carebed** følger sengens innstillinger og er meget stabil og komfortabel.

### Trykkfordeling med statisk luft


Det er mange faktorer som må tas i betraktning når det gjelder utvikling av trykksår. En av de avgjørende faktorene er mottrykket underlaget gir mot kroppen over tid. Vanlige madrasser gir ofte et for høyt mottrykk. Ved immobilitet kan dette føre til at blodtilførselen stopper opp på utsatte steder, slik at vevet dør og trykksår oppstår. For å forebygge trykksår, må mottrykket reduseres.



### Optimal funksjon

**Carebed** består av mer enn 300 separate celler fylt med luft. Luften transporteres og fordeles mellom cellene, og tilpasser seg pasientens form og vekt. Madrasen er meget enkel i bruk. Luft pumpes inn mens pasienten ligger på madrassen. Etter ca. ett minutt vil det være korrekt luftmengde i madrassen og ventilen lukker seg. Det er derfor umulig å fylle for mye luft i madrassen. **Carebed** er en anerkjent og innarbeidet madrass med gode kliniske resultater.

## Produktegenskaper

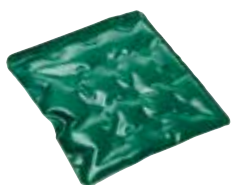

### Caresit

Konseptet med luftceller finnes også i seteputen Caresit. Kan f. eks. brukes i rullestol og i bil.



### Pumpe

Den elektriske pumpen sørger for at madrassen fylles med rett mengde luft.



### Vedlikeholdspumpe

Pumpen etterfyller madrassen automatisk (tilgjengelig som tilbehør).



### Andre anvendelsesområder

Konseptet brukes også til barne- og operasjonsmadrasser.

**Carebed** reduserer mottrykket ved at den lar pasienten synke godt ned i madrassen. Trykket fordeles over en større flate og blodtilførselen opprettholdes.

## Tekniske data



Maks. brukervekt:

	900 mm	1900 mm	100 mm	3,8 kg	150 kg
<b>Størrelse Std</b>	900 mm	1900 mm	100 mm	3,8 kg	150 kg
<b>Operasjonsmadrass</b>	480 mm	1030/1700/2000 mm	100 mm	1,3 - 2,3 kg	150 kg
<b>Barnemadrass</b>	700 mm	1600 mm	100 mm		150 kg
<b>Pumpe</b>				1,6 kg	150 kg
<b>Caresit</b>	4 størrelser, fra 400 - 450 mm	4 størrelser, fra 400 - 500 mm	60 mm	0,3 - 0,8 kg	150 kg

Art. nr.	Overmadrass, statisk luft	Madrassemål cm	Produktbeskrivelse
652MFE	Carebed	90 x 200 x 10	Overmadrass, statisk luft
653MFE	Carebed	90 x 210 x 10	Overmadrass, statisk luft
654MFE	Carebed	90 x 215 x 10	Overmadrass, statisk luft
656MFE	Carebed	85 x 200 x 10	Overmadrass, statisk luft
671MFE	Carebed	70 x 160 x 10	Overmadrass, statisk luft
700MFE	Pumpe Carebed		
1495934	Vedlikeholdspumpe Carebed		
502MFE	Kork		
501MFE	Ventilinnsett		



# Soft Tilt™ 2.0



Innovativt vendesystem – verdifull støtte ved forflytning og posisjonering





Invacare **Soft Tilt 2.0** er et unikt, innovativt vendesystem utviklet for automatisk vending og reposisjonering av bruker, samt for å hjelpe pleiepersonalet ved daglig stell av bruker.

**Soft Tilt 2.0** er enkel å montere på sengene **SB755**, **NordBed** og **Etude Plus**. Den beveger seg smidig sammen med sengens bevegelige deler og madrassen.

- ▶ Automatisert trykkavlastning som forebygger trykksår
- ▶ Forenkler pleiarbeidet, ideelt for pleiere som jobber alene
- ▶ Økt komfort for bruker og pleier



## Automatisert og manuell trykkavlastning og forflytning

**Soft Tilt 2.0** består av to vinger som monteres langs pleiesengens liggeflate. Hevingen av vingene gjøres enten manuelt ved bruk av håndkontroll eller et automatisert program. Ved behov for automatisert og kontinuerlig trykkavlastning brukes en programmerbar kontrollboks. **Soft Tilt 2.0** kan programmeres til å automatisk heve pasienten i ulike intervaller og vinkler.

### Forenkler pleiarbeidet

**Soft Tilt 2.0** kan betjenes av én pleier alene. Ved hjelp av håndkontrollen kan vingene heves opptil 80°. Dette gjør det enkelt å komme til med forflytningshjelpemidler, sette på seil eller slynge, og utføre personlig pleie.

**Soft Tilt 2.0** kan også brukes til å gi støtte ved inn- og utstigning av sengen. Dette beskytter pleieren mot potensielle belastningsskader i ryggen.

### Komfort og sansestimulering

**Soft Tilt 2.0** har utomatiserte bevegelser som er svært stille og smidige. Bevegelsene er sansestimulerende og gir en beroligende effekt. Dette gjør at **Soft Tilt 2.0** bidrar til en behagelig og uforstyrret søvn. Ved automatisk innstilling kan vingene heves til maks. 40°, slik at brukerens sikkerhet og komfort ivaretas.



## Egenskaper og tilbehør




### ◀ Komfortabel, automatisert trykkfordeling

Når **Soft Tilt 2.0** er innstilt på et automatisert program, skjer endringen i posisjon på en måte som gir god støtte og komfort: før den første vingen heves til ønsket posisjon (maks. 40°), heves vingen på motsatt side en anelse. Når ønsket posisjon er oppnådd, går denne vingen tilbake til horisontal posisjon.

### ▲ Følger liggeflatens bevegelser

**Soft Tilt 2.0** er enkel å montere og følger liggeflatens bevegelse på en svært smidig måte. Dette sikrer god posisjonering av brukeren og gir verdifull hjelp i forbindelse med forflytning.

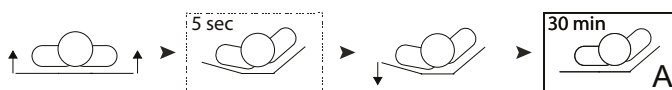

### ◀ Programmerbar kontrollboks

Kontrollboksen leveres med ett forhåndsprogrammert auto-program. I tillegg kan man lage to individuelt tilpassede programmer. De lagrede programmene kan aktiveres med kun ett tastetrykk.

### ▲ Manuell betjening

Når **Soft Tilt 2.0** styres manuelt ved bruk av håndkontrollen, kan vingene heves opp til 80°. Dette gir mulighet for enklere håndtering av bruker, for eksempel i forbindelse med pleie og ved bruk av forflytningshjelpemidler.



### ▲ Sansestimulering

**Soft Tilt 2.0** kan programmeres til å vende liggeflaten rolig fra side til side mens begge vingene er hevet. Denne "vugge"-funksjonen kan virke beroligende.

### ▲ Enkel håndkontroll

Den brukervennlige håndkontrollen gjør det enkelt å styre **Soft Tilt 2.0** manuelt.

### ▲ Trekk

Blått trekk med elastiske stropper som sikrer at madrassen holdes på plass. Kan maskinvaskes på 80°.

# Soft Tilt 2.0 - kompatibel med Invacare-senger



► Invacare® **SB 755**



**NordBed-familien:**

- Invacare® **NordBed Optimo,**
- Invacare® **NordBed Ultra**



► Invacare® **Etude Plus**

## Tekniske data ▼

Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.



Maks. vinkel i manuell modus ▼



Maks. vinkel i automatisert modus ▼



Tidsintervall i automatisert modus ▼



Maks. brukervekt ▼



Tyngste enkelt del ▼



Vask av trekk ▼

**Soft Tilt**

80°

40°

0-180 minutter

116-165 kg\*  
SWL 145-185 kg\*

18 kg

80°

Samsvarer med IEC 60601-2-52

\* Maks. brukervekt avhenger av hvilken seng Soft Tilt 2.0 brukes sammen med. Se brukermanualen til Soft Tilt 2.0 for mer informasjon.

## Stål-farge ▼



Hvit

**NB:** Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år eller pasienter med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

**Soft Tilt 2.0** er produsert av GDV Technology på vegne av Invacare.

Produkt	Art. nr.
---------	----------

<b>SOFT TILT 2.0 NORDBED</b>	1651469
------------------------------	---------

<b>SOFT TILT 2.0 SB755</b>	1651473
----------------------------	---------

# Softform Heelpad



Trykkfordelende Heelpad



Invacare **Softform Heelpad** er utviklet for å redusere trykk på hælområdet. Geléen i puten gir trykkreduksjon og sørger for jevn vektfordeling. Trykket mot hælområdet er minimalt ved bruk av **Softform Heelpad**.



### Utviklet for å minimere trykk på hælområdet

Invacare **Softform Heelpad** gir betydelig trykkreduksjon og komfort til pasienter med såre hæler.

### Egenskaper og tilbehør



#### Enkel og dobbel

**Heelpad** kommer i både enkelt og dobbelt format for å kunne møte spesifikke krav hos pasienten.



#### Leveres med tre platilon-trekk

Trekkene bidrar til å holde heelpaden ren.

### Tekniske data



#### Softform Heelpad

Bredde: 62 cm  
(620 mm)



Lengde: 48 cm  
(480 mm)



Høyde: 5 cm, 3.2 cm  
(50 mm, 32 mm)



Vekt:  
3.58 kg



Vask: 80°

Produsert i henhold til Europeisk standard:  
Innvendig skum: BS 5852: 1982 Crib 5, BSEN 597-1,2  
Trekk: BS 7175: 1989 Crib 5

#### Art.nr

HP50  
HP100

#### Produkt

HeelPad  
HeelPad

#### Størrelse

Enkel  
Dobbel

#### Materiale

Gelé  
Gelé

### Farge



Fuchsia



# *Softform Flexipad*



Støtteputer med mange  
bruksmuligheter





Invacare **Flexipads** er svært fleksible støtteputer som er fylt med silikongelé. De kan brukes til å posisjonere og understøtte lemmer, ledd, overkropp eller hodet.



### Forenkler posisjonering

Invacare **Flexipads** kan anvendes til å posisjonere lemmer for behandling, etterbehandling etter en skade, eller for å hjelpe til med å opprettholde en mer behagelig stilling samt lindre smerter.

### Gir ekstra støtte

Enkel å anvende samt tilpasse ulike posisjoner.

**Flexipads** kan gi supplerende støtte for pasienter som opplever problemer med å opprettholde posisjon.

## Egenskaper og muligheter



### Single Flexipad

Enkel gelépose på den ene siden og skum på den andre. Utstyrt med en stropp for enkelt å kunne feste den til stoler. Invacare **Flexipad** øker overflateareal i henhold til albuer, arm eller rygg.



### Double Flexipad

To geléposer innpakket i viskoelastisk skum. Meget allsidig, og gir god støtte for områder med benfremspring.



### Flexipad Ultra

To geléposer innpakket i skum med høy tetthet. Lett og fleksibel, tilgjengelig med eller uten stropper.

## Tekniske data



**Softform Flexipad**

Bredde: 220 mm



Lengde: 330 mm



Høyde: 50 mm, 32 mm



Vekt: 0.8 kg



Vask: 80°

**Garanti 1 år**

Art.nr	Produkt	Størrelse	Materiale
FGP50	Flexipad	Single, inkl. trekk	Silikongelé
FGP75 FGP75/S	Flexipad Flexipad	Ultra inkl. trekk Ultra inkl. trekk og stropp	Silikongelé Silikongelé
FGP100	Flexipad	Double inkl. trekk	Silikongelé

## Farge



Blå



Sort

Produsert i henhold til Europeisk standard:  
Cover: BS 7175: 1989 (Crib 5)

# Maxxcare® Heel Pro Evolution hælavlaster



Komfort og trykkavlastning





**Maxxcare Heel Pro Evolution hælavlaster** gir utmerket komfort for pasienter med høy risiko for å utvikle trykksår. Hælavlasteren kan også brukes som ekstra hjelpemiddel til pasienter som har utviklet trykksår på hæl og/eller ankel. Kan vaskes på 60 grader.

### Maxxcare-teknologi

**Heel Pro Evolution** bruker den unike *Vicair*<sup>®</sup>-teknologien. Luftcellene gir komfort, stabilitet og beskyttelse mot trykk- og skyvkrefter.

**Maxxcare Heel Pro Evolution** består av et slitesterkt lavfriksjonsmateriale på utsiden og et mykt materiale på innsiden. Materialet minimerer også at skyvkrefter oppstår. Den gode passformen gjør at den sitter godt rundt foten. Hælavlasteren kan brukes liggende, sittende og gående.

Utstyrt med to store borrelåsbånd som er enkle å feste og åpne.


### Perfekt form og trykkavlastning

**Maxxcare Heel Pro Evolution** er egnet til forebygging for pasienter med risiko for å utvikle trykksår og som et ekstra hjelpemiddel for pasienter med eksisterende trykksår på hæl og/eller ankel.

Hælavlasteren reduserer smerte under lengre perioder med sengeleie og kan bidra til å forhindre droppfot.

Undersiden er utstyrt med et høyfriksjonsmateriale som gir ekstra sikkerhet når man går. Man kan dermed trygt beholde hælavlasteren på, for eksempel når man skal fra seng til toalett.

### Egenskaper og muligheter

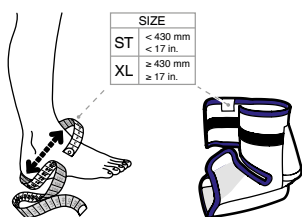

Tilgjengelig i to størrelser. XL-varianten passer for dem som har mål over 43 cm på det bredeste punktet rundt hælen og øvre del av vristen (se bildet).



Justerbare borrelåsbånd gjør at hælavlasteren sitter godt på foten. Hælavlasteren kan vaskes i maskin uten å fjerne luftputene.



### Tekniske data



0,1 kg



Vask:  
60°

**VICAIR**<sup>®</sup>  
the best in body support

### Artikkelnummer

Art.nr	Produkt	Størrelse	Materiale
060004	Hælavlaster	S	Luftceller
1578539	Hælavlaster	Standard (M-L)	Luftceller
060003	Hælavlaster	XL	Luftceller



# Madrasshøyder



IEC 60601-2-52, den nye globale standarden for senger, krever en minimumsavstand fra toppen av madrassen til toppen av sidegrinden med minimum 220 mm når grinden er oppreist og en minimum avstand fra toppen av madrassen ned til toppen av grinden med 20 mm når grinden er nede.

Her finner du en oversikt over Invacare sine senger med compatible madrasshøyder og sidegrinder.

<i>Invacare SB 755</i>																															
Madrasshøyde mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	
Torill - Lang og kort											120	130	140	150	160																
Line/Line Forlengbar											120	130	140	150	160	170	180														
Britt V/Britt V Forlengnet											120	130	140	150	160	170	180														
Scala Basic 2							80	90	100	110	120	130	140	150	160																
Scala Basic Plus 2							80	90	100	110	120	130	140	150	160																
Scala Medium 2							80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210											
Scala Decubi 2																					210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310

<i>Invacare SB 400</i>																															
Madrasshøyde mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	
Line/Line Forlengbar														150	160	170	180	190	200	210											
Britt V/Britt V Forlengnet														150	160	170	180	190	200	210											
Scala Basic 2									100	110	120	130	140	150	160	170															
Scala Basic Plus 2									100	110	120	130	140	150	160	170															
Scala Medium 2									100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220										
Scala Decubi 2																						230	240	250	260	270	280	290	300	310	

<i>Invacare Octave</i>																															
Madrasshøyde mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	
Line/Line Forlengbar														150	160	170	180	190	200	210											
Britt V/Britt V Forlengnet														150	160	170	180	190	200	210											

<i>Invacare Etude Plus / Invacare Etude Plus Low</i>																																				
Madrasshøyde mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310						
Line/Line Forlengbar/ Britt V/ Britt V Forlengnet														100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	
Scala Basic 2									100	110	120	130	140	150	160	170																				
Scala Basic Plus 2									100	110	120	130	140	150	160	170																				
Scala Medium 2									100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220															
Scala Decubi 2																						230	240	250	260	270	280	290	300	310						

#### Sidegrindforhøyere til hele grinder

Sidegrindforhøyer for Line og Line forlengbar øker den tillatte madrasshøyden fra den originale sidegrinden med 150 mm

Sidegrindforhøyer for Britt III og V øker den tillatte madrasshøyden fra den originale sidegrinden med 150 mm





A series of horizontal dotted lines for writing.

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
E-mail: [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

© 2020 Invacare International Sàrl. All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. Reproduksjon, bruk av katalogen eller deler av den uavhengig av form er forbudt uten tillatelse fra Invacare International Sàrl.

MADRASSER - NO - 03/2020

