

# SoftCloud™ Pro

Vekseltrykkmadrasser  
Rammeavtale madrasser



ALLSIDIG | INTUITIVT DESIGN | KOMFORT



# Invacare SoftCloud-serien

---

Vekseltrykk-teknologi anbefales for å oppnå forebygging og håndtering av trykksår døgnet rundt, kombinert med individuell overvåkning, reposisjonering og sårpleieprogram.

Helsepersonell møter ofte situasjoner hvor brukeren ikke selv er i stand til reposisjonering. Under disse omstendighetene anbefaler EPUAP å bruke et aktivt støtteprogram som en del av trykksårforebyggingen.

*Invacare SoftCloud* madrasser og overmadrasser består av aktive støtteflater av høy kvalitet, designet for brukere med svært høy risiko for å utvikle trykksår. Det vekslende trykket er designet for å omfordele trykk flere ganger hver time, selv om brukeren ikke beveger seg.



---

"Bruk en aktiv støtteoverflate (overmadrass eller madrass) for personer med høy risiko for trykksår når hyppig manuell reposisjonering ikke er mulig" (EPUAP,2014)

---

**NYE**

**EGENSKAPER**

**1**

### Intuitivt design

- ▶ En moderne og intuitiv kontrollenhet



**2**

### Automatisk justering

- ▶ Sørger for klinisk riktig støtte for å sikre brukerens komfort





### 3 Maks. fast-knapp

- ▶ Gir en fast overflate for enklere sengetøyskift og reposisjonering av bruker.



#### ▶ Håndtak

For enkel madrasshåndtering og transport.

#### ▶ Sikkerhetsremmer

Tillater sengen å være løst festet til madrassen samtidig som tilgangen til HLR-sikringen er fri.

#### ▶ Trekk med glidelås

360-graders glidelås på toppen av trekket forenkler fullstendig fjerning av trekket ved vask.

#### ▶ Hengslet rygg

Madrassen er konstruert for å hindre at luftcellene glir ned når hjertebrettet heves, og for å motvirke friksjon (gjelder kun SoftCloud Pro).

#### ▶ Permanent avlasting av hælen

De fem hælcellene på SoftCloud Pro tillater permanent avlasting av brukerens hæl. Denne funksjonen er ideell for de fleste brukere med eksisterende hælssår.

#### ▶ Kabelstyringsystem

Ingen etterfølgende strømkabler.

#### ▶ Stropp

Dersom det oppstår en situasjon hvor det er behov for HLR, skal man dra i den gule stroppen merket CPR. Madrassen tømmes da umiddelbart for luft i bryst- og hodedelen.

#### ▶ Transportmodus

En transportklemme kan festes på slangen under transport, for å sikre at luften holder seg i madrassen når den er frakoblet pumpen.



# SoftCloud-serien

Serien består av fire alternativer, som alle er enkle i bruk:



PRISFORHANDLET POST 6

## SoftCloud Top

- ▶ Overmadrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 12 minutter
- ▶ 1 av 2 Syklus
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

## SoftCloud Air

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 12 minutter
- ▶ 1 av 2 Syklus
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

## SoftCloud Ace

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 10 minutter
- ▶ 1 av 3 Syklus
- ▶ Dampgjennomtrengelig trekk med sveisede sømmer
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

## SoftCloud Pro

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 10 minutter
- ▶ 1 av 3 Syklus
- ▶ Permanent oppblåste luftvegger gir fast sidestøtte med en stabil forflytningsplattform
- ▶ Egen hældel for sensitive hæler
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

## Intuitive kontrollenheter

Kontrollenhetene til **SoftCloud** har et intuitivt display som kan brukes til å justere komfortnivåer ved å gi enten en 1 av 2 eller 1 av 3 vekslende trykkmodus sammen med et statisk alternativ.

Videre tillater en automatisk detekteringsfunksjon i kontrollenheten å automatisk registrere trykk fra kroppen, og justerer trykknivået deretter. Kontrollenhetene har både visuelle alarmer og lydalarmer som aktiveres ved lavt trykk eller strømbrudd. Det er også mulig å skru av alarmene ved rengjøring.



## Tekniske data ▼

For mer informasjon om produktet samt produktets brukermanual, se [www.invacare.no](http://www.invacare.no)



Bredde ▼



Lengde ▼



Høyde ▼



Maks.  
brukervekt ▼

<b>SoftCloud Top</b>	83-88 cm	200 cm	13 cm	200 kg
<b>SoftCloud Air</b>	83-88 cm	200 cm	18 cm	200 kg
<b>SoftCloud Ace</b>	83-88 /103-116 cm	200 cm	20 cm	220 kg/ 350 kg
<b>SoftCloud Pro</b>	83-88 cm	200 cm	20 cm	220 kg

PRISFORHANDLET POST 6



Dybde ▼



Bredde ▼



Høyde ▼

<b>Kontrollenhet 1</b>	12 cm	25 cm	24 cm
<b>Kontrollenhet 2</b>	12 cm	29 cm	25 cm

HMS nr.	IVC art. nr.	Dynamisk madrass m/ inkontinens trekk	Materiale	Produktbeskrivelse
286844	1630823	Madrass SoftCloud Pro Bred b88 l200 h20	Luft	Madrass, dynamisk
286886	1630822	Madrass SoftCloud Pro Smal b83 l200 h20	Luft	Madrass, dynamisk
286866	1630835	Pumpe madrass SoftCloud Pro	Luft	Pumpe
278304	SP1631166	Bag madrass SoftCloud Pro	Luft	Bag

## Farge ▼



Mørk blå

Fargen kan variere litt fra fargen vist ovenfor.

## Regulatoriske data ▼

### Madrassen er produsert i henhold til:

European Standard: BS EN 597-1 Cig  
European Standard: BS EN 597-2 Match  
BS7177:1996 Crib 5.

### Kontrollenhet

Lydnivå: ≤ 30 dB

## Annen informasjon ▼

Denne madrassen vil bidra positivt i en komplett pleieplan for trykksårforebyggende omsorg.

Tlf: 22 57 95 00  
[norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo



Yes, you can.®