



Avansert elektrisk rullestol med lav setehøyde og liten svingradius til begrenset utendørsbruk

Invacare **TDX SP2 Low-rider** er en oppgradering av **TDX Extra**, etter tilbakemeldinger fra det norske markedet. Oppgraderingen omfatter nytt design, lavere setehøyde, forbedret setesystem og at stolen nå er klar-gjort for bilfeste. **TDX SP2 Low-rider** er en senterdrevet rullestol med et avansert understell som gjør at hjulene, uavhengig av hverandre, følger og absorberer ujevnheter i underlaget. Liten svingradius i kombinasjon med det patenterte understellet gir brukeren stabilitet og sikkerhet kombinert med god fremkommelighet og komfort. **TDX SP2** er spesielt velegnet til brukere som stiller ekstra høye krav til manøvrerbarhet, stabilitet eller som skal bruke stolen til transport i bil.

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®

Egenskaper



Fremkommelighet

Lav setehøyde gjør at du enkelt kommer inn i bilen eller under bordet. Liten svingradius gjør det enkelt å komme frem på trange steder, og det dynamiske understellet håndterer ujevnheter i underlaget.



Setesystem og tilbehør

Modulite™ setesystem er standard og kan enkelt tilpasses bruker. **Matrx** ryggsystem og et stort utvalg øvrig tilbehør er tilgjengelig. Stolen kan dermed enkelt tilpasses brukeren. Se info om **Matrx** foran i katalogen og tilbehørsversikten for mer informasjon.



NYHET

Bruk i bil

TDX SP2 Low-rider er klargjort for Dahl Docking-stasjon. Stroppefester godkjent for transport av bruker i bil er standard. Med kun 40 cm setehøyde (u/pute) kommer du enkelt inn i bilen, og den sentermonterte benstøtten lar føttene komme helt inntil stolen.



Servicevennlig

Den smarte konstruksjonen gjør at slitasjedeler enkelt kan skiftes ut. **TDX SP2 Low-rider** kan bredde- og dybdejusteres uten bytte av deler, kun puter.

Tekniske data



^{1/} avhenger av konfigurasjon

^{2/} målt i henhold til ISO 7176-4

^{3/} standard rygghøyde som kan justeres. Mange muligheter ved bytte av rygg

^{4/} **Modulite™** setesystem er kompatibelt med **Storm⁴** og delvis med våre manuellstoler fra Rea

^{5/} samsvarer med RoHS, restriksjoner for bruk av skadelige stoffer i elektrisk utstyr

^{6/} samsvarer med REACH, restriksjoner for bruk av skadelige kjemikalier

^{7/} Ved setehøyde 400 mm

Hovedprodukt

Invacare art. nr.	HMS art. nr.	Beskrivelse
1581674	203114	TDX SP2 Low-rider

Standard konfigurasjon:

- **Modulite™** setesystem, sb 43 cm x sd 46 cm (sitteenheten er justerbar i bredde 38-53 og dybde fra 41-51 cm)
- Høyderegulerbare og avtagbare armlener
- Regulerbar nakkestøtte
- Hoftebelte
- 5 el-funksjoner: Seteheis, tilt, ryggregulering og benstøtter med lengdekompensering
- Styreboks: REM 550 med LCD-skjerm og parallellforskyvning på høyre side
- Diameter på hjul: 15 cm svinghjul kompakt og 34 cm drivhjul luft
- Batteri og lader
- Leveres klargjort for montering av Dahl Docking-stasjon
- Transportfester godkjent for transport av bruker i bil
- LED-lykter foran og bak

NYHET



Invacare® **Modulite™**

Modulite, som kombinerer det beste fra tidligere setesystemer, gjør det nå enda enklere å tilpasse seteheten, og har et utvalg av alternative rygger, puter og tilbehør.

Ny teknologi og meget god servicevennlighet gjør det enkelt og intuitivt å tilpasse seteenheten til individuelle behov.

Egenskaper sete



Teleskopisk seteramme

Dette er kjernen i **Modulite**-setesystemet. Dette muliggjør justeringer i bredde og dybde med minimalt av bytte av deler.



Fjærende setebunn

Setebunn i velcro er tilgjengelig som tilbehør. Kan tilpasses etter behov. Trygt valg ved bruk av trykkavlastende puter.



Seteplate

Tredelt seteplate i smart design som dekker alle bredder og dybdejusteringer, uten bytte av deler.



C-skinne

For enkel montering av armlener, sidestøtter og annet tilbehør.

Egenskaper rygg



Elektrisk ryggvinkelregulering

Ergonomisk korrekt justering av ryggvinkelen, som følger kroppens bevegelser. Dette reduserer skyv- og friksjonskrefter.



Transportvennlig

Hurtigkobling til aktuatoren for ryggregulering gjør at ryggen enkelt kan felles ned ved transport. En stol med **Modulite** setesystem kan transporteres i en stasjonsvogn.



Tilpasning av rygg

Setedybden justeres ved å flytte ryggen i c-skinnen på setebunnen. Bredden på ryggen justeres enkelt på tverrbeslaget. Slik kan setedybde og -bredde raskt tilpasses individuelt.

Tekniske data



380 - 530 mm



410 - 510 mm



480, 540, 560 mm²



90 - 120°



1/ **Modulite** setesystem er kompatibelt med manuelle rullestoler i *Rea*-familien.
2/ avhenger av konfigurasjon