


Invacare® | **SOLO<sub>2</sub>**®

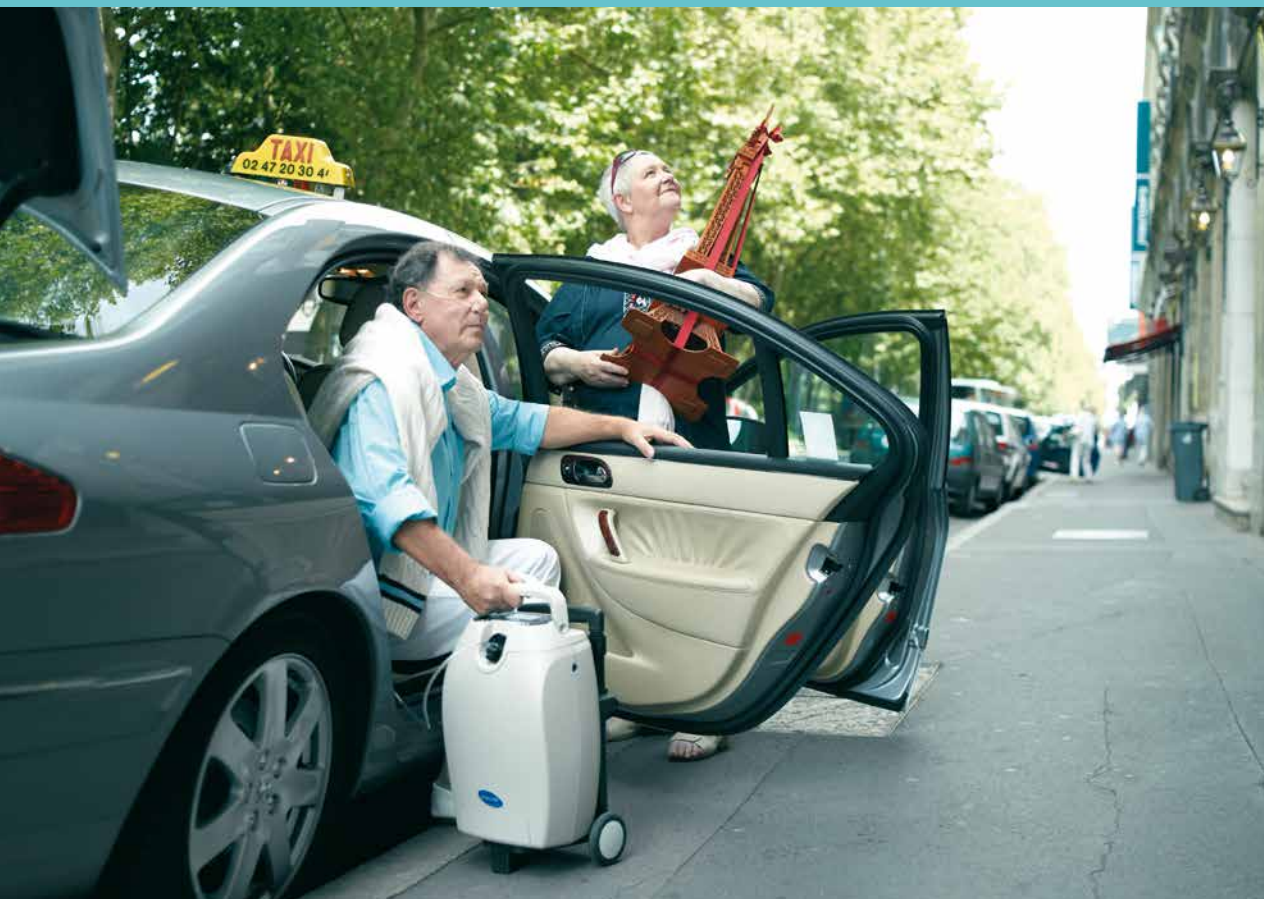

## Gå **SOLO<sub>2</sub>** : fleksibel oksygenterapi for økt uavhengighet

Invacare **SOLO<sub>2</sub>** passer perfekt for de med en aktiv livsstil. Flexibel oksygenlevering med pulset – og kontinuerlig flow gjør **SOLO<sub>2</sub>** til et godt valg. Konsentratoren dekker alle pasientkrav, fra natt – og ambulerende behandling, til stasjonær behandling. **SOLO<sub>2</sub>** transportabel oksygenkonsentrator møter etterspørselen til dagens brukere og behandlere ved å kombinere førsteklasses kvalitet og ytelse med lavt strømforbruk, enkel betjening og lite vedlikehold.



**Yes, you can.®**



### En løsning som passer alle

Med *Invacare SOLO<sub>2</sub>* kan de fleste oksygenpasienter behandles. Effektiv behandling om natten leverer oksygen via 6 innstillinger med kontinuerlig flow (0.5 – 3.0 lpm). 5 puls flow innstillinger gir oksygenet som pasienten trenger ved bevegelse, for maksimal uavhengighet. Designet for å være brukerens eneste oksygenkilde, har **SOLO<sub>2</sub>** transportable oksygenkonsentrator en trillevogn som standard og er drevet av AC, DC og oppladbare batterier.

### Førsteklasses ytelse

**SOLO<sub>2</sub>** bruker utprøvet og patentert teknologi for å utvinne mest mulig oksygenmengde fra luften. Den høymottagelige **Sensi-Pulse™** konservereren leverer oksygen i begynnelsen av pasientens åndedrettssyklus for å forsikre maksimal effektivitet og komfort.

### Stillegående og effektiv

Takket være den innovative luftputen som brukes i **SOLO<sub>2</sub>** kan brukere nyte redusert lydnivå mindre enn 40 dB(A). To stillegående vifter forsikrer at kompressoren er avkjølt for å øke levetiden. Invacares strømbesparende programvare reduserer maksimalt forbruk

til 135W. Med **SOLO<sub>2</sub>** fokuserer vi på høy kvalitet til en rimelig pris. Med tilgang til alle filtre fra utsiden av kabinettet, er behovet for vedlikehold minimalt takket være det integrerte bakteriefilteret til pasientuttaket.

### Egenskaper



### Puls og kontinuerlig flow

Mange flow innstillinger for å tilfredsstillende enhver bruker. Kontinuerlig flow for behandling over natten og puls flow for maksimal bevegelse.

## Egenskaper



### Transportvennlig design

Trillevognen med store hjul og justerbare håndtak gjør at **SOLO<sub>2</sub>** er enkel å bruke utendørs.



### Nytt uttak

Nytt uttak med integrert Hepa-filter. Messinguttak gir brannstopp for samsvar med ISO 8359/AMD1. Filteret byttes enkelt uten verktøy uten at apparatet åpnes.



### Batteridrevet

**SOLO<sub>2</sub>** kan få strøm fra AC, DC eller batteripakken for maksimal uavhengighet og økt bevegelighet.

### Ekstern batterilader

En kompakt ekstern batterilader som kan lade batteriet uten at det er påmontert konsentratoren. Ladetid for et utladet batteri er 5 timer.



Tilbehør

**TPO115-EU**  
**1533371-TPO120**  
**1533371-TPO132**  
**1533371-TPO136**  
**1533371-TPO140**  
**1533371-TPO160**

Ekstern batterilader  
 Trillevogn.  
 AC stikkontakt med uttak til bruk i Europa.  
 AC stikkontakt med uttak til bruk i England.  
 DC strømkabel.  
 Bag for tilbehør.



### FAA godkjent

Godkjent for bruk på flyreiser.



### 1533371-TP0120

Trillevogn med justerbart håndtak.



### Intuitivt betjeningspanel

Den integrerte timetelleren gjør at man kan kontrollere pasientens bruk.



### 1533371-TP0170

















Holder fukteflaske.



### 1533371-TPO110

Ekstra oppladbart batteri.

## Tekniske data

<b>SOLO<sub>2</sub></b>	 420 mm	 280 mm	 200 mm	 9 kg (uten trillevogn)	 100-240 VAC, 50/60 Hz	 11-16 VDC	 135 W
<b>SOLO<sub>2</sub></b>	 FAA godkjent	 Opp til 3046 moh	 3 LPM på AC og batteri 2 LPM på DC	 <40 dB(A) for alle puls flow innstillinger <40 dB(A) up to 2 lpm kontinuerlig flow	 87% - 96%	 Nesekateter 2100 mm	 ISO 8359/AMD1
<b>SOLO<sub>2</sub></b>	 12 psig maksimum	 IPX2 - beskyttet mot dryppende vann når tiltet opp til 15°					

## Sensi-Pulse

**Sensi-Pulse oksygenlevering:**

**Sensi-Pulse** teknologi gir en konstant mengde oksygen for å imitere den naturlige pusten. Dette betyr at uavhengig av hvor hyppig pasienten puster leveres den samme mengden oksygen pr minutt. Når antall pust synker, øker oksygenvolumet. Den sensitive triggeren trenger kun -2 mm H<sub>2</sub>O fra pasienten for å aktivere **Sensi-Pulse**. Oksygenet leveres dermed tidlig i pasientens pustesyklus for å forsikre maksimal komfort og klinisk effektivitet.

Innstilling	1	2	3	4	5
Volum pr. minutt (cc)	400	800	1200	1600	2000
Varighet batteri (timer)	4.5	3.5	3	2.5	2.5

**Kontinuerlig flow**

Innstilling (LPM)	0.5	1	1.5	2	2.5	3
Varighet batteri (timer)	4.5	3.5	3	2.5	2	1.5

 SensO<sub>2</sub>-System

**O<sub>2</sub>-konsentrasjon**

høyere enn 85%



- grønt lys -

**Normal**

mellom 73% og 85%



- gult lys -

**Sjekk filter og flow nivå**

lavere enn 73%



- rødt lys -

**Kontakt servicetekniker**

Invacare AS  
 Grensesvingen 9  
 Postboks 6230 Etterstad  
 0603 Oslo - Norway  
 Telefon: +47 22 57 95 00  
 Telefaks: +47 22 57 95 01  
 E-mail: norway@invacare.com  
 www.invacare.no

© 2014 Invacare International Sàrl  
 All rights reserved.

All informasjon er korrekt  
 ved trykkesidspunkt. Invacare  
 forbeholder retten til å endre  
 produktspesifikasjoner uten videre  
 konsultasjon.

Solo2- NO - 02/2014



**Yes, you can.®**