



Dynamiske vekseltrykkmadrasser

Invacare **SoftAIR** madrasser gir effektiv og komfortabel avlastning til brukere med høy og ekstra høy risiko for å utvikle trykksår. **SoftAIR**-madrassene understøtter behandling av trykksår til og med kategori 4. Segmentet omfatter **SoftAIR Super** og **SoftAIR Excellence**.

SoftAIR sortiment



Invacare **SoftAIR Super**

SoftAir Super er en fullhøyde-madrass som er bygget opp av 21 luftfylte celler (cell-in-cell) hvorav 3 statiske celler er i hodeseksjonen. Tre og tre celler "jobber" sammen etter mønster 2 med og 1 uten luft. Vekslingen skjer hvert 10-12 minutt. Madrasstrekket er elastisk og pustende og alle sømmene er høyfrekvent sveiset.



Invacare **SoftAIR Excellence**

SoftAir Excellence en fullhøyde-madrass som er bygget opp av 19 luftfylte celler (cell-in-cell), 3 statiske celler i hodeseksjonen. Luftfylte sideceller gir stabil og trygg inn- og utstigning for brukeren. De stabiliserende luftfylte sidecellene gir også sikkerhet for brukeren ved bevegelse i sengen. **SoftAir Excellence** har en sone bestående av 5 mindre celler i bendelen for bedre trykkavlastning under hælene.



Invacare **SoftAIR Pumpe**


Med **SoftAir**-pumpens manøverpanel kan du enkelt stille inn trykk, sette alarmen i stillemodus eller låse manøverpanelet. Pumpen kan stilles inn på dynamisk eller statisk trykk. **SoftAir** pumpen stilles i utgangspunktet inn etter brukervekt. Dersom det er behov for hardere eller mykere madrass utover vektinnstillingen, kan dette justeres opp eller ned for økt komfort. Om brukeren skal sitte høyt i sengen, anbefales det å stille pumpen på statisk trykk. Pumpen har audovisuell alarm som aktiveres ved for lavt eller høyt trykk, ved strømbrudd eller om vekslingen mellom cellene hindres.

Egenskaper og tilbehør



Celler med vekslende trykk

Det tredelte vekseltrykkssystemet (2 opp og 1 ned) skjer i 10 til 12 minutters sykluser ved at hver 3. celle til enhver tid har null trykk mot huden. Dette skjer for å stimulere blodsirkulasjonen og dermed gi optimale forhold for huden. For å øke brukerens komfort er cellene i hodeseksjonen statiske. Det er enkelt å komme til cellene slik at de kan skiftes ved feil/skade.

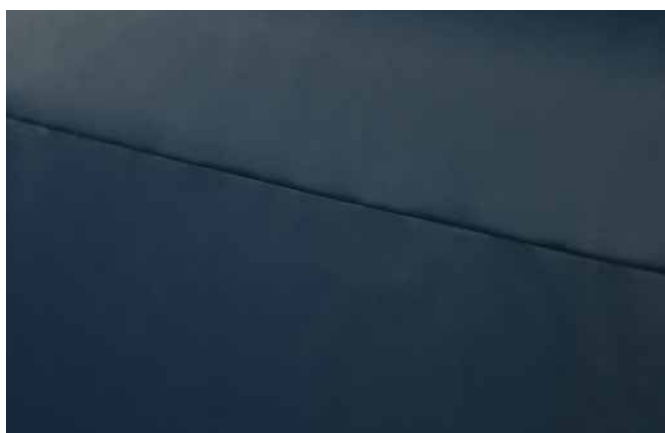

Elastisk inkontinenstrekk med sveisede sømmer

Sømmene er høyfrekvent sveiset og glidelåsen dekket med en dryppkant for å sikre at væske ikke trenger inn i madrassen. Trekket er produsert i mykt polyuretan-materiale som er pustende og elastisk to veier. Dette for å gi brukeren best mulig komfort og minimere risikoen for trykk i forhold til skyv- og friksjonskreftene. Trekket har «quick release» glidelås som gjør det enkelt å ta av overdelen. Madrasstrekket kan vaskes med temperatur opp til 95 °C.



CPR stropp (CPR = Hjerte Lunge Redning)

Dersom det oppstår en situasjon hvor det er behov for HLR, skal man dra i den gule stroppen merket CPR. Madrassen tømmes da umiddelbart for luft i bryst- og hodedelen.



Transportbag

SoftAir-madrassen kan rulles og oppbevares i medfølgende transportveske. Bagen er utstyrt med en sidelomme for oppbevaring av pumpen.

Egenskaper og tilbehør



«Quick release» glidelås

En «quick release» glidelås gjør at man enkelt kan ta av overdelen på madrassstrekket.



Håndtak

Solide bærehåndtak er plassert på begge sider av madrassen.



Feste for laken

Sikrer et «løst» feste av lakenet i hvert hjørne samtidig som det gir fri tilgang til CPR-utløsere.



Hengslet rygg

Madrassen er konstruert for å hindre at luftcellene glir ned når hjertebrettet heves, og for å motvirke friksjon (gjelder kun **SoftAir Excellence**).



Transport

I luftslangens håndtak kan en adapter settes i som sikrer at luften holder seg i madrassen inntil 72 timer når den er frakoblet pumpen. Adapteren sitter på luftslangens munnstykke.



Sikkerhetsremmer

Sikkerhetsremmer for fastgjøring av madrassen til sengens liggeflate.

Tekniske data



Modell	Størrelse (mm)	Vekt (kg)	Bæreevne (kg)	Vasketemp. (°C)
SoftAIR Super	Smal modell 2000 x 830 x 200 mm	9,2 kg	180 kg	95 °C
	Bred modell 2000 x 880 x 200 mm	10,5 kg		
SoftAIR Excellence	Smal modell 2000 x 830 x 250 mm	9,5 kg	180 kg	95 °C
	Bred modell 2000 x 880 x 250 mm	10,8 kg		

Produsert i henhold til europeisk standard:
BS EN 597-1 BS EN 597-2 Match, BS7177: 1996 Crib Source 5

Art. nr.	Dynamisk madrass	Madrassmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
1532815	Softair Super	83x200x20 cm	PU behandlet nylon/polyuretan	Dynamisk luftmadrass med pumpe
1532816	Softair Super	88x200x20 cm	PU behandlet nylon/polyuretan	Dynamisk luftmadrass med pumpe
1532813	Softair Excellence	83x200x25 cm	PU behandlet nylon/polyuretan	Dynamisk luftmadrass med pumpe
1532814	Softair Excellence	88x200x25 cm	PU behandlet nylon/polyuretan	Dynamisk luftmadrass med pumpe

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykktidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

SoftAIR - NO - 02/2016



Yes, you can.®