

Invacare Seilprogram



Passform og komfort



Vårt seilprogram

Optimalisert passform

Vårt nye seilprogram er designet for å gi en trygg, støttende og behagelig forflytning for bruker. Programmet gir muligheter for forskjellige modeller, størrelser og tekstiler for å sikre at seilet passer best mulig til hver person, enten de har nedsatt bevegelighet eller trenger full kropps- og hodestøtte.

Vårt team av eksperter og ergoterapeuter har brukt tid på å sikre at seilene er intuitive og enkel å håndtere for pleieren. Dette fører til reduserte påføringstider og forbedret selvtillit.

Serien består av femten modeller, hver i opptil seks størrelser og opptil tre stoffalternativer å velge fra.

Dette store utvalget sikrer at det er et seil som passer for de aller fleste og for nødvendig bruk; daglig overføring fra seng til rullestol / lenestol, toalettoverføring eller til og med for dusjing eller bading.



4

AVGJØRENDE EGENSKAPER



◀ God passform

- ▶ Riktig seil for riktig bruker og riktig bruk
- ▶ Stort utvalg med 15 modeller, 6 størrelser og 3 stoffer
- ▶ Gjennomtenkt design av seilene for å sikre riktig støtte på rett sted
- ▶ Alle seilene har løkkefeste for en høy løftebøyle for god kompatibilitet med forskjellige løftebøyer

Sikrere å bruke ▶

- ▶ Instruksjonsvideoer lett tilgjengelige via QR-kode på seil
- ▶ Tydelige instruksjoner på merking av seil med tegninger
- ▶ Sertifisert og miljøvennlig flammehemmende materiale på Comfort In Situ seilserien



◀ God komfort

- ▶ Myke materialer for økt komfort
- ▶ Polstret rygg og benseksjoner for optimal vekt fordeling
- ▶ Polstret under armhulene som er ømtålig

Enkle å legge ▶

- ▶ Posisjonering av lommestøtter for å skyve mellom klienten og ryggstøtte mens bruker sitter
- ▶ To midtlinjemarkører indikerer posisjonen over ryggraden
- ▶ Fargede løkker letter valget for riktig posisjonering




Å velge riktig seil

Hovedmålet med valg av seil er å gi mengden kroppsstøtte som er nødvendig. Invacare seil er designet for å gi støtte i de områdene der kroppskontroll og muskeltonus reduseres.

Følgende gir en oversikt over hvilken seilmodell som er best egnet til bruker basert på brukers behov av støtte:

kroppskontroll vurdering ▼

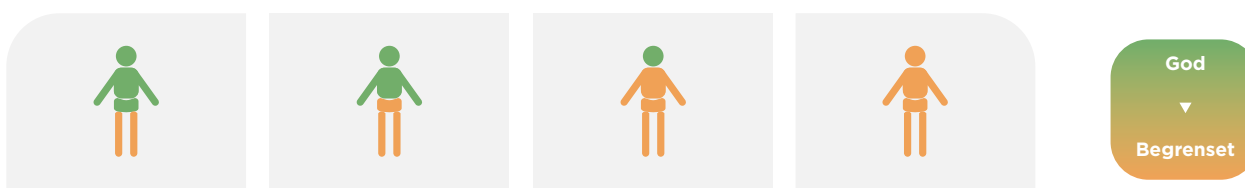

Grad av støtte med *Invacare sine* seilmodeller ▼

Veldig lite ▼	Litt ▼	Medium ▼	Full ▼	Tiltenkt bruk
	Universal Lav	Universal Standard	Universal Høy	Universal Standard
		Amputasjon	Universal Høy Pluss	Mindre optimalt
		Easy-Fit		Optimalt
		Comfort Standard		
		Comfort In Situ		
			Comfort Høy	
Toalettseil Lav				
Toalettseil Høy				
Løftebånd				
Løftevest				
	Løftevest med skrittsele			
Aktivløfter				


***Mindre optimalt**
Bruker bør ha overskudd av kraft og kontroll i forhold til støttenivået seilet gir i tilfelle bruker blir immobilisert over tid, samtidig som mer stoff enn nødvendig gjør påføringen av seil vanskeligere.

Valg av riktig størrelse

Hoftebredde og rygghøyde målt i sittestilling er de viktigste faktorene for å velge riktig stroppstørrelse. Til stropper med belter, er også midjeomkrets viktig.

Brukervekt må vurderes for seilets maksimale sikre arbeidsbelastning.

Se Invacares guide for valg av seil for full oversikt og mål på alle modeller og størrelser

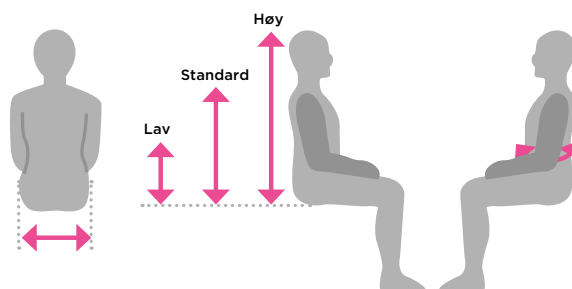

► Størrelse	XS	S	M	L	XL
► Maksimum løftevekt	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg
► Midjemål*	500 - 900	600 - 950	750 - 1170	860 - 1270	920 - 1810

* oppreisningsseil

Invacare-seil for passivløftere

Universal serien

Universale seil til daglig bruk.



◀ Universal Lav

- Støtter hofter og korsrygg
- Passer for de med god styrke i overkroppen
- Kan brukes til sittende til sittende overføringer



◀ Universal Standard

- Støtter hele kroppen, inkludert skuldrene
- Passer for de med god hodekontroll
- Kan brukes til overføringer fra liggende stilling, løftende fra gulvet og sittende til sittende overføringer



◀ Universal Høy

- Støtter hele kroppen, inkludert hodet
- Kunden sitter i litt tilbakelemt posisjon
- Passer for de med begrenset kontroll av hodet og overkropp
- Kan brukes til overføringer fra liggende stilling, løftende fra gulvet og sittende til sittende overføringer



◀ Universal Høy Plus

- Samme funksjonssett som Universal High, men tillater bruker å holde armene utenfor seilet og være mer interaktiv



◀ Amputasjon

- Støtter lår og mellomgulv
- Egnet for enkelt- eller dobbelt amputasjoner der bruker har god hodestyring
- Ikke egnet hvis bruker har risiko for krampe
- Bruker sitter i litt tilbakelemt posisjon
- Kan brukes til sittende til sittende og liggende å sittend overføringer



◀ Easy-Fit

- Støtter hele kroppen og hodet
- Passer for de med begrenset kontroll av hodet, mellomgulv og hofter
- Separat benstøtte gjøre det lettere å påføre enn
- Comfort seil
- Gir en god hofte posisjon for å tillate bruker å sitte relativt oppreist



◀ Lavt toalettseil

- Passer for de med god kontroll på overkroppen
- Belte gir økt støtte rundt kroppen og trygg posisjonering
- Kan brukes til sittende til sittende overføringer



◀ Høyt toalettseil

- Samme funksjon som Lav Toalettseil, men kommer med hode støtte for de med redusert hodekontroll

Comfort serien

Hengekøye-seil som er ideell for de med kroniske smerter. Seilet er også for amputerte. Comfort In Situ seilet er det beste valget når seilet må være under klienten i lengre tid etter overføring i sittende stilling.



◀ Comfort Standard

- Støtter hele kroppen
- Passer for de med god hodekontroll
- Inkludert gode håndtak for posisjonering



◀ Comfort høy

- Støtter hele kroppen, inkludert hodet
- Passer for de med begrenset kontroll av hodet og overkropp
- Inkludert gode håndtak for posisjonering



◀ Comfort In Situ

- Støtter hele kroppen
- Passer for de med god hodekontroll
- Designet uten håndtak for å forbli under klienten etter overføring
- Laget av flammehemmende materiale i alle tekstiler
- Miljøvennlig
- Tredjeparts testet for brannsikkerhet mot EN 1021 del 1 og 2



Løftebånd

Gir ekstra støtte til arm eller ben og er egnet til raske forflytninger.



◀ Lett forflytningsstøtte

- Passer for brukere med god kropp og hode kontroll
- Kan brukes til sittende forflytning
- Kan brukes som løftebånd å støtte enkle armer eller ben om nødvendig, også som ekstra støtte til et annet seil

Ståvest for balanse og gåtrening

Enkel å påføre, letter kroppens vekt.



◀ Oppreist forflytning

- Påføres rundt midjen med klientenes føtter på gulvet
- Passer for de med noe evne til å stå oppreist, men har redusert balanse og / eller evne til å gå
- Tilbehør: Lyskestropp hjelper til med å holde vesten på plass

Invacare-seil for aktivløfter



◀ Løfteseil aktiv

- Passer for brukere med vekt bærende evne, men som ikke kan reise seg opp eller stå oppreist
- Bruker bør være klar og ha god kropp og hodekontroll
- Godt polstret for ekstra komfort
- Leveres med sklisikker materiale på baksiden



◀ Forflytningsseil aktiv

- Samme egenskaper som seil aktivløft, men har støtte for ben i tillegg

Tilbehør ▼



Forlengningsløkke

- ▲ Forleng løftestroppene for å gi flere posisjonsmuligheter. Finnes i 20 cm og 30 cm lengde.



Merking til løkker

- ▲ Merk enkelt de foretrukne løkkene etter individuell vurdering. Kommer i en pakke med fire.



Skrittstropp

- ▲ Skrittstropp for oppreisningsforflytning.

Størrelser og stoff


Familie	Modell	Størrelse						Stoff		
		XS	S	M	L	XL	XXL	Solid	Net	Spacer
Universal	Universal lav	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Universal Standard	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Universal Høy	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●	●	●
	Universal Høy Pluss	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
Smal åpning	Amputasjon	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Easy Fit	◆	◆	◆	◆	◆		●		●
Wide opening	Toalettseil lav	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Toalettseil høy	◆	◆	◆	◆	◆		●		
Comfort	Comfort Standard	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Comfort Høy	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Comfort In Situ	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●🔥	●🔥	●🔥
Løftebånd	Løftebånd		◆		◆			●		
Stå/gåtrening	Forflytningsvest	◆	◆	◆	◆	◆		●		
Aktivløfter	Løfteseil aktiv	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Forflytningsseil aktiv		◆	◆	◆	◆		●		

Stoff



Polyester - Solid

▲ Et sterkt materiale som er slitesterkt og enkel å påføre. Den glir jevnt på plass og tørker raskt etter vask. Dette kommer som standard på alle modeller.

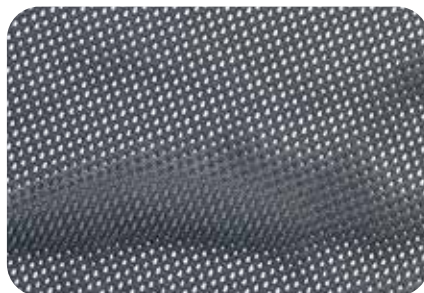

Polyester - Net

▲ Også kjent som mesh-stoff. Materialet er ideell for bading eller dusjmiljøer. Det har gode drenerings- og tørkeegenskaper.



Spacer

▲ Det pustende stoffet har toveis elastisitet slik at materialet kan tilpasse seg brukerens konturer, noe som resulterer i høy nivå av komfort og støtte.

Tekniske data

For mer omfattende informasjon om dette produktet, inkludert produktets brukerhåndbok, se invacare.no.



Høyest tillatt brukervekt ▼



Høyest vasketemperatur ▼



Blekemiddel ▼



Tørketrommel ▼

Alle seil bør testes og tilpasset den enkelte bruker for å sikre optimal komfort og sikkerhet under overføringer.

En risikovurdering må være utført før bruk av seil på andre produsenters personløftere.

Invacare Seil

XS, S, M, L = 200 kg
XL = 250 kg
XXL = 300 kg

90° C

Skal ikke blekes

Lav temperatur

Artikkelnummer seilprogram

New Item No.	QAD beskrivelse 1	Material
60124078	Seil Universal lav XS	Net
60124079	Seil Universal lav S	Net
60124080	Seil Universal lav M	Net
60124081	Seil Universal lav L	Net
60124082	Seil Universal lav XL	Net
60124073	Seil Universal lav XS	Solid
60124074	Seil Universal lav S	Solid
60124075	Seil Universal lav M	Solid
60124076	Seil Universal lav L	Solid
60124077	Seil Universal lav XL	Solid
60124083	Seil Universal lav XS	Spacer
60124084	Seil Universal lav S	Spacer
60124085	Seil Universal lav M	Spacer
60124086	Seil Universal lav L	Spacer
60124087	Seil Universal lav XL	Spacer
60124093	Seil Universal XS	Net
60124094	Seil Universal S	Net
60124095	Seil Universal M	Net
60124096	Seil Universal L	Net
60124097	Seil Universal XL	Net
60124088	Seil Universal XS	Solid
60124089	Seil Universal S	Solid
60124090	Seil Universal M	Solid
60124091	Seil Universal L	Solid
60124092	Seil Universal XL	Solid
60124098	Seil Universal XS	Spacer
60124099	Seil Universal S	Spacer
60124100	Seil Universal M	Spacer
60124101	Seil Universal L	Spacer
60124102	Seil Universal XL	Spacer
60124063	Seil Universal høy XS	Net
60124064	Seil Universal høy S	Net
60124065	Seil Universal høy M	Net
60124066	Seil Universal høy L	Net
60124067	Seil Universal høy XL	Net
60124058	Seil Universal høy XS	Solid
60124059	Seil Universal høy S	Solid
60124060	Seil Universal høy M	Solid
60124061	Seil Universal høy L	Solid
60124062	Seil Universal høy XL	Solid
60125684	Seil Universal høy XXL	Solid
60124068	Seil Universal høy XS	Spacer
60124069	Seil Universal høy S	Spacer
60124070	Seil Universal høy M	Spacer
60124116	Seil Universal høy L	Spacer
60124071	Seil Universal høy L	Spacer
60124072	Seil Universal høy XL	Spacer
60124108	Seil Universal høy +XS	Net
60124109	Seil Universal høy +S	Net
60124110	Seil Universal høy +M	Net
60124111	Seil Universal høy +L	Net
60124112	Seil Universal høy +XL	Net
60124103	Seil Universal høy + XS	Solid
60124104	Seil Universal høy +S	Solid
60124105	Seil Universal høy + M	Solid
60124106	Seil Universal høy+ L	Solid
60124107	Seil Universal høy + XL	Solid
60124113	Seil Universal høy +XS	Spacer
60124114	Seil Universal høy +S	Spacer
60124115	Seil Universal høy + M	Spacer

New Item No.	QAD beskrivelse 1	Material
60124117	Seil Universal Høy +XL	Spacer
60123879	Seil amputasjon XS	Solid
60123880	Seil amputasjon S	Solid
60123881	Seil amputasjon M	Solid
60123882	Seil amputasjon L	Solid
60123883	Seil amputasjon XL	Solid
60123927	Seil Easy-Fit XS	Solid
60123928	Seil Easy-Fit S	Solid
60123929	Seil Easy-Fit M	Solid
60123930	Seil Easy-Fit XS	Solid
60123931	Seil Easy-Fit XL	Solid
60123932	Seil Easy-Fit XS	Spacer
60123933	Seil Easy-Fit S	Spacer
60123934	Seil Easy-Fit M	Spacer
60123935	Seil Easy-Fit L	Spacer
60123936	Seil Easy-Fit XL	Spacer
60123889	Seil Toalett lav XS	Solid
60123890	Seil Toalett lav S	Solid
60123891	Seil Toalett lav M	Solid
60123892	Seil Toalett lav L	Solid
60123893	Seil Toalett lav XL	Solid
60123894	Seil Toalett høy XS	Solid
60123895	Seil Toalett høy S	Solid
60123896	Seil Toalett høy M	Solid
60123897	Seil Toalett høy L	Solid
60123898	Seil Toalett høy XL	Solid
60123844	Seil Comfort XS	Net
60123845	Seil Comfort S	Net
60123846	Seil Comfort M	Net
60123847	Seil Comfort L	Net
60123848	Seil Comfort XL	Net
60123839	Seil Comfort XS	Solid
60123840	Seil Comfort S	Solid
60123841	Seil Comfort M	Solid
60123842	Seil Comfort L	Solid
60123843	Seil Comfort XL	Solid
60123849	Seil Comfort XS	Spacer
60123850	Seil Comfort S	Spacer
60123851	Seil Comfort M	Spacer
60123852	Seil Comfort L	Spacer
60123853	Seil Comfort XL	Spacer
60123860	Seil Comfort høy XS	Net
60123861	Seil Comfort høy S	Net
60123862	Seil Comfort høy M	Net
60123863	Seil Comfort høy L	Net
60123864	Seil Comfort høy XL	Net
60123855	Seil Comfort høy XS	Solid
60123856	Seil Comfort høy S	Solid
60123857	Seil Comfort høy M	Solid
60123858	Seil Comfort høy L	Solid
60123859	Seil Comfort høy XL	Solid
60123865	Seil Comfort høy XS	Spacer
60123866	Seil Comfort høy S	Spacer
60123867	Seil Comfort høy M	Spacer
60123868	Seil Comfort høy L	Spacer
60123869	Seil Comfort høy XL	Spacer
60121079	Seil Comfort In Situ XS	Solid FR Black
60121080	Seil Comfort In Situ S	Solid FR Black

Artikkelnummer seilprogram

New Item No.	QAD beskrivelse 1	Material	HMS-nummer
60121081	Seil Comfort In Situ M	Solid FR Black	
60121082	Seil Comfort In Situ L	Solid FR Black	
60121083	Seil Comfort In Situ XL	Solid FR Black	
60125681	Seil Comfort In Situ XXL	Solid FR Black	
60121084	Seil Comfort In Situ XS	Spacer FR Black	
60121085	Seil Comfort In Situ S	Spacer FR Black	
60121086	Seil Comfort In Situ M	Spacer FR Black	
60121087	Seil Comfort In Situ L	Spacer FR Black	
60123764	Seil Comfort In Situ XL	Spacer FR Black	
60123775	Seil comfort In Situ XS	Net FR Black	
60123776	Seil comfort In Situ S	Net FR Black	
60123777	Seil comfort In Situ M	Net FR Black	
60123778	Seil comfort In Situ L	Net FR Black	
60123779	Seil comfort In Situ XL	Net FR Black	
60128614	Seil comfort In Situ XXL	Net FR Black	
60126831	Løfteseil aktiv XS	Solid	292492
60123941	Løfteseil aktiv S	Solid	292491
60123942	Løfteseil aktiv M	Solid	292488
60123943	Løfteseil aktiv L	Solid	292489
60123944	Løfteseil aktiv XL	Solid	292490
60123945	Forflytningsseil aktiv S	Solid	292484
60123946	Forflytningsseil aktiv M	Solid	292485
60123947	Forflytningsseil aktiv L	Solid	292486
60123948	Forflytningsseil aktiv XL	Solid	292487
60124056	Løftebånd kort	Solid	
60124057	Løftebånd langt	Solid	
60124128	Løftevest XS	Solid	
60124129	Løftevest S	Solid	
60124130	Løftevest M	Solid	
60124131	Løftevest L	Solid	
60124132	Løftevest XL	Solid	
60125679	Lyskestropp kort	Solid	
60125680	Lyskestropp Langt	Solid	
60125890	Forlengningsløkke L	Polyester	
60127372	Forlengningsløkke S	Polyester	

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0661 Oslo



Yes, you can.®

