



Alber® e-motion® M25 DuoDrive

NYHET!



Ekstra overskudd i hverdagen
Hjelpemotor til manuelle rullestoler med
cruisekontroll



Yes, you can.®

e-motion M25 DuoDrive: Ekstra energi gjennom hele dagen

1. plass
Delkontrakt 16

Enklere manøvrering

Den lette, smarte og diskrete hjelpemotoren **Alber e-motion M25 DuoDrive** kan brukes på omtrent enhver manuell rullestol, og gir deg ekstra krefter når du trenger det - uten anstrengelse. Når rullestolen er i bevegelse, vil de innebygde motorene i drivhjulene bidra med ønsket motorkraft, og gi deg friheten til å komme deg rundt, med den innsatsen du selv ønsker. I tillegg gir **e-motion M25 DuoDrive** deg muligheten til å opprettholde en jevn hastighet over tid, ved å ta i bruk den praktiske cruisekontrollen. Cruisekontrollen kan også benyttes i oppover- og nedoverbakker, og du trenger ikke engang å berøre drivringene for å komme deg fremover - perfekt for lengre turer, eller om du har lyst på en coffee to go!

Alber e-motion M25 DuoDrive er også svært skånsom mot muskler og ledd, og forhindrer med det overbelastning av utsatte områder som skuldre, armer og håndledd.

Med en vekt på kun 7,8 kg per drivhjul, er **e-motion M25 DuoDrive** en av de letteste hjelpemotorene på markedet.

Drivhjulene kan ved en enkel operasjon tas av rullestolen, slik at hjulene til den manuelle rullestolen fortsatt kan brukes ved behov.

Svært effektive elektriske motorer og Lithium-Ion-batterier integrert inn i hjulnavene gir god kraft og rekkevidde.



To ulike kjøremodus - det er ditt valg

Alt under kontroll

Med **Alber e-motion M25 DuoDrive** montert på den manuelle rullestolen trenger du ikke lenger å bekymre deg for lengre distanser eller bratte bakker. Den innovative og praktiske cruisekontrollen gir deg muligheten til å opprettholde en jevn hastighet og legge bak deg lengre distanser uten å berøre drivringene. Alt du trenger å gjøre er å styre ved hjelp av drivringene, hjelpemotorene gjør resten. Velg mellom to ulike kjøremoduser som du enkelt kan bytte mellom, avhengig av dine behov. Cruisekontrollen kan enkelt aktiveres og deaktiveres ved hjelp av **DuoDrive**-kontrollen.

Alber e-motion M25 DuoDrive bringer deg alltid trygt frem - og hjem

Cruisekontrollen er spesielt gunstig når

- du ønsker ekstra assistanse på veien.
- du skal oppover bakker. **Alber e-motion M25 DuoDrive** kan håndtere nesten alle bakker og du kan komme uthvilt og avslappet frem dit du skal - ved hjelp av cruisekontrollen
- du vil ha jevn fart i nedoverbakker og gjerne ønsker en bremseassistent som opprettholder en forhåndsinnstilt hastighet.

Slik fungerer DuoDrive-kontrollen

Skru på hjulet: Øk eller reduser farten på cruisekontrollen

Batterimonitor av drivhjulene



1 x trykk: Cruisekontrollen aktiveres eller deaktiveres

2 x trykk når cruisekontrollen ikke er aktivert: veksler mellom kjøremodus 1 og 2

Bluetooth

Innebygd Lithium-Ion: varer opptil 12 timer



Ett klikk på kontrollenheten er alt som trengs for å bytte til cruisekontroll mens du kjører.



Med cruisekontroll aktivert har du også en hånd fri. Ideelt når du handler eller reiser.

Inkluderte komponenter



Enkelt å transportere e-motion DuoDrive

Kompakte komponenter med lav vekt



Drivringene

Drivringene aktiverer motorene for assistanse. Sensitiviteten kan justeres i 7 trinn individuelt på hvert hjul



Batteriene

Moderne Lithium-Ion batterier gir lang rekkevidde og holdbarhet. Av-/på-bryteren er også ladepunktet, og har en magnetisk ladeplugg

Tilbehør

Tekniske data

	Maks. brukervekt	Maks. totalvekt	Maks. høyde på hindringer	Motor	Hastighet
e-motion DuoDrive	150 kg	190 kg	Avhengig av rullestolen som brukes, med cruisekontroll opptil 5,7 ° (10%)	80 Watt / 40 Nm per hjul	6 km/t
	Vekt per hjul	Vekt på kontrollenhet	Rekkevidde	Tilgjengelig hjulstørrelser	
e-motion DuoDrive	7,8 kg	0,25 kg	25 km (15 km i cruisemodus)	22", 24", 25"	

HOVEDPRODUKT (Standardkonfigurasjon)

Art-nr	HMS-nr	Beskrivelse
1594446-J	321210	e-motion M25 DuoDrive med drivhjul i 22", drivringer i rustfritt stål, kontrollenhet, batterilader og Jack Up tippesikringer (NYHET)
1594428-J	321211	e-motion M25 DuoDrive med drivhjul i 24", drivringer i rustfritt stål, kontrollenhet, batterilader og Jack Up tippesikringer (NYHET)
1594436-J	321212	e-motion M25 DuoDrive med drivhjul i 25", drivringer i rustfritt stål, kontrollenhet, batterilader og Jack Up tippesikringer (NYHET)



BESTILLINGSTIPS

- Oppgi hvilken rullestol e-motion M25 DuoDrive skal monteres på, samt stolens setebredde og setedybde, for riktig monteringskit. Se fullstendig oversikt over tilgjengelige monteringskit i listen bakerst i brosjyren.
- Ved ny-bestilling: Husk å spesifisere ønsket tilbehør, som eks. dekk, drivringer og eikebeskyttere.

SE VÅRE PRODUKTVIDEOER



Scann QR-koden med telefonen din, og få tilgang til våre produktpresentasjoner og "how to"-videoer.

Monteringskit

Våre drivaggregat fra Alber passer til de aller fleste manuelle rullestoler på markedet. I listen under vil du finne en komplett oversikt over tilgjengelige monteringskit per 1. mars 2024.

Merk at listen vil oppdateres fortløpende. Etterhvert som nye rullestoler kommer til, vil monteringskit til disse bli laget fortløpende. Finner du ikke kit til din rullestol - ta kontakt med oss og spør!

Beskrivelse kit og stoltype ▼

Artikkelnummer ▼

HMS-nummer ▼

Monteringskit til e-motion M25 DuoDrive

Monteringskit universal (MRS som ikke har eget kit)	1467178	153091
Festebraketter for E-Motion til Etac Rouge 2	1595380	
Festebraketter for E-Motion til Sunrise Argon 2	1595383	
Festebraketter for E-Motion til Panthera S3 Swing	1595386	
Festebraketter for E-Motion til Sunrise QS5 X	1595387	
Festebraketter for E-Motion til Etac Catalyst 5	1595393	
Festebraketter for E-Motion til Etac Prio 3A Aktiv	1595397	
Festebraketter for E-Motion til Sunrise Youngster 3	1595401	

Tlf: **22 57 95 00**
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®