

## VEDLIKEHOLD - SIKKERHET

For å opprettholde funksjon og sikkerhet bør du regelmessig sørge for at nedenstående tiltak utføres:

- Gjør rent rullatoren med vanlige rengjøringsmidler. Tørk den tørr. Hold hjulene rene.
- Kontroller at skruer og justeringsspaker er ordentlig dratt til.
- Dersom din rullator ikke er i fullgod stand - ta snarest kontakt med din forhandler.  
Defekt rullator får ikke brukes. Gjør ingen inngrep selv!

**MERK!** Benyttes bare som gåstøtte. Brukerens maksvekt: **DOLOMITE JAZZ** 130 kg.


For inngrep i rullatoren (tilpasninger, mangelfulle reparasjoner), uten **DOLOMITEs** kontroll tas intet ansvar.

### ANVISNING FOR DESTRUKSJON AV PRODUKT OG PAKNING:


Når produktet er forbrukt skal dette med tilbehør og innpakningsmaterialer sorteres på riktig måte. De forskjellige delene kan skilles og håndteres ifølge materialbeskrivelsen.

På etiketten på **DOLOMITE JAZZ** finnes all viktig teknisk informasjon.

- 1: Artikelnummer
- 2: Produktnavn
- 3: Serienummer
- 4: Tillverkningsdato
- 5: Max brukarvikt
- 6: OBS! Se bruksanvisning.
- 7: In- og utomhus rullator.
- 8: Max bredde på rollator.
- 9: Tillverkarens namn.

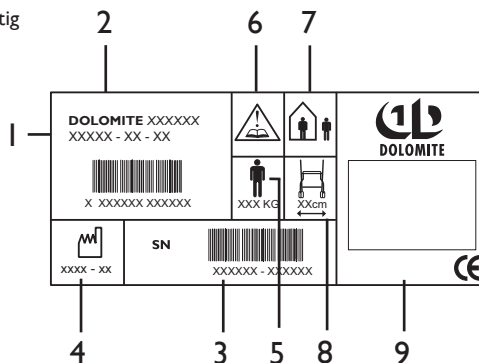

	520	600
A	62 cm	62 cm
B	67-81 cm	75-97 cm
C	39 cm	39 cm
D	43 cm	43 cm
E	52 cm	60 cm
F	67 cm	67 cm
Vekt:	7,2 kg	7,8 kg

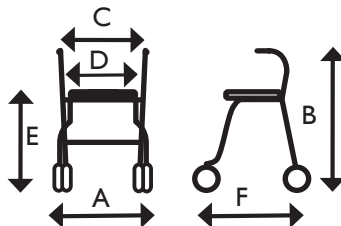

Diameter for- og bakhjul: 20 cm




INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SWEDEN  
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46(0)476 535 99

Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad, N-0603 Oslo  
TEL (47) (0)22 57 95 00, FAX(47) (0)22 57 95 01  
norway@invacare.com, island@invacare.com



## DOLOMITE JAZZ

!   
 Bruk ikke rullatoren som rulle-  
stol eller for persontransport.

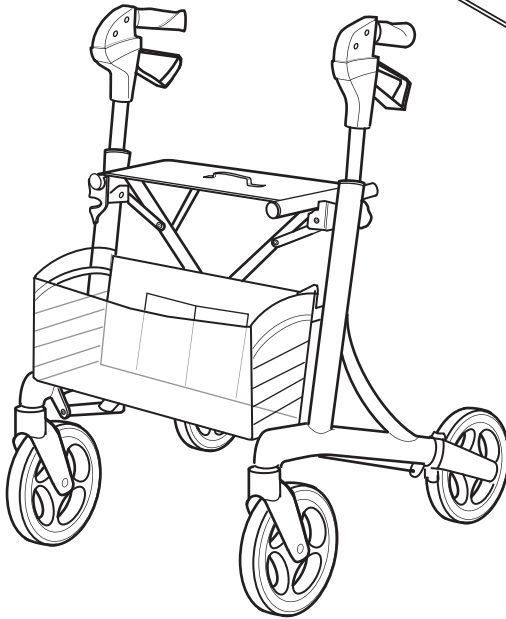

### BRUKSANVISNING

Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk.  
Rullatoren er tilpasset både innen- og utendørsbruk.





## SIKKERHET

- Det er forbudt å stå på rullatoren og å bruke den for persontransport.
- Bruk setet til å sitte på.
- Når du sitter på rullatoren skal begge bremseene være i parkeringsstilling.
- Parkeringsbremsene skal være i bremseposisjon når rullatoren brukes som støtte når man reiser seg f.eks. fra en stol.
- Sitt aldri og rull deg forover med føttene.
- Gå ikke opp eller ned i trapper eller bruk i rulletrapp.
- Vær forsiktig på hellende grunn.
- Rullatoren skal være helt utfelt når du går med den. MERK! Benyttes bare som gåstøtte.
- Vær forsiktig når kurven er tungt lastet. Last er kun beregnet til å transporteres i kurven eller på brettet. Maks last i kurven 5 kg og på brettet 5 kg.
- Fjern beskyttelsesplasten fra hjulene før bruk.
- Kjørehåndtakene må ikke vinkles utover, da dette medfører at rullatorens sidestabilitet forverres.

## MONTERING

- A) Montering av kurv.  
B) Montering av Brett.

## SAMMENFELLING

- C)  
1. Stå ved sidan av rullatoren.  
2. Løft i remmen på setet.  
MERK! Vær forsiktig ved sammen-/utfelling av rullatoren.

## TRANSPORTSTILLING






- D) Fell over sperren for sammenfelt låsing til transportstilling.

## KJØREKLAR STILLING

- E) Fell ut rullatoren ved å trykke på seterørene. Kontroller at nedfellingssperren er i låst stilling før bruk. MERK! Klemfare.

## TRINNHJELP

- F) Bruk trinnhjelpen for å enklere komme opp på f.eks. fortauer.

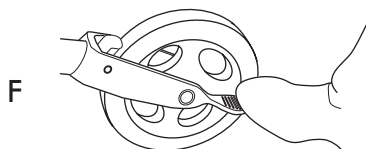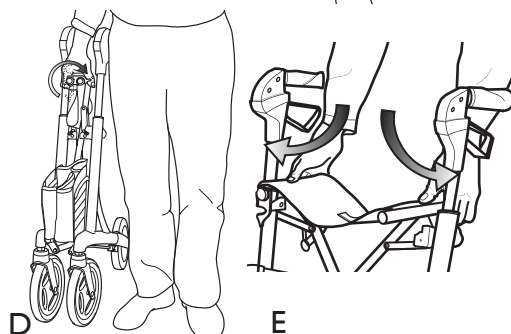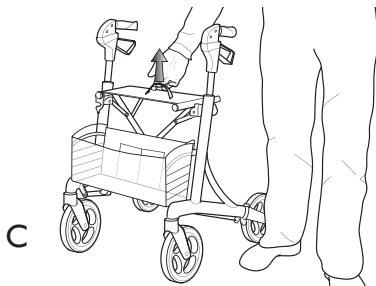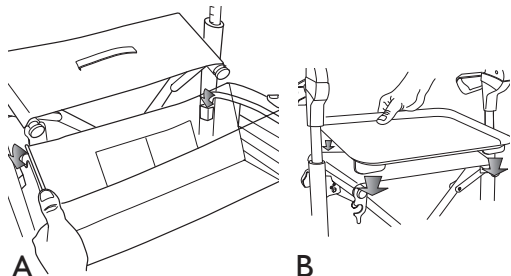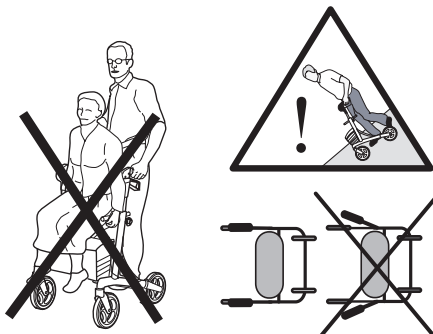

## BREMSER

G. Trekk begge bremsehåndtakene oppover for kjørebremser.

## PARKERINGSBREMSE

H. Trykk bremsehåndtakene mykt nedover for parkeringsstilling. Et tydelig klikk indikerer at bremsen er i riktig stilling. Det er viktig at begge bremsene settes i parkeringsstilling. For å frigjøre bremsen løft bremsehåndtakene oppover. Når du sitter på rullatoren skal begge bremsene være i parkeringsstilling.

## JUSTERING AV BREMSENE

I. Ved dårlig bremses juster bremsewiren. Egnede verktøy er fastnøkler, 7 og 10 mm (medfølger ikke).


## KJØREHÅNDTAK

**For høydejustering av håndtak.**


J. Stå bak rullatoren. Normalt skal håndtakene være plassert i håndleddshøyde.

K. Løsne håndtakrøret ved hjelp av rattet og juster til egnet høyde. Lås håndtakrøret ved hjelp av rattet. Kontroller at begge håndtak er likt innstilt.


G

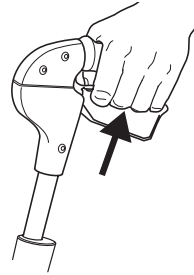


H

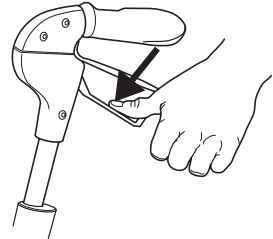

I

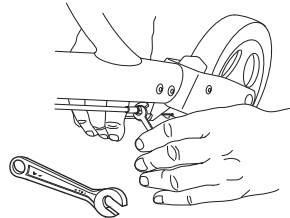

J

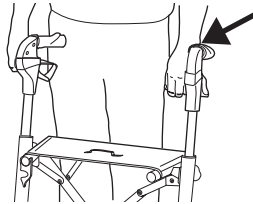

K

