

Bruksanvisning for Caresit, 1 & 2 kammer

Lykke til med din nye Caresit luftpute !

Caresit puten forbygger trykk sår ved at den former seg etter kroppen og fordeler vekten av brukeren på en større flate.

Caresit puten er velegnet til å forebygge trykksår for brukere i lavrisiko gruppen.

Tokammer puten kan foruten trykkavlastning også benyttes til å øke sitte stabiliteten til brukeren.

Caresit puten er ferdig fylt med riktig mengde luft til den enkelte putestørrelse.

Legg Caresit i trekket med den brede kanten mot åpningen. Caresit kan brukes på begge sider. Trekket er elastisk med anti sklistriper på undersiden.

Caresit leveres i følgende størrelser både 1 & 2 kammer:

Størrelse	Vekt
40x40 cm	0,4 kg
45x40 cm	0,5 kg
45x45 cm	0,8 kg
50x45 cm	1,0 kg

Renhold:

Caresit puten:

Normalt renhold: Vask med såpe og vann.

Desinfeksjon av forurenset overflate, blodflekker (hepatitB)

- Hypoklorit	25%	30 min
- Kloramin	5%	30 min
- Virkon (produktnavn)	1 %	30 min

Det anbefales ikke å autoklavere Caresit puten da materialet begynner å smelte ved 120 grader celsius.

Caresit trekket:

Kan maskinvaskes i 90 grader

Desinfeksjon som for Caresit puten.

Teknisk informasjon

Materiale, pute	Myk PVC folie
Materiale, trekk	100% Trevira CS
Fyll	Luft
Brannhemmende	Ja
Risikogruppe	Lavrisiko
Tåler urin	Ja
Tåler kulde	Ja
Tåler varme	Ja
Vasketemperatur	90 grader
Garantiperiode	2 år
Maksimum brukervekt	150 kg

Produsent:
Care Product A/S
Bergkrystallen 25
2818 Gjøvik

Forhandles i Norge av:



Invacare A/S
Grensesvingen 9 – Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Tlf: 22579500
Fax 22579501



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.