

Brukermanual

Invacare® | *Sonnet Basic*




Norsk brukermanual

ID-nr.: 913988

Versjon: 02.09.2002



Dette stabile lese- og arbeidsbordet er utviklet for hjemmepleie sektoren og sykehus. Lese- og arbeidsbordet har flere funksjoner og kvaliteter som er spesielt utviklet for helsevesenet.

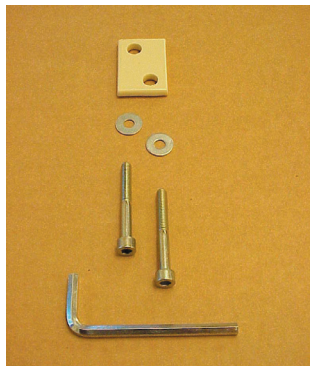

Figur 1

Montering av teleskoprøret ved U-rammen:

Før de to skruene med skiver og avstandsstykket gjennom U-rammen og stram deretter skruene i teleskoprøret. Se figur 1. og figur 2.

Bruk umbrakonøkelen til å justere skruene.

Monter tommeskruen løst.

Monter de fire hjulene på U-rammen med en justerbar skiftenøkkel.



Figur 2

Bordplaten monteres med den øvre delen av teleskoprøret.

Sett sammen teleskoprørets to deler og stram tommeskruen når bordplaten er ved ønskelig høyde.

Se figur 3.




Figur 3

Dytt håndtaket under bordplaten for å løsne den justerbare platen.

Roter bordplaten 180°.

Slipp håndtaket og snu bordplaten til låsepinnen er festet.
Se figur 3.

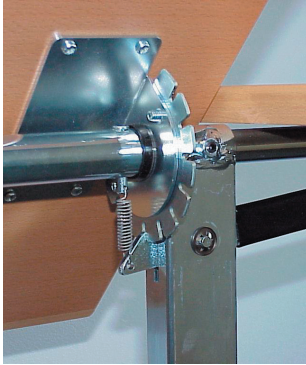

Figur 4

Monter sidebordet ved å føre røret inn i røret over håndtaket. Før røret helt ned og vri til det er i riktig posisjon. Se figur 4.



Figur 5


Vanlige rengjøringsmidler brukes for vask av bordet. Bruk en svamp eller en myk oppvaskkost.

Bruk aldri syrer, baser eller løsemidler som aceton eller cellulosefjerner.

Delene som kan demonteres kan vaskes for hånd og i oppvaskmaskin.

Les- og arbeidsbordet tåler ikke maskinvask.

Bordets bevegelige deler trenger ikke å smøres; de må kun være rene for å fungere tilfredsstillende.

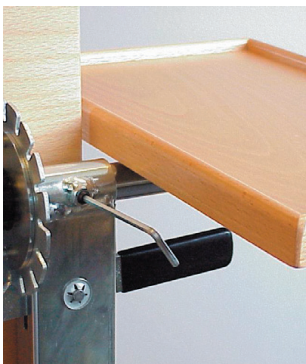

Figur 6

Invacare **Sonnet Basic** må lagres i rom med en luftfuktighet mellom 10- og 80%, og med en temperatur mellom 0 – 50°.

Lagringsrommet må være frostsikkert.

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2015 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

All informasjon er korrekt
ved trykketidspunkt. Invacare
forbeholder retten til å endre
produktspesifikasjoner uten videre
konsultasjon.

Brukermanual Sonnet Basic -
NO - 07/2015



Yes, you can.®