




Ident. no.: 152885
Version: 01 06.2009

Yes, you can.®

Støttehåndtak

Anvendelse:

Ett eller flere støttehåndtak monteres på sengens ramme, så brukeren kan støtte seg til håndtakene under inn og utstigning av sengen. Støttehåndtakene kan ikke erstatte en sidegrind.

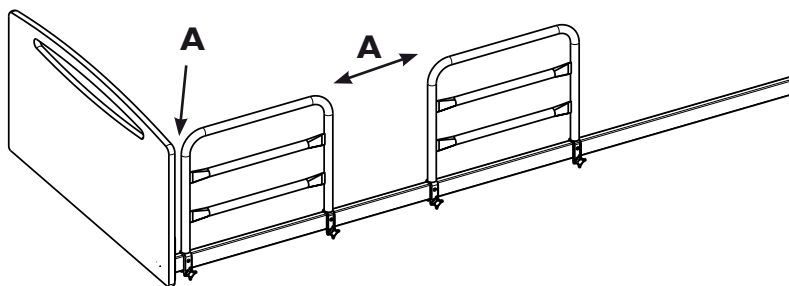

Montering:

De U formede beslag settes ned over sengerammen og fingerskruene svinges ut i hakket og festes. Avstanden A mellom sengegavlen og støttehåndtaket eller mellom to støttehåndtak skal enten være høyst 4 cm eller minst 32 cm. Det er viktig å overholde disse sikkerhetsavstander da der ellers er risiko for at brukeren kan komme i klem med alvorlige skader til følge.



Overhold sikkerhetsavstandene. Hvis støttehåndtaket monteres slik at avstanden til gavlen eller annet støttehåndtak er mellom 4 cm og 32 cm, er det risiko for at brukeren kan komme i klem med alvorlige skader til følge. Spenn festeskrue. Dersom disse ikke er festet kan støttehåndtaket løsne, med risiko for at brukeren faller.



Støttehåndtak er ikke sidegrind og bør ikke benyttes for å holde brukeren i sengen.
Støttehåndtaket bør ikke benyttes sammen med sidegrind da det er risiko for å klemme fingre.

Artikkelnummer	Bredde (cm)	Høyde (cm)
021964	30	25
1417510	80	25
1417511	30	40
021963	50	40
1417512	95	40