


## Demontering av sengen:



Løft opp begge sengebunnene. Fest dem sammen med madrassbøylene.  
Demontering av sengegrind, se siste side.

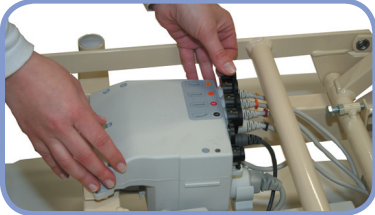


Ved demontering av liggeflate fra understell må liggeflatens motorer fjernes fra styringen. Husk å fjerne låsekammen som sitter over motorkontaktene på styringen.



Demontering av sengegavler: trekk ut hendelen på hver side nederst på sengegavlen. Løft aengegavlene av.



Sengen er nå klar for demontering av liggeflate fra understell.

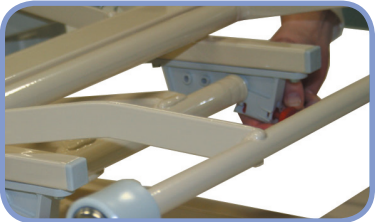

Låsetappene som sitter i fotenden av liggeflatens underside (røde) trekkes ut og vris slik at de blir stående ute.



Liggeflaten kan da løftes opp i fotenden og skyves frem eller tilbake og deretter løftes og fjernes fra understellet.

Dersom liggeflaten må deles; hev sengen slik at sveisepunktene på understellet og løfteenhet står rett overfor hverandre.



Fjern deretter 4 fingerskruer (2 på hver side midt på liggeflatens underside). Liggeflaten kan da trekkes fra hverandre.



Hjulene må låses før demontering. Husk å vri de røde låsetappene.




Liggeflaten kan nå trekkes fra hverandre.



## Montering av sengen:

Ved montering husk å montere motorene i styringen etter merkingen 1 til 1 og 2 til 2 osv, og sett på låsebommen over pluggene. Kablene må ligge via kabelgjennomføringen slik at ingen kabler kommer i klem.

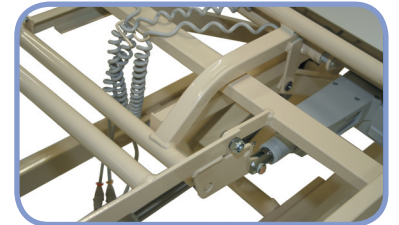

# Bruksanvisning ScanBed 750



## Hvordan håndtere ScanBed 750?

1. Husk alltid å løfte sidegrinden før utløser presses mot midten.
2. All betjening av liggeflaten sitter på håndbetjeningen, se siste side.
3. Ved eventuelle feil sjekk følgende:
  - sjekk støpsel i stikkontakt
  - sjekk at alle ledninger står i styreboksen
  - sjekk at lampe lyser på styreboksen
4. Dersom sengen fortsatt ikke virker - kontakt hjelpemiddelsentralen.
5. Dersom sengen står i en ikke ønsket posisjon og sengen ikke reagerer på håndkontrollen, forsøk en annen håndkontroll fra en annen seng, eller fjern motoren ved å trekke ut pluggen som låser den, sengen blir da flat.  
**Husk:** Dersom brukeren ligger i sengen når motorene fjernes, må det være min. 2 personer tilstede for å holde bruker. Se opp for klemfare!

**Montering av BRITT II og BRITT III sidegrind**  
Kjør sengen opp i ca halv høyde. Fjern tapen ved låsen i hver ende av tregrinden. Monter en ende av gangen. Hold den nederste treribben og metall bøylen opp i gavlskinnen. Låsetappen (på sidegrind en) trykkes inn med fingeren. Sidegrinden føres opp til plasttappen i gavlen kommer ut og forhindrer tresidegrinden å falle ut av gavlen.

**Demontering av BRITT II og BRITT III sidegrind**  
Kjør sengen opp i ca halv høyde. Demonter en ende av gangen. Senk sidegrinden slik at den hviler på låsebolten i glideskinnen. Løft nederste ribbe på sidegrinden slik at låsebolten blir synlig. Trykk plastknappen inn med en nøkkel eller skrutrekker. Senk sidegrinden helt til metallbøylen går klar av gavlskinnen.

Sidegrinden kan også brukes i skrå stilling.



## Teknisk info

Vekt hodeende: 25 kg  
Vekt fotende: 25 kg  
Vekt understell: 46 kg  
Vekt div: 26 kg

## Rengjøring

Tåler ikke høytrykksspyling.  
Bruk alminnelige rengjøringsmidler.

Invacare AS  
Grensesvingen9 - PB 6230, Etterstad  
0603 Oslo  
tlf: 22 57 95 00 - fax: 22 57 95 01  
mail: norway@invacare.com  
www.invacare.com



Yes, you can.