

Invacare® Soft Tilt




FORENKLET BRUKSANVISNING. Les alltid den fullstendige bruksanvisningen.

Av/på-knapp



Restart av systemet (liggeflate til horisontal)

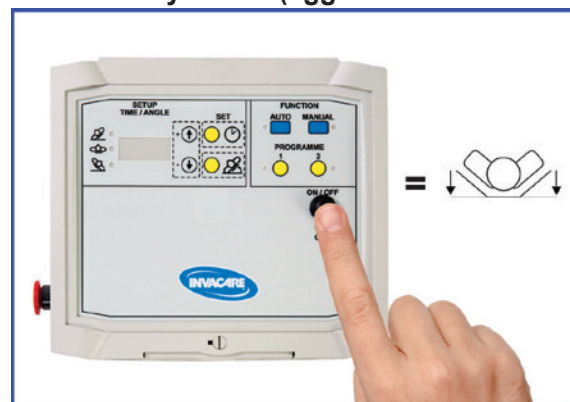

Nødstop-knapp



MANUELL BETJENING - AKTIV BRUK


Til bruk i pleie- og forflytningssituasjoner. Vinkling 0-80°.



AUTOMATISK BRUK




Alle programmer aktiveres ved å trykke på knappen i tre sekunder. Vinkling 0-40°

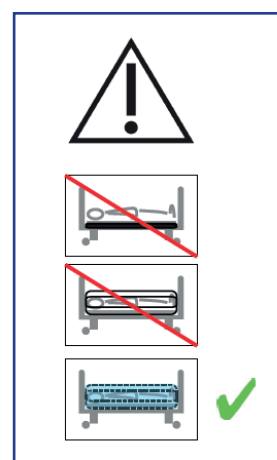

HVORDAN SETTE ET AUTOMATISK PROGRAM PÅ PAUSE

Når P1, P2 eller det fabrikk-innstilte programmet er aktivert kan det settes på pause, og man kan da bruke håndkontrollen slik som i manuell modus.

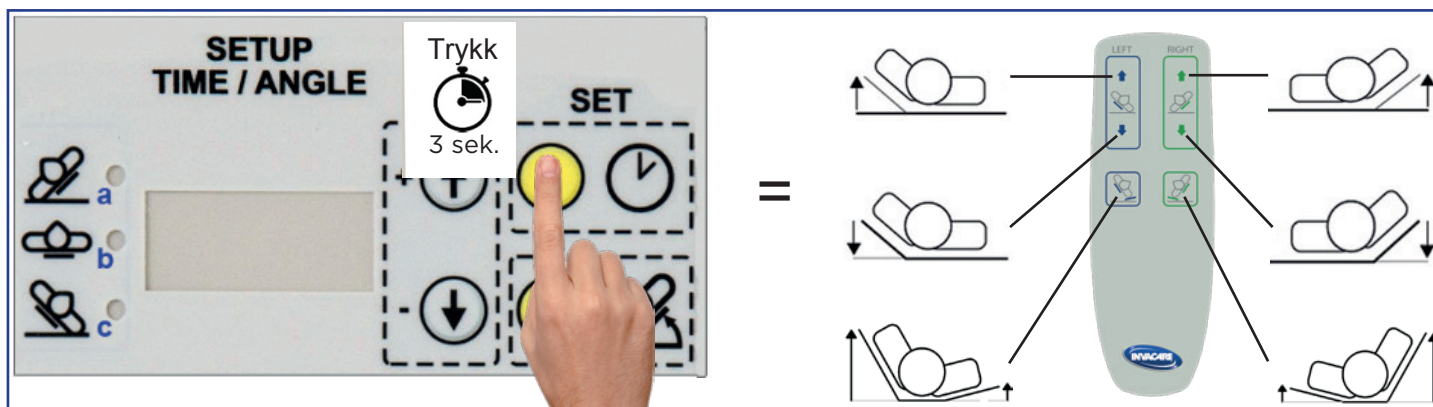


OBS

Programmet som var aktivt før bruk av pause-knappen vil automatisk aktiveres etter 20 minutters inaktivitet.

HVORDAN STARTE PROGRAMMET SOM VAR AKTIVT FØR PAUSEN

Programmet som var aktivt før bruk av pause-knappen kan aktiveres ved å trykke inn pause-knappen på nytt.

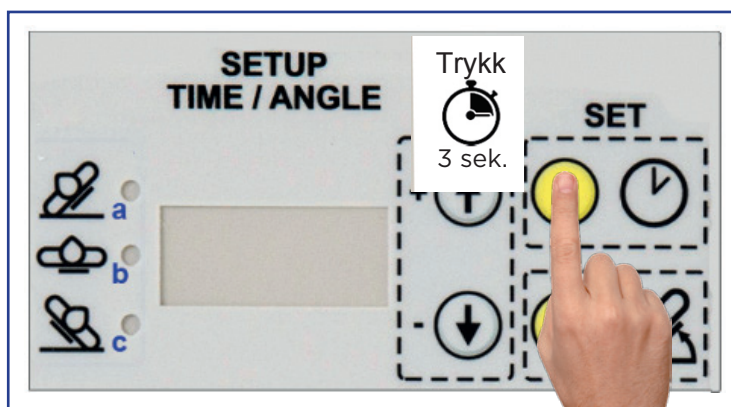

IVCMA755220519 / 2019-05-22



GDV Technology A/S
Værkstedsgården 15, st. th.
2620 Albertslund
Denmark



Yes you can®.