

Invacare® EC-Track™

no Sjekklister for sikkerhetskontroll



Denne bruksanvisning skal overleveres til sluttbrukeren.
FØR du bruker dette produktet, MÅ du lese denne bruksanvisning og oppbevare den til senere referanse.



Yes, you can.®

Installasjonssjekkliste | EC-Track-system, Gantry og Robin

Skinnesystemet og/eller løfteren er kontrollert og testet for følgende i henhold til **instruksjons-/installasjonshåndboken**:

Er EC-Track på installasjonen?

Ja (Fullfør følgende seksjon).


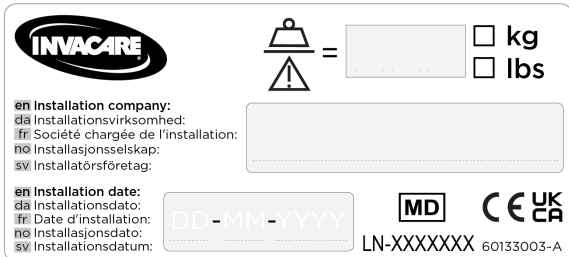
Invacare EC-Track-systemets installasjonsetikett viser følgende informasjon:			
Maksimal SWL		Installasjonsdato	
Etikettnummer (LN)			

Type installasjon

Type spormontering	<input type="checkbox"/> Rett(e)/ bøyd(e) skinne(r)	<input type="checkbox"/> Tverrdrift (X-Y-system)	<input type="checkbox"/> Rom-til-rom
Romtype	<input type="checkbox"/> Soverom	<input type="checkbox"/> Baderom	<input type="checkbox"/> Stue
Feste	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Vegg	<input type="checkbox"/> Gulv til tak (veggstolpe)
Forsterkninger	<input type="checkbox"/> Nr	Ja, utført av: <input type="checkbox"/> Installatør <input type="checkbox"/> En annen leverandør: _____	

Nei (Fortsett **2. Kontrollpunkter | Robin** og pass på å sjekke sporprodusentens **instruksjons-/installasjonshåndbok**).


1. Kontrollpunkter EC-Track og Gantry	✓	✗	Kommentarer
1.1 Alle nødvendige forsterkninger er godt festet (hvis aktuelt).			
1.2 Skinnesystemkomponentene velges og monteres i henhold til installasjonshåndboken .			
1.3 Brakettene er plassert under den nominelle maksimale avstanden. Hvis systemet er Gantryen, er stolpene plassert under deres angitte maksimale avstand.			
1.4 Alle braketter er strammet ordentlig til taket/veggen.			
1.5 Braketten til skinnefestene er godt festet. Hvis systemet er Gantryen er alle tilkoblingene godt festet.			
1.6 Alle skinneendene er utstyrt med endestopper, tilstrekkelig strammet og har endedeksler (hvis aktuelt).			
1.7 Skinnene er rene og fri for spon og annet avfall fra installasjonen.			
1.8 Vognen (og, hvis aktuelt, tverrgående vogner) går jevnt og lydløst i hele sporsystemet.			
1.9 Juster friksjonsbremsen på vognen om nødvendig.			
1.10 Kontroller monteringsfestene til løpekatten for sidelengs flytting.			
Transittkobling/Sporbryter (hvis aktuelt)			
1.11 Låsefester er alle OK (sikret til sporing, hver gripedel beveger seg uavhengig, korrekt justert med sporene, ingen hindringer som kan forhindre riktig funksjon, sikkerhetsplaten er montert).			
1.12 Kontroller sporingsjustering. Juster på nytt ved behov.			
1.13 Mellomrom mellom spor og transittkobling/sporbryter er maks. 3 mm.			
1.14 Funksjonen til transittkoblingen/låsefestet (10 ganger: deaktiver venstre/høyre gripedel x 5).			
1.15 Funksjonstest utført under belastning gjennom sporbryteren på systemet (5 sykluser med maksimalt SWL).			
1.16 Innleggsplaten er montert (L- og M-skinne).			
Belastningstest			

1. Kontrollpunkter EC-Track og Gantry	✓	✗	Kommentarer		
1.17 Kontroller om skinneresystemet er nivellert (før testing av skinneresystemet).					
1.18 Skinnen skal nå lastes med 300 kg – 1,5 × maksimum SWL (200 kg) – i 20 minutter.  Lasten må henges opp under hvert festepunkt i 20 minutter.			ISO 10535		
1.19 Skinneresystemet forblir på samme høyde etter belastningstesten.					
1.20 Skinneresystemet forblir nivellert etter belastningstesten.					
1.21 Skinneresystemet har blitt markert med installasjonsetiketten som viser maksimum SWL (200 kg), installasjonsdato og installasjonsfirma.					
1.22 Fyll ut de nødvendige feltene på installasjonsetiketten og plasser den på sporet. Dekk den med det beskyttende laminatet. 					
1.23 Fest en etikett med datoen for neste inspeksjon (MM-ÅÅÅÅ) på sporene. Etiketteksempel: <table border="1" data-bbox="89 958 975 1048"> <tr> <td>Dato for neste inspeksjon</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Dato for neste inspeksjon				
Dato for neste inspeksjon					

Er Robin-løfteren montert på EC-Track?

Ja (Fullfør følgende seksjon).


Nei (hopp til **3. Siste trinn**-seksjon og pass på å sjekke sporprodusentens **instruksjons-/installasjonshåndbok**).

2. Kontrollpunkter Robin	✓	✗	Kommentarer
2.1 Robin-løfterens serienummer (skriv det på kommentardelen).			
2.2 Løfteren er markert med maksimalt SWL (200 kg).			
2.3 Opp-brytere fungerer som de skal.			
2.4 Ned-brytere fungerer som de skal. Funksjonen for å løsne stropper fungerer som den skal. Kontroller justeringen hvis den ikke fungerer			
2.5 Endestopp fungerer som det skal. Kontroller justeringen hvis den ikke fungerer.			
2.6 Nødstopp og tilbakestillingen fungerer som de skal.			
2.7 Nødsenkingsfunksjonen og tilbakestillingen fungerer som de skal.			
2.8 Nødstoppbryteren på nødssenkingsenden fungerer som den skal.			
2.9 Full lengde på stropper (bånd) har ingen tegn på slitasje, frynser og/eller løse sting.			
2.10 Kroker og krokfester har ikke tegn på slitasje/skade som kan sette personløftet i fare.			
2.11 Håndkontrollen er koblet til som det skal.			
2.12 Håndkontrollen fungerer som den skal og er i god stand.			
2.13 Kontroller opphengs- og kryssbolten.			
2.14 Utfør en full løftesyklus med maksimalt SWL (200 kg).  Må være uanstrengt og uten skurrende lyd.			

3. Siste trinn	✓	✗	Kommentarer
3.1 Eieren har alle nødvendige bruksanvisninger .			
3.2 Installasjonsavfall har blitt samlet og deponert på forsvarlig måte.			

Installasjon utført av:

Enhet som er ansvarlig for systemet: (f.eks. leverandør, teknisk hjelpesenter, Invacare osv.).	
Navn på installasjonsfirma:	
Installatørens navn [blokkbokstaver]:	
Installatørens underskrift og dato:	

-  **To** signerte kopier av denne installasjonssjekklisten må fylles ut. En til installasjonsfirmaet og en til produsenten (Invacare). Vennligst send en kopi (skannet dokument, PDF eller leselig fotografi) til ectrackinst@invacare.com med følgende navnekode: «**installatørselskapets navn**» + «**ettikettnummer**» + «**installasjonsdato**»,
f.eks.: «**Invacare LN0000001 18-Okt-2022**».

**Belgium & Luxemburg:**

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

United Kingdom & Ireland:

Invacare Limited
Pencoed Technology Park,
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 200
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Norge:

Besøksadresse:
(Office addresses)
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Tel: (47) 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

France:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Norge:

Vareleveringsadresse:
(Storage / Technical dep)
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo
teknisk@invacare.com
www.invacare.no

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,
Via dei Pini 62,
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
servizioclienti@invacare.com
www.invacare.it

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se



Invacare Portugal, Lda
Rua Estrada Velha 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology
Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

