

INVACARE SOFT TILT 3

QUICK GUIDE




- ⚠ Soft Tilt 3 er utviklet for SB755, NordBed Ultra og NordBed Optimo i bredde 85 cm og 90 cm.
- ⚠ Soft Tilt 3 skal kun betjenes av opplært personell som har fått nødvendig opplæring i bruken.
- ⚠ Brukerens opplevelse skal alltid tas i betraktning ved bruk av Soft Tilt 3.
- 👤 Før bruk av Soft Tilt 3 skal bruksanvisningen leses nøye, og sikkerhetsinstruksjonene skal følges.



GENERELL INFORMASJON: STYREBOKS


SLÅ PÅ Trykk og hold ON/OFF-knappen i 3 sekunder = Displayet slår seg på og viser 3 linjer.	
SLÅ AV Nullstill systemet. Trykk deretter og hold ON/OFF-knappen i 3 sekunder = Systemet og displayet slår seg av.	
RESET Trykk én gang på ON/OFF-knappen = Systemet går til flat posisjon, og displayet viser 3 linjer.	
NØDSTANS Trykk på Nødstop = Posisjonen stoppes. Slipp Nødstop-knappen og trykk én gang på ON/OFF-knappen = Systemet går til flat posisjon og displayet viser 3 linjer.	

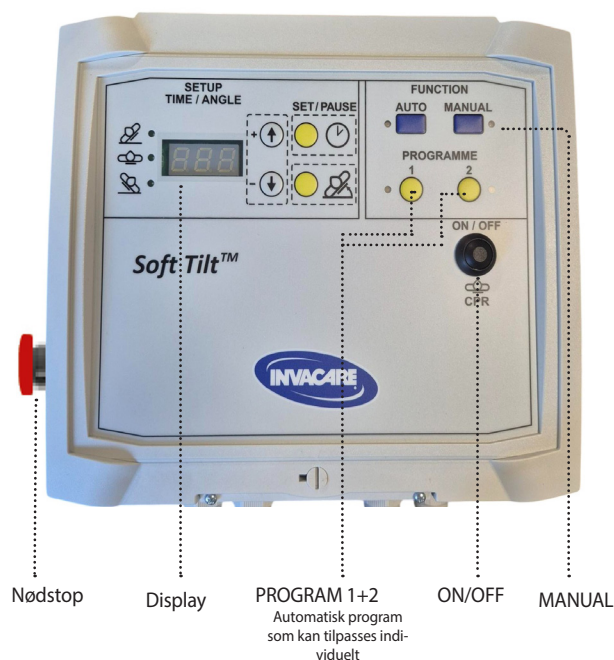

MANUELL BRUK: HÅNDKONTROLL

AKTIVER Trykk og hold MANUAL-knappen i 3 sekunder = Grønt lys tennes og displayet viser 2x0.	
DEAKTIVER Trykk én gang på ON/OFF-knappen = Systemet går til flat posisjon, slår seg av, og displayet viser 3 linjer.	

Merk! Under drift kan vinkelen leses av på displayet i styreenheten.

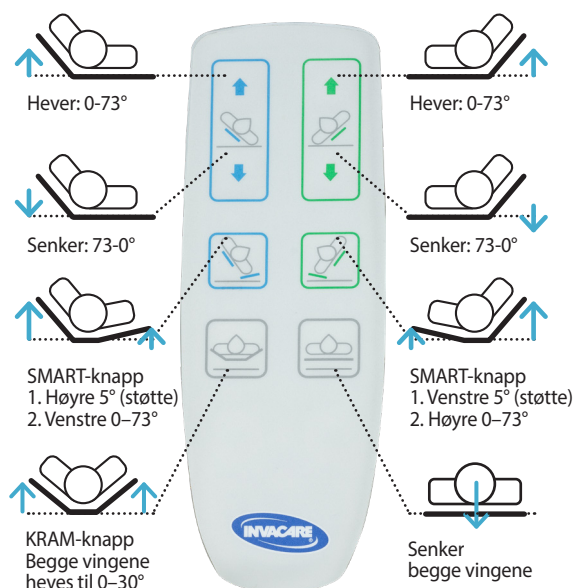

+ KRAM OG VUGGE

Ved å heve begge vingene samtidig kan du oppnå en beroligende kram- og vuggestilling

Trykk på den grønt merkede knappen for å heve begge vingene samtidig. Trykk på den gule knappen for å senke begge vingene samtidig og forbli i manuell modus.



Funksjonen skal KUN brukes av opplært personell



Det er fare for klemskader dersom begge vingene heves samtidig.



+ SMART-KNAPP FOR FORFLYTNING OG HÅNDTERING

Bruk SMART-knappen ved forflytning og håndtering fra flat posisjon til én side eller fra side til side. Heving utføres med støtte fra motsatt side.



Brukerens opplevelse skal alltid tas i betraktning ved bruk av Soft Tilt 3.


AUTOMATISK BRUK: STYREBOKS

Systemet kan settes til å kjøre automatisk ved bruk av den forhåndsprogrammerte blå AUTO-knappen eller de gule programmerbare knappene PROGRAM 1 (P1) eller PROGRAM 2 (P2).

Funksjon AUTO: Fabrikkinnstilt program. Kan ikke endres. Utfører reposisjonering hvert halve time uten støtte.

PROGRAM 1 (P1): Tom ved levering. Kan programmeres individuelt av spesielt opplært personell.


PROGRAM 2 (P2): Tom ved levering. Kan programmeres individuelt av spesielt opplært personell.

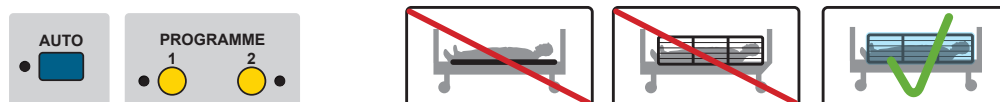

START AV INDIVIDUELT INNSTILT AUTOMATPROGRAM (P1/P2)

Trykk og hold P1- eller P2-knappen i 3 sekunder = Dioden tennes, og det valgte programmet starter og vises i displayet


Eksempel på start av P1:

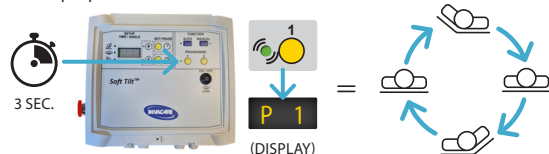

Merk! Når programmet har startet, kan antall minutter til neste reposisjonering leses av på displayet.


STOPP INDIVIDUELT INNSTILT AUTOMATPROGRAM (P1 / P2)

Trykk én gang på PÅ/AV-knappen = Programmet stopper, og begge vingene går til flat posisjon.

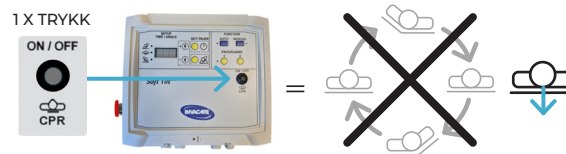

II PAUSEFUNKSJON


Trykk og hold den gule SET-knappen i 3 sekunder = Programmet settes på pause, vingene går til flat posisjon, og manuell modus aktiveres.

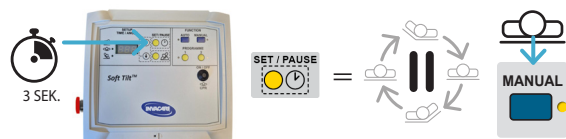

I pausefunksjon vil Soft Tilt 3 automatisk starte det aktiverte programmet igjen etter 30 minutters inaktivitet.

START PÅ NYTT AV AUTOPROGRAM

Bytt fra pausefunksjon tilbake til automatisk program: Trykk og hold den gule SET-knappen i 3 sekunder = Programmet starter igjen.

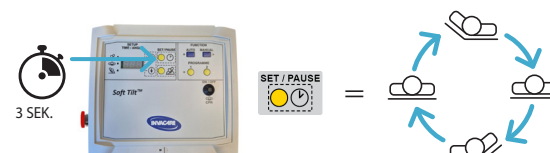

Invacare A/S
Sdr Ringvej 37,
2605 Brøndby
Danmark



Careturner A/S
Silovej 16
2690 Karlslunde,
Denmark