

Turn MASTER[®]

The ORIGINAL Scandinavian Slide and Turn System



PAT.PEND/BA 201100001/Europapatent

Art. nr. 39010
Turn MASTER Classic
Dreieskive Small
Størrelse: Diam 40 cm
Antall håndtak: 0

Art. nr. 39011
Turn MASTER Classic
Dreieskive Medium
Størrelse: Diam 50 cm
Antall håndtak: 0

Turn MASTER[®] Classic



Art. nr. 39012
Turn MASTER Classic
Dreieskive Large
Størrelse: Diam 60 cm
Antall håndtak: 0

Art. nr. 45925
Turn MASTER Classic
Dreieskive X-large
Størrelse: Diam 70 cm
Antall håndtak: 0

Art. nr. 45926
Turn MASTER Classic
Dreieskive XX-large
Størrelse: Diam 80 cm
Antall håndtak: 0

Art. nr. 55563
Turn MASTER Multi
Dreieskive X-small
Størrelse: Diam 60 cm
Antall håndtak: 2

Art. nr. 54608
Turn MASTER Multi
Dreieskive Small Plus
Størrelse: Diam 45 cm
Antall håndtak: 2

Art. nr. 55564
Turn MASTER Multi
Dreieskive Medium
Størrelse: Diam 50 cm
Antall håndtak: 3

Turn MASTER[®] Multi




Art. nr. 55565
Turn MASTER Multi
Dreieskive Large
Størrelse: Diam 60 cm
Antall håndtak: 3

Art. nr. 55566
Turn MASTER Multi
Dreieskive X-large
Størrelse: Diam 70 cm
Antall håndtak: 3

Art. nr. 55567
Turn MASTER Multi
Dreieskive XX-large
Størrelse: Diam 80 cm
Antall håndtak: 3

Når mobiliteten forringes ...

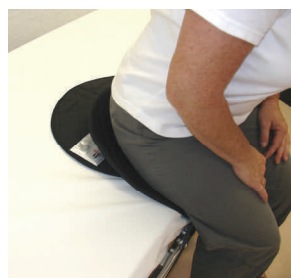

... forbedrer vi livskvaliteten !




Turn MASTER®

The ORIGINAL Scandinavian Slide and Turn System




BRUKERVEILEDNING

A. Turn MASTER® (Dreie på stolesete)

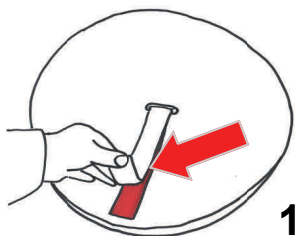

1

Stram stroppen til på baksiden slik at Turn MASTER® kun kan rotere. Ta i dette tilfelle ikke hensyn til, hvilken vei etiketten "Denne side opp og inn mot Rygg/Hoveddel" vender.

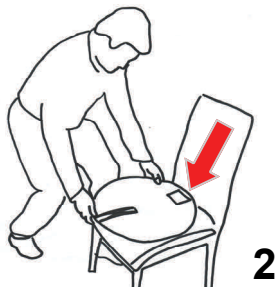

2


Plaser Turn MASTER® på stolen med den sklisikre glidedel nederst og glidedelen med det sorte nettet øverst.



3


Sett deg ned på Turn MASTER® du kan nå rotere rundt på stolesetet.

B. Turn MASTER® (Dreie inn i seng)

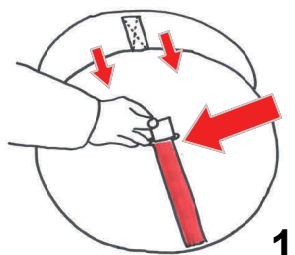


1

Senk sengen så langt ned den kan komme. Åpne borrelåsen på baksiden av Turn MASTER®. Trekk den nederste glidedel ut til ønsket punkt og lås igjen borrelåsen.

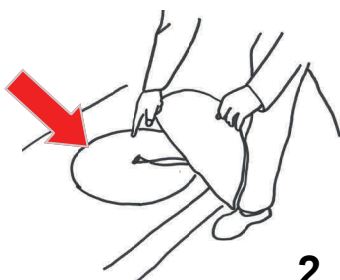

2

Plaser den nederste glidedel i midten av sengen.

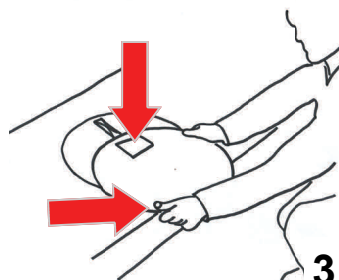


3

Flytt den øverste glidedelen ut mot kanten av sengen. Etiketten "Denne side opp og inn mot Rygg/Hoveddel" peker nå inn mot midten av sengen.

ADVARSEL




Sørg for at sengen er lav og unngå at bruker sitter for langt ute på sengekanten ved bruk av Turn MASTER®. Dette for at unngå fallulykker med alvorlige personskader til følge.

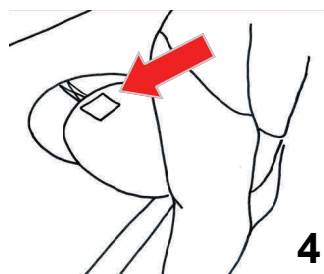

4

Bruker plasseres på Turn MASTER® med bakpartiet mot etiketten "Denne side opp og inn mot Rygg/Hoveddel".

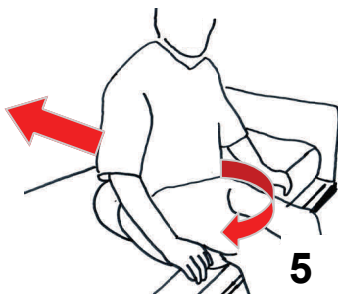

5

Bruker glir seg nå tilbake ved egen hjelp inn mot midten av sengen, roterer og svinger benpartiet inn i sengen og glir på plass i ønsket posisjon.



6

Brukes Turn MASTER® "Multi" kan en helper flytte med, ved å gripe i håndtaket i bakkant på undersiden av den øverste glidedel, mens den andre helperen flytter brukers ben.


Turn MASTER[®]

The ORIGINAL Scandinavian Slide and Turn System




BRUKERVEILEDNING

D. Turn MASTER[®] (Fjerne Turn MASTER[®] i seng)

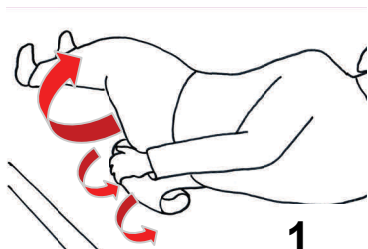


1

Bruker ruller seg til den ene siden. Griper i begge glidedele på Turn MASTER[®] og ruller denne 2 ganger ned og inn mot kroppen sin.

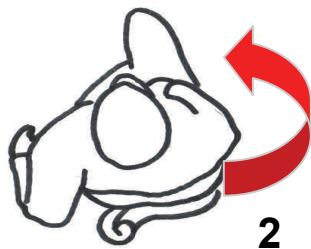

2


Bruker ruller deretter sin kropp til motsatte side dvs. over den sammenrullede Turn MASTER[®].

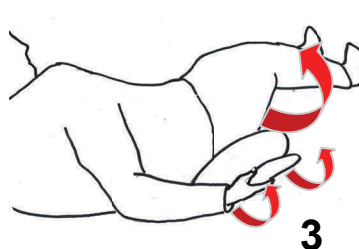

3


Bruker griper i den nederste delen av Turn MASTER[®], folder den ut og trekker den bort.

E. Turn MASTER[®] (Dreie inn og ut av bilsete)

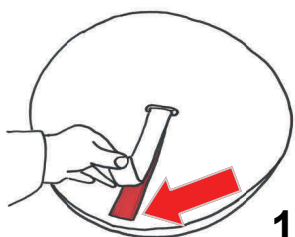


1

Ønsker du at Turn MASTER[®] kun skal rotere, må borrelåsen på undersiden av den sklisikre glidedel være låst helt ut til kanten av dreiepudden

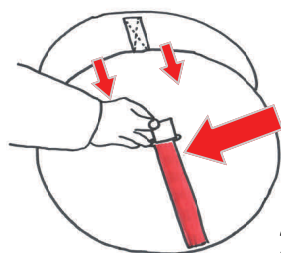


2

Ønsker du, at Turn MASTER[®] skal flytte bakpartiet fra bilsetets kant inn i midten og mot seteryggen, skal du løsne borrelåsen og justere dette etter behov.

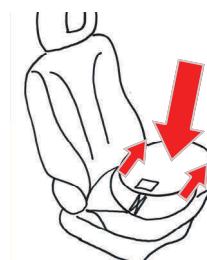

3

Turn MASTER[®] plasseres nå på bilsetet med den sklisikre glidedel nederst. Den øverste glidedel med det sorte nettet, føres ut mot kanten av setet.

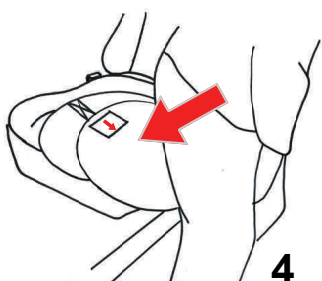


4

Still deg inn i døråningen mot bilsetet. Sett deg på Turn MASTER[®]. Den hvite etiketten med påskriften "Denne side opp og inn mot Rygg/Hoveddel" skal peke med inn mot ditt bakparti.




5

Du kan nå gli inn og tilbake i midten av setet.

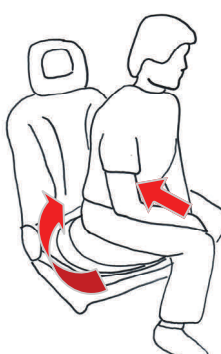

6

Roter og gli bakparten inn mot seteryggen. Dvs. at du glir deg med Turn MASTER[®] på plass i seret.

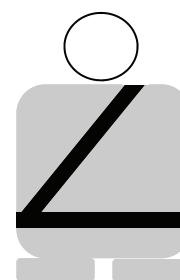

ADVARSEL

Man **SKAL** alltid bruke sikkerhetsbelte, når man kjører med Turn MASTER[®].

Turn MASTER[®]

The ORIGINAL Scandinavian Slide and Turn System



Beskrivelse av de forskjellige modeller

(1) Turn MASTER[®] Classic

Består av en regulerbar dreiepude med overflate av et spesialfremstilt nett med cellestruktur. Dette gjør at dreieskiven ikke folder seg og er luftventilerende. Den nederste glidedel har et sklissikkert belegg slik at den ligger stabilt mot ethvert underlag. De to glidedele er forbundet med hverandre ved en sele i midten som kan reguleres etter behov på undersiden av den nederste glidedelen. Dette muliggjør rotasjon og forflytning i tråd med et naturlig bevegelsesmønster.

(2) Turn MASTER[®] Multi

Består av en regulerbar dreiepude med overflate av spesialfremstilt nett med cellestruktur og 3 håndtak. Dette gjør at dreieskiven ikke folder seg og er luftventilerende. Videre har den øverste glidedelen 3 håndtak. Derfor kan hjelper hjelpe til med forflytning for å avlaste bruker. De to glidedele er forbundet med hverandre ved en sele i midten som kan reguleres etter behov på undersiden av den nederste glidedel. Dette muliggjør rotasjon og forflytning i tråd med et naturlig bevegelsesmønster.

Vaskeanvisning

Turn MASTER kan vaskes ved 80 grader C.



Der må ikke brukes skyllemiddel, da dette forringes glideeffekten

Max. Brukervekt


Personvekt: 160 kg



ADVARSEL

Dette hjelpemiddelet må ikke forveksles med sikkerhetssele i en bil. Husk derfor alltid å bruke sikkerhetssele når man kjører med Turn MASTER[®].

Sørg for at Turn MASTER ikke glir på sengens kant. Dette for å unngå fallulykker med alvorlige personskader til følge.

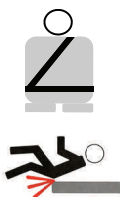

VIKTIG

Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjelpemiddelet er intakt ved å jevnlig etterse sømmer. Hvis dette hjelpemiddelet har en kritisk slitage eller på annet vis er skadet, må det ikke benyttes. Er du i tvil om bruken av dette hjelpemiddelet skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

Ved feil eller uhensiktsmessig bruk av dette hjelpemiddelet, fraskrives ethvert ansvar for Ulykker, som medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse

Turn MASTER[®] består av en regulerbar dreie- og glidepude til bruk for personer som ønsker avlastning ved dreining på stolesete, inn og ut av seng, inn eller ut av bilsete mm.

For at Turn MASTER[®] ikke skal bli for varm å sitte på over lengere tid eller folde seg under bruker, leveres den øverste glidedel av et spesialfremstilt nett med cellestruktur.

Turn MASTER[®] er unik ved at den roterer som en generell dreieskive og kan videre reguleres f.eks. hvis man har behov for at flytte setepartiet sideveis. Model "Multi" har videre 2 eller 3 håndtag, som hjelper kan ta tak i for å avlaste bruker.

Norge:

Arcus Vita As
Pb 213
5591 Etne

*Arcus
Vita as*

Tlf. 53 75 77 50
Epost: post@arcus-vita.no
www.arcus-vita.no



Master CARE
Sofienlystvej 3
DK-8340 Malling
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
E-mail: info@master-care.dk
Web: www.master-care.dk