



OBS! Läs följande anvisningar noga före montering.

Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information som måste överlämnas till brukaren vid leverans.

Innan selens placering fastställs ska du se till att brukaren sitter i en korrekt position med rumpan så långt bak på sitsen som möjligt.

TRANSPORT I FORDON

Invacares selar är endast konstruerade för att stödja kroppens position och bör inte användas för att hålla en passagerare på plats under transport. Ett separat bälte till brukaren ska alltid användas. Se avsnittet om transport i rullstolens bruksanvisning.

UNDERHÅLL

Före varje användning:

Leta efter sprucket tyg/sömmar samt lösa eller slitna skruvar.

Vartannat år:

Kontrollera att selen inte har lösa eller slitna infästningar och att momentinställningarna kontrolleras av en kvalificerad person. Kontrollerna bör ske oftare om brukaren är tyngre, då det kan medföra större belastning.

Denna produkts förväntade livslängd är 30 månader.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Invacares selar är endast konstruerade för att stödja kroppens position och bör inte användas för att hålla en passagerare på plats under transport. Se avsnitt 2 ovan om "Transport i fordon".

UTBILDNING

Om du av någon anledning behöver ytterligare utbildning för montering av denna product ber vi dig att kontakta oss på något av numren nedan, där du erbjuds rådgivning och support.

KOMPATIBILITET

Invacares selar är konstruerade för att användas tillsammans med Reas komfortullstolssortiment.



KVALITET

Vi förbehåller oss rätten att ändra konstruktioner utan att meddela detta i förväg, för att kunna infria vår policy om ständig förbättring. Alla rättigheter reserverade.

RENGÖRING OCH VÅRD

Selarna i detta sortiment kan rengöras med ett neutralt rengöringsmedel (t.ex. varmt tvålsvatten) och/eller våtservetter för engångsbruk. De nylontäckta neoprendynorna kan enkelt lossas och tvättas i maskin vid 60°C. Låt dem lufttorka. Torktumling är inte lämplig. Läs tvättinstruktionen på etiketten.

Monteringsbeslagen kan rengöras med vanliga hushållsrengöringsmedel och en mjuk trasa.

Be den infektionsansvarige personen på din arbetsplats om råd om produkten skulle bli smittad.

Förvaras torrt.



VARNING!



- Se till att selens mellersta del (omkring kragen) inte placeras ovanför halsgropen (bröstbenets övre del) eftersom det innebär risk för kvävning.

SÄKERHET

- Bröstselar är endast konstruerade för att stödja kroppens position och bör inte användas som fastspänningsselar eller för att hålla en passagerare på plats under transport. Ett separat bälte till brukaren ska alltid användas.
- Selen ska placeras över bröstbenet och inte runt halsen. Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan hals och sele för att minska risken för kvävning.
- Ska alltid användas tillsammans med ett korrekt fastspänt bäckenbälte och ryggstöd, så att bäckenet har ett bra stöd och brukaren inte glider ner för sitsen och kvävs av selen.
- När selens remmar ska fästas måste du vara uppmärksam och undvika rörliga delar samt vassa eller ojämna kanter.



Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning

A

Sternum sele
Antal: 1

Storlek	Art.nr.
Medium	1525276
Large	1525277

B

Dynamic sele
Antal: 1

Storlek	Art.nr.
Small	1525278
Medium	1525279
Large	1525280

C

Shoulder sele
Antal: 1

Storlek	Art.nr.
Small	1525273
Medium	1525274
Large	1525275

D

Y-style sele
Antal: 1

Storlek	Art.nr.
Small	1525281
Medium	1525282
Large	1525283

E

**Dynamic
bröstbälte**
Antal: 1

Storlek	Art.nr.
Medium	1525284
Large	1525285

F

Monteringssats
Antal: 2

Storlek	Art.nr.
19 mm	1525288
22 mm	1525288
25 mm	1525288

G

**Flo-tech PT
Monterings-
skruvar**
Antal: 2

H

Monteringsfästen
Antal: Par

MONTERINGSANVISNING

STEG 1 — Packa upp selen och övriga komponenter ur förpackningen

STEG 2 — Kontakta leverantören om produkten levereras i oönskat skick.

STEG 3 — Passa in hålen i selens övre spännen med de tre spåren (se bild 1) med skruvar som fäster L-konsolen i den bakre kragen (se bild 2).

STEG 4 — Infästning kan också göras i rullstolens ram med hjälp av universalklämmorna, som passar runda rörarmar med 19 mm, 22 mm och 25 mm tjocklek (se bild 3). Detta rekommenderas för infästning av de undre remmarna.

Det rekommenderas att alla skruvar dras åt till 8,5 Nm.

Remledarna (H) är tillbehör och monteras över den bakre kragens L-konsol med hjälp av skruvarna (G).

Justering av remmarna

STEG 5 – Dra åt eller släpp ut remändarna för att justera selens position. Se till att selen sitter ordentligt och är åtdragen (se bild 4). Montera alltid selen tillsammans med ett positioneringsbälte.

Bild 1



Bild 2



Bild 3



ANVISNINGAR FÖR AVTAGNING

Selen kan enkelt tas av och återmonteras.


Alla remmar har ett snabbspänne för att lossa selen från stolen (se bild 4). Lossa selen genom att släppa de övre spännena med ett finger eller tummen. Släpp sedan ett av de undre spännena så att brukaren kan komma loss (se bild 5). Släpp alla fyra spännena för att plocka bort selen helt.

Utför instruktionerna ovan i omvänd ordning för att montera selen igen.

Bild 4



Bild 5

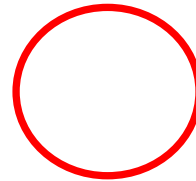

GARANTI

Flo-tech PT-selarna har en garanti på 12 månader.