

Soft Tilt™ 2.0



Innovativt vendesystem – verdifull støtte ved forflytning og posisjonering



Invacare **Soft Tilt 2.0** er et unikt, innovativt vendesystem utviklet for automatisk vending og reposisjonering av bruker, samt for å hjelpe pleiepersonalet ved daglig stell av bruker.

Soft Tilt 2.0 er enkel å montere på sengene **SB755**, **NordBed** og **SB 910**. Den beveger seg smidig sammen med sengens bevegelige deler og madrassen.

- ▶ Automatisert trykkavlastning som forebygger trykksår
- ▶ Forenkler pleiarbeidet, ideelt for pleiere som jobber alene
- ▶ Økt komfort for bruker og pleier



Automatisert og manuell trykkavlastning og forflytning

Soft Tilt 2.0 består av to vinger som monteres langs pleiesengens liggeflate. Hevingen av vingene gjøres enten manuelt ved bruk av håndkontroll eller et automatisert program. Ved behov for automatisert og kontinuerlig trykkavlastning brukes en programmerbar kontrollboks. **Soft Tilt 2.0** kan programmeres til å automatisk heve pasienten i ulike intervaller og vinkler.


Forenkler pleiarbeidet

Soft Tilt 2.0 kan betjenes av én pleier alene. Ved hjelp av håndkontrollen kan vingene heves opptil 80°. Dette gjør det enkelt å komme til med forflytningshjelpemidler, sette på seil eller slynge, og utføre personlig pleie.

Soft Tilt 2.0 kan også brukes til å gi støtte ved inn- og utstigning av sengen. Dette beskytter pleieren mot potensielle belastningsskader i ryggen.

Komfort og sansestimulering

Soft Tilt 2.0 har utomatiserte bevegelser som er svært stille og smidige. Beveggelsene er sansestimulerende og gir en beroligende effekt. Dette gjør at **Soft Tilt 2.0** bidrar til en behagelig og uforstyrret søvn. Ved automatisk innstilling kan vingene heves til maks. 40°, slik at brukerens sikkerhet og komfort ivaretas.

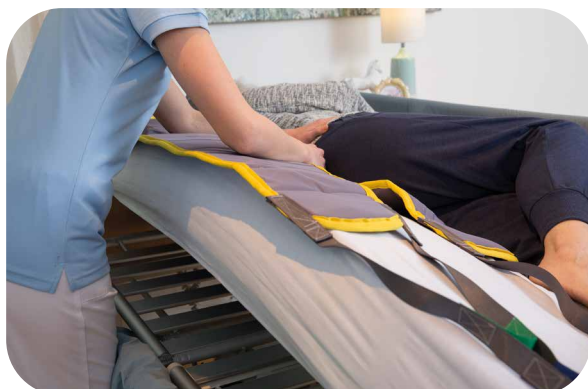

Egenskaper og tilbehør



▲ Følger liggeflatens bevegelser

Soft Tilt 2.0 er enkel å montere og følger liggeflatens bevegelse på en svært smidig måte. Dette sikrer god posisjonering av brukeren og gir verdifull hjelp i forbindelse med forflytning.



◀ Komfortabel, automatisert trykkfordeling

Når **Soft Tilt 2.0** er innstilt på et automatisert program, skjer endringen i posisjon på en måte som gir god støtte og komfort: før den første vingen heves til ønsket posisjon (maks. 40°), heves vingen på motsatt side en anelse. Når ønsket posisjon er oppnådd, går denne vingen tilbake til horisontal posisjon.



▲ Manuell betjening

Når **Soft Tilt 2.0** styres manuelt ved bruk av håndkontrollen, kan vingene heves opp til 80°. Dette gir mulighet for enklere håndtering av bruker, for eksempel i forbindelse med pleie og ved bruk av forflytningshjelpemidler.



◀ Programmerbar kontrollboks

Kontrollboksen leveres med ett forhåndsprogrammert auto-program. I tillegg kan man lage to individuelt tilpassede programmer. De lagrede programmene kan aktiveres med kun ett tastetrykk.



▲ Sansestimulering

Soft Tilt 2.0 kan programmeres til å vende liggeflaten rolig fra side til side mens begge vingene er hevet. Denne "vugge"-funksjonen kan virke beroligende.



▲ Enkel håndkontroll

Den brukervennlige håndkontrollen gjør det enkelt å styre **Soft Tilt 2.0** manuelt.



▲ Trekk

Blått trekk med elastiske stropper som sikrer at madrassen holdes på plass. Kan maskinvaskes på 80°.

Soft Tilt 2.0 - kompatibel med Invacare-senger



► Invacare® SB 755



NordBed-familien:

- Invacare® NordBed Optimo,
- Invacare® NordBed Ultra



► Invacare® SB 910

Tekniske data ▼



Maks. vinkel i manuell modus ▼

Soft Tilt

80°



Maks. vinkel i automatisert modus ▼

40°



Tidsintervall i automatisert modus ▼

0–180 minutter



Maks. brukervekt ▼

116–165 kg*
SWL 145–185 kg*



Tyngste enkelt del ▼

18 kg



Vask av trekk ▼

80°

Samsvarer med IEC 60601-2-52

* Maks. brukervekt avhenger av hvilken seng Soft Tilt 2.0 brukes sammen med. Se brukermanualen til Soft Tilt 2.0 for mer informasjon.

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Stål-farge ▼



Hvit

NB: Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år eller pasienter med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Soft Tilt 2.0 er produsert av GDV Technology på vegne av Invacare.

Produkt **Art. nr.**

SOFT TILT 2.0 NORDBED 1651469

SOFT TILT 2.0 SB755 1651473

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®

