

Invacare® Dacapo®

Dacapo® Standard, Dacapo® Basic, Dacapo® Child, Dacapo® Square, Dacapo® Combi, Dacapo® Comfort, Dacapo® 2Sided, Dacapo® Heavy User, Dacapo® Heavy User Light, Dacapo® Top, Dacapo® Top Pro



no	Madrassområde	
	Bruksanvisning.....	35



This manual **MUST** be given to the user of the product.
BEFORE using this product, this manual **MUST** be read and saved for future reference.



Yes, you can.®

Innholdsfortegnelse

Denne bruksanvisning skal overleveres til sluttbrukeren. FØR du bruker dette produktet, MÅ du lese denne bruksanvisning og oppbevare den til senere referanse.

1 Generell informasjon	36
1.1 Innledning	36
1.2 Symboler i denne håndboken	36
1.3 Samsvar	36
1.4 Garantiopplysninger	37
1.5 Ansvarsbegrensning	37
1.6 Levetid	37
2 Sikkerhet	38
2.1 Sikkerhetsinformasjon	38
2.2 Sikkerhetsinformasjon for transport	39
3 Produktoversikt	40
3.1 Tiltent bruk	40
3.2 Indikasjoner	40
3.3 Symboler på produktet	40
3.4 Levert produkt	40
3.5 Madrasser	41
3.6 Madrasstrekk	42
4 Bruk	43
4.1 Sikkerhetsinformasjon	43
4.2 Forberedelse av madrassbruk	43
4.3 Bruke håndtakene	44
5 Vedlikehold	45
5.1 Inspeksjon	45
5.2 Rengjøring og desinfisering	45
5.2.1 Generell sikkerhetsinformasjon	45
5.2.2 Rengjøringshyppighet	46
5.2.3 Rengjøringsanvisninger	46
5.2.4 Instruksjer for desinfisering	46

5.3 Skifte trekk	47
6 Etter bruk	48
6.1 Oppbevaring	48
6.2 Overhaling	48
6.3 Avfallshåndtering	48
7 Tekniske Data	49
7.1 Generelle data	49
7.2 Materialer	50
7.3 Miljøbetingelser	50

1 Generell informasjon

1.1 Innledning

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet håndteres. Les bruksanvisningen nøye, og følg sikkerhetsinstruksjonene i den, slik at du kan bruke produktet på en trygg måte.

Vær oppmerksom på at det kan være deler av dette dokumentet som ikke er relevante for produktet ditt, ettersom dokumentet gjelder for alle tilgjengelige modeller (på trykktidspunktet). Hvis ikke annet er angitt, viser hvert avsnitt i dette dokumentet til alle modeller av produktet.

Alle modeller og konfigurasjoner som er tilgjengelige for ditt land, står oppgitt i de landsspesifikke salgsdokumentene.

Invacare forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Før du leser dette dokumentet, må du forsikre deg om at du har den nyeste versjonen. Du finner den nyeste versjonen som en PDF-fil på Invacare-nettstedet.

Hvis skriftstørrelsen i den trykte versjonen av dokumentet er vanskelig å lese, kan du laste ned PDF-versjonen fra nettstedet. Deretter kan du skalere PDF-en, slik at skriftstørrelsen passer bedre for deg.

Hvis du ønsker mer informasjon om produktet, som f.eks. produktsikkerhetsmerknader og tilbakekalling av produkter, kan du kontakte din Invacare-representant. Se adresser nederst i dette dokumentet.

Dersom det skjer en alvorlig hendelse i tilknytning til produktet, bør du informere produsenten og de kompetente myndigheter i landet ditt.

1.2 Symboler i denne håndboken

Advarslene i denne bruksanvisningen er angitt med symboler. Advarselsymbolene ledsages av en overskrift som angir alvorlighetsgraden.



ADVARSEL

Angir en farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller død dersom den ikke unngås.



FORSIKTIG

Angir en farlig situasjon som kan føre til lettere skade dersom den ikke unngås.



VIKTIG

Angir en farlig situasjon som kan føre til skade på utstyr hvis den ikke unngås.



Tips og anbefalinger

Gir nyttige tips, anbefalinger og opplysninger når det gjelder effektiv og problemfri bruk.

1.3 Samsvar

Kvalitet er avgjørende for virksomheten til selskapet, som arbeider innenfor fagområdene i ISO 13485.

Dette produktet er CE-merket i samsvar med forordning 2017/745 om medisinsk utstyr klasse 1. Lanseringsdatoen for dette produktet er oppgitt i CE-samsvarserklæringen.

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at selskapets påvirkning på miljøet – både lokalt og globalt – reduseres til et minimum.

Vi bruker kun materialer og komponenter som er i samsvar med REACH-forskriftene.

1.4 Garantiopplysninger

Vi tilbyr en produsentgaranti for produktet i samsvar med våre generelle forretningsvilkår i det aktuelle landet.

Garantikrav kan bare rettes gjennom den aktuelle leverandøren av produktet.

1.5 Ansvarsbegrensning

Invacare erkjenner ikke ansvar for skade som skyldes:

- Manglende overholdelse av instruksjonene i bruksanvisningen
- Feil bruk
- Naturlig slitasje
- Feilmontering utført av kjøperen eller en tredjepart
- Tekniske endringer
- Endringer som ikke er godkjent, og/eller bruk av uegnede reservedeler

1.6 Levetid

Produktets forventede levetid er fem år ved daglig bruk, gitt at produktet brukes i samsvar med sikkerhetsinstrukser, vedlikeholdsintervaller og informasjon om riktig bruk som er lagt frem i denne håndboken. Den faktiske levetiden varierer etter brukens hyppighet og intensitet.

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsinformasjon

Utdannelse, klinisk vurdering og handlingsbasert planlegging basert på sårbarhet er fundamentale faktorer som skal forhindre trykksår.

En rekke vurderingsskalaer kan brukes som formelle prosedyrer for å vurdere risikoen for utvikling av liggesår, og disse bør brukes sammen med uformelle vurderinger (kunnskapsbaserte pleievurderinger). Uformelle vurderinger anses for å være viktigere og ha større klinisk verdi.



ADVARSEL!

Fare for alvorlig personskade eller skade på utstyr

Feil bruk av produktet kan forårsake personskade og skade på utstyr.

- Hvis du har problemer med å forstå advarslene, forsiktighetsmeldingene eller instruksjonene, bør du ta kontakt med kvalifisert helsepersonell eller en leverandør eller teknisk personell før du forsøker å bruke dette utstyret.
- Du må ikke bruke dette produktet eller annet tilgjengelig ekstrautstyr hvis du ikke først har lest og forstått disse instruksjonene og eventuelt tilleggsmateriale, for eksempel bruksanvisninger, servicehåndbøker eller instruksjonsdokumenter som følger med dette produktet eller ekstrautstyr.



ADVARSEL!

Risiko for utvikling av trykksår

Madrassen sørger for effektiv redusering av trykk, når støtteoverflaten er dekket med bomull, en bomullskombinasjon eller laken av lin, og en av disse tre tingene er det eneste som befinner seg mellom støtteoverflaten og brukeren.

- Lakenet må legges løst på, og alle skrukker må gattes ut.
- Sørg for at støtteoverflaten som er i kontakt med brukeren holdes fri fra smuler og andre matrester, og at dryppledninger, stenter og andre fremmede objekter ikke fanges mellom støtteoverflaten og brukeren.
- Oppvarmede sengetepper må bare brukes i konsultasjon med kvalifisert helsepersonell, da en økning i temperatur kan øke risikoen for utvikling av trykksår.



ADVARSEL!

Brann- og eksplosjonsfare!

En sigarett kan brenne hull i sengetøyet og skade madrassen. Pasientens klær, laken osv kan også være lettantennelig og forårsake brann. Hvis ikke denne advarselen tas til følge, kan det forekomme alvorlig brann, skade på gjenstander og personskade eller død.

- Ikke bruk i miljøer der det er mye oksygen.
- Ikke røyk i eller rundt sengen.

**FORSIKTIG!**
Skaderisiko

Uoriginale eller uegnede deler kan gå ut over produktets virkemåte og sikkerhet.

- Bruk bare originale deler til det aktuelle produktet.
- På grunn av regionale forskjeller må du se etter tilgjengelig ekstrautstyr i den lokale Invacare-katalogen eller -nettstedet, eller du kan kontakte din lokale Invacare-representant. Se adresser nederst i dette dokumentet.

2.2 Sikkerhetsinformasjon for transport

- Vær forsiktig når du håndterer madrassene, slik at trekket ikke blir skadet.
- Det anbefales at madrassene løftes/bæres av to personer.
- Unngå kontakt med smykker, negler, slipende overflater osv.
- Ikke dra madrassene.
- Unngå kontakt med vegger, dørkarmer, dørhåndtak eller dørlåser osv.
- Ikke transporter madrassene i transporttraller med mindre de er helt skjermet fra de skarpe kantene på transporttrallen.

3 Produktoversikt

3.1 Tiltent bruk

Dette produktet er konstruert for å gi effektiv trykkavlastning og holdningsstøtte for brukerne. Den har som formål og brukes sammen med en sengeramme av riktig størrelse som del av en helhetlig behandlingstilnærming til forhindring av trykksår.

3.2 Indikasjoner





Passer for brukere med en lav risiko for å utvikle trykksår og brukere som trenger en komfortabel madrass.

Dacapo Combi, Comfort Plus, Square, 2Sided, Heavy User og Heavy User Light forebygger trykksår og kan brukes ved liten til middels risiko for å utvikle trykksår og til behandling av trykksår i stadium 1 og 2.

Kontraindikasjoner

Ikke egnet for brukere med mer alvorlige sår.


3.3 Symboler på produktet

	Skal ikke stikkes hull på eller skjæres i		Skal henges til tork
	Tørrensing, kun PCE		Europeisk samsvar

	Tørketrommel lav temperatur, må ikke overstige 40 °C		Temperatur ved maskinvask maks. 95 °C
	Bruk ikke tørketrommel (bomullstrekk)		Maks. 40 °C (bomullstrekk)
	Maks brukervekt		Skal ikke strykes
	Skal holdes unna åpen ild		Bruk ikke blekemidler
	Produksjonsdato		Se bruksanvisningen

3.4 Levert produkt

Produktet leveres med følgende komponenter:

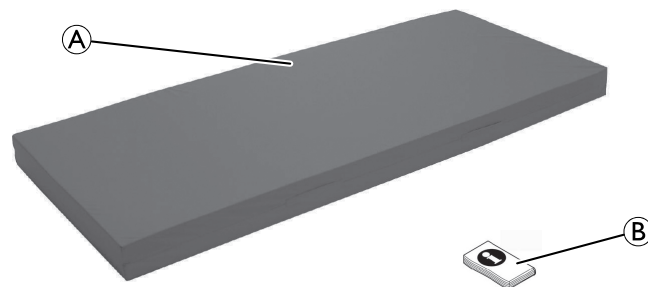

Ⓐ	Madrass og topptrekk
Ⓑ	Bruksanvisning

3.5 Madrasser

Madrassene har trykkavlastende egenskaper, spesifikke for den enkeltes behov. De gir jevn vektfordeling og reduserer vevsbelastningen på sårbare områder.

Dacapo Standard

Standardmadrassen tilfredsstillende grunnleggende krav til god demping. Skummet har høy tetthet og elastisitet og gir et fast og støttende underlag.

Dacapo Basic

Madrassen oppfyller alle grunnleggende krav til komfort og hygiene for soveunderlag. Skummet har høy tetthet og elastisitet og gir et fast og støttende underlag.

Dacapo Basic Low

Skummet har høy tetthet og elastisitet og gir et fast og støttende underlag.

Dacapo Child

Madrassen er laget av miljøvennlig, organisk skum. Skummet er utformet for å redusere varme, fukt og friksjon.

Dacapo Square

Madrassen har et topplag med miljøvennlig, organisk skum og et bunnlag med høyelastisk skum. Den unike firkantmønstrede kroppsprofilen som er skåret inn i topplaget, reduserer overflatetrykket og gir dermed trykkavlastning og utjevning av kroppstrykket.

1441303-B

Dacapo Combi

Madrassen har et topplag med viskoelastisk skum og et bunnlag med høyelastisk skum. Skummet i topplaget består av et varmekfølsomt materiale som tilpasser seg kroppens temperatur og bevegelser, mens det høyelastiske skummet i bunnlaget sørger for styrke og robusthet.

Dacapo Comfort/Comfort Plus

Skumkjernen er fremstilt av miljøvennlig, organisk skum. Skummets høye tetthet sørger for god trykkfordeling. Den øvre overflaten er skåret i firkanter som fungerer uavhengig av hverandre.

Dacapo 2Sided

Madrassen er konstruert med 2 skumlag.

Én side er fremstilt av miljøvennlig, organisk skum. Skummets høye tetthet sørger for god trykkfordeling. Den øvre overflaten er skåret i firkanter som fungerer uavhengig av hverandre.

Den andre siden er laget av viskoelastisk skum som tilpasser seg brukerens kroppsbevegelser og temperatur.

Dacapo Heavy User/Heavy User Light

Madrassen har en konstruksjon med tre lag som gir brukeren fast støtte, trykkavlastning og demping. Den nederste delen av madrassen er laget av et hardt, høyelastisk skum med høy tetthet. Det midtre laget består av en mykere utgave av det høyelastiske skummet, og topplaget består av viskoelastisk skum.

Dacapo Top

Dette er en overmadrass og legges oppå en vanlig madrass. Overmadrassen er laget av viskoelastisk skum som tilpasser seg brukerens kroppsbevegelser og temperatur.

Dacapo Top Pro

Dette er en overmadrass og legges oppå en vanlig madrass. Overlegget er sammensatt av kastelerthøymotstands skum som gir en fast støttende base.

3.6 Madrasstrekk

Dacapo-serien omfatter tre ulike trekk:

Inkontinensstrekk

Inkontinensstrekket består av polyuretanbelagt polyester. Trekket kan strekkes i to retninger og føles mykt mot huden. Stoffet er dampgjennomtrengelig og vanntett.

Trekket er allergitestet og behandlet mot støvmidd.

Evakueringstrekk

Evakueringstrekket består av polyuretanbelagt polyester, kan strekkes i to retninger og er dampgjennomtrengelig og vanntett. Disse trekkene er utstyrt med håndtak på alle fire sider. Langsidene har stropper som kan legges rundt brukeren ved nødevakuering.

Trekket er allergitestet og behandlet mot støvmidd.

Bomullstrekk

Bomullstrekket består av vanlig bomull og kan vaskes på 40 °C.

4 Bruk

4.1 Sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL!

Utilstrekkelig omplassering av pasienten kan føre til sammentrykking av vev og mulig sår dannelse. For å lette på trykket er det veldig viktig for pasientene at de repositioner seg selv, eller å bli repositionert regelmessig.

- Be alltid kvalifisert helsepersonell om en klinisk vurdering før du tar i bruk produktet.
- Før hyppig tilsyn med pasienten.



FORSIKTIG!

- Påse at siden med trykk på madrastrekket alltid er vendt oppover.
- Sørg for at avstanden mellom overflaten til madrassen og toppen av sengehesten er minst 220 mm.



FORSIKTIG!

Risiko for skade på madrassen

Hvis det er hull i madrastrekket er det risiko for at væsker kan trenge inn og forurensning oppstår.

- Sikre at madrassen ikke setter seg fast eller skades av skarpe kanter.
- Du må ikke legge kanyler, venefloner, skalpeller eller andre tilsvarende skarpe gjenstander på eller under madrassen.
- Ikke bruk elektriske varmetepper på eller under madrassen.
- Påse at alle venfloner er korrekt tapet på plass, og at ingen skarpe kanter er eksponert.
- Når du bruker glidebrett eller andre hjelpemidler for pasientflytting, se etter skarpe kanter eller riper før bruk.
- Når madrassen brukes sammen med en justerbar seng, er det viktig at du justerer knebøy før du justerer rygglenet.
- Fest medisinsk utstyr, inkludert infusjonspumper og monitører til passende sengetilbehør.
- Unngå at brennmerker fra sigaretter og dyreklor punkterer madrastrekket.

4.2 Forberedelse av madrassbruk



FORSIKTIG!

Risiko for skade eller skade på eiendom

- Før bruk må den generelle funksjonaliteten til produktet verifiseres.
- Sjekk produktet for defekter før bruk.
- Bruk ikke et defekt produkt.

1. Fjern all emballasje før bruk.
2. Plasser madrassen direkte madrastøtten til sengen.
(eller plasser madrastrekket på den eksisterende madrassen.)

Kompressrullede madrasser må kunne ligge ute før bruk.
Følg instruksjonen på pakkeinnlegget.

Madrassene som leveres flatpakket kan brukes umiddelbart.

4.3 Bruke håndtakene

Håndtak på inkontinestrekk/bomullstrekk



FORSIKTIG!
Skaderisiko

Håndtakene på trekket er kun beregnet for transport av madrassen.

– Ikke bruk håndtakene til å flytte pasienter på madrassen.

Håndtak på evakueringstrekk

Evakueringstrekket er utstyrt med håndtak på alle de fire sidene. På de to langsiden er det stropper som kan legges rundt pasienten.

Når stroppene ikke er i bruk, kan de gjemmes under borrelåputene. Håndtakene kan brukes til å løfte/dra madrassen.

1. Ved nødevakuering, legg stroppene på langsiden rundt pasienten.
2. Sørg for at armer og føtter befinner seg innenfor stroppene, og at stroppene er så stramme at madrassen bøyer seg opp rundt pasienten.

5 Vedlikehold

5.1 Inspeksjon

Kontroller om det finnes gjennomslag i madrassene (skum og trekk) (dette kan omfatte væskeinntrenging, flekker, rifter eller andre skader) etter at hver pasient er skrevet ut, etter avslutning av perioden for bruk, eller minimum én gang i måneden (avhengig av hva som kommer først). Kontrollen skal utføres av en kvalifisert og kompetent person.

Kontroller madrassene

1. Åpne glidelåsen langs hele trekket.
2. Undersøk om det har kommet flekker på den hvite undersiden av trekket.
3. Undersøk om det har kommet flekker på skummet i madrassen.
4. Bytt ut komponenter som eventuelt er tilsmusset og kast dem i henhold til retningslinjer fra lokale myndigheter.

5.2 Rengjøring og desinfisering

5.2.1 Generell sikkerhetsinformasjon



FORSIKTIG!

Fare for kontaminering

- Ta dine egne forholdsregler og bruk passende verneutstyr.



VIKTIG!

Feil væsker eller metoder kan skade eller ødelegge produktet.

- Alle rengjørings- og desinfeksjonsmidler må være av god kvalitet og kompatible med hverandre. I tillegg må de beskytte materialene de skal rengjøre.
- Bruk aldri etsende væsker (baser, syrer osv.) eller slipende rengjøringsmidler. Vi anbefaler et vanlig rengjøringsmiddel for husholdning som for eksempel oppvaskmiddel hvis ikke noe annet er spesifisert i rengjøringsanvisningene.
- Bruk aldri et løsemiddel (cellulosefjernere, aceton etc.) som forandrer plastens struktur eller får etikettene til å løsne.
- Pass alltid på at produktet er helt tørket før det tas i bruk igjen.



For rengjøring og desinfeksjon i kliniske omgivelser eller ved langvarig pleie, gjelder institusjonelle retningslinjer for hygiene.

5.2.2 Rengjøringshyppighet

- ! **VIKTIG!**
Regelmessig rengjøring og desinfeksjon bidrar til problemfri bruk, lenger levetid og forhindrer kontaminering.
Rengjør og desinfiser produktet
 - jevnlig mens det er i bruk,
 - før og etter enhver serviceprosedyre,
 - når det har vært i kontakt med enhver type kroppsvæske,
 - før det brukes på en ny bruker.

- ! **VIKTIG!**
 - Ha en oversikt over rengjøring som del av et rengjøringssystem.

5.2.3 Rengjøringsanvisninger

Rengjøre trekk

(Fjerning av kontaminanter som støv og organiske stoffer)

1. Ta av alle trekkene for å vaske dem
2. Vask trekkene med anbefalt temperatur på 95 °C (bomullstrekk 40 °C) ved hjelp av et fortynnet vaskemiddel (instruksjoner på etikett).

- ! **VIKTIG!**
Vask på høyere temperaturer kan forårsake krymping.

Tørke trekkene

1. Heng trekkene på en snor eller stang, og la dem lufttørke innendørs, eller
Tørk i tørketrommel på lav varme.

- ! **VIKTIG!**
 - Tørketrommelinnstillingen må ikke overstige 40 °C.
 - Trekkene skal ikke tørkes i tørketrommel i mer enn 10 minutter.
 - Tørk godt før bruk.

5.2.4 Instruksjer for desinfisering

- i Informasjon om anbefalte desinfeksjonsmidler og metoder finner du på <https://vah-online.de/en/for-users>.

Desinfisere trekk

(for å redusere antall mikroorganismer)

1. Tørk av trekket med et egnet vaskemiddel.
2. Skyll trekket med rent vann ved hjelp av en engangsklut uten slipeeffekt.
3. La trekket tørke til det er helt tørt.

- ! **Kraftig tilsmussing**
Hvis trekket er svært tilsmusset, anbefaler vi at det rengjøres med et fortynnet rengjøringsmiddel på 95 °C i vaskemaskin.
 - Vask bort alt søl av kroppsvæsker, dvs. blod, urin, avføring, spytt, sårveske og alle andre kroppssekreter, så raskt som mulig med et passende vaskemiddel.
 - Bruk papirhåndklær til å absorbere og fjerne større mengder blodsøl.

**ADVARSEL!**

- Påse at tilsmusset skum blir fjernet.

Sterilisere trekk

Steriliser trekk ved 110 °C.

- ! **VIKTIG!**
 - Pass på at trekket er strukket ut (ikke brettet).
 - Plasser ikke flere trekk oppå hverandre.

5.3 Skifte trekk

1. Åpne glidelåsen på trekket og fjern trekket forsiktig fra skumkjernen.
2. Sett et nytt trekk på skumkjernen.
3. Lukk deretter glidelåsen.

- ! **VIKTIG!**
 - Sørg for at hjørnene på skumkjernen plasseres korrekt i forhold til hjørnene på trekket.
 - Sørg for at den viskoelastiske eller skårne siden vender oppover når madrassen legges inn i trekket.

6 Etter bruk

6.1 Oppbevaring



VIKTIG!

- Oppbevar madrassene i tørre omgivelser.
- Oppbevar madrassene med beskyttende trekk.
- Oppbevar gjenstandene på et rent og tørt sted over gulvhøyde, og skjermet fra skarpe kanter, som kan forårsake skade.
- Oppbevar aldri andre gjenstander oppå madrassene.
- Ikke oppbevar madrassene nær radiatorer eller andre varmeapparater.
- Beskytt madrassene mot direkte sollys.

For oppbevaringsbetingelser, se *7 Tekniske Data, side 49*.

6.2 Overhaling

Dette produktet er egnet for gjenbruk. Utfør følgende punkter når produktet skal overhales og overføres til en ny bruker:

- Kontroll
- Rengjøring og desinfisering

For detaljert informasjon, se *5 Vedlikehold, side 45*.

Sørg for at bruksanvisningen overleveres sammen med produktet.

Hvis det oppdages skade eller feil, må du ikke bruke produktet på nytt.

6.3 Avfallshåndtering

Vi ber deg vise miljøansvar og levere dette produktet til en lokal gjenvinningsstasjon ved endt brukstid.

Demonter produktet og dets komponenter, slik at de ulike materialene kan sorteres og gjenvinnes hver for seg.

Kassering og gjenvinning av brukte produkter og emballasje må overholde lovene og forskriftene for avfallshåndtering i hvert land. Ytterligere informasjon får du hos det lokale renovasjonsselskapet.

7 Tekniske Data

7.1 Generelle data

Madrasen kan fås i ulike størrelser, avhengig hvilket område du befinner deg i. Kontakt din Invacare-distributør for detaljert informasjon.

Lokale krav / sertifisering tilgjengelig på forespørsel fra Invacare distributør.

Produkt-	Nominell tetthetsområde [kg/m ³]	Nominelt hardhetsområde [N]	Maks. brukervekt [kg]	Produktvekt [kg] ³
Dacapo Standard	38	140	100	7 – 10,5
Dacapo Basic	38	140	130	8,5 – 12
Dacapo Basic Low	38	140	130	3,5 – 5
Dacapo Heavy User (Top / Mid / Base)	50 / 38 / 50	100 / 140 / 200	350	12 – 17,5
Dacapo Heavy User Light (Top / Mid / Base)	50 / 38 / 50	100 / 140 / 145	250	11 – 16,5
Dacapo Child	50	145	100	3
Dacapo Square (Top / Base)	50 / 38	145 / 140	140	10 – 15
Dacapo Combi (Top / Base)	50 / 38	100 / 140	140	8,5 – 13
Dacapo Comfort	50	145	130	11,5 – 17
Dacapo Comfort Plus	50	145	140	13,5 – 19
Dacapo 2Sided (Top / Base)	50 / 50	145 / 100	130	11,5 – 17

3. Vekten kan variere avhengig av størrelsen på madrassen. Gjennomsnittlig vekt brukes som en indikasjon.

Invacare distributors:

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

United Kingdom:

Invacare Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 222
Fax: (44) (0) 1656 776 220
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Norge:

Invacare AS
Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad
N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00
Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com
www.invacare.no

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se



Invacare UK Operations Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

1441303-B 2020-01-22



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®

