



JUNIOR VECTOR

N

Brukermanual

CE

AVAILABLE STANDARD MODEL



Junior Vector

AVAILABLE STANDARD SIZES

cm	inch
25x25	10x10
30x30	12x12
35x35	14x14

*Width x Depth
Specials and custom made products on request.



fig. A



fig. B

INTRODUKSJON

Vicair® Academy Junior Vector pute er designet til det bruk som beskrives i denne manualen. Vær vennlig å lese hele manualen før du tar produktet i bruk.

Puten består av følgende deler:

Inner pute

Innerputen er bygget opp av kammer med glidelås. Hvert kammer er fylt med et visst antall triangulære, luftfylte SmartCells™. Høyre og venstre side på puten er litt høyere enn midten. Denne kombinasjonen "guider" barnet til en stabil sitteposisjon.

Ytter trekk

To typer yttertrekk er tilgjengelig:

- Comfair, laget i et pustende materiale
- Inkontinens, laget i et vannavstøtende pustende materiale

Begge trekkene har en anti-gli, strekkbar overflate. Bunnen av setetrekket har påmontert Velcro bånd, dette gjør det mulig å feste puten på rullestol sete.

MONTERING

Sjekk putestørrelsen

Sammen med terapeut eller selger må du se til at puten passer størrelsen på barnet og rullestolen

Bredde: puten skal ha same bredde som rullestolens sete. Dersom rullestolen har armlen eller klesbeskyttere som har innebygget plass til puten, kan puten være opp til 2 cm (0.8") bredere. Se til at puten ikke kommer i kontakt med eikene på hjulene.

Lengde: puten skal ha samme lengde som rullestolens sete, eller være opp til 2.5 cm (1") lenger. Dersom puten er lengre enn dette, vil vi anbefale å legge inn en solid seteplate under innerputen, innenfor yttertrekket.

Plasser innerputen i yttertrekket

- Fjern plastemballasjen.
- Åpne glidelåsen på yttertrekket helt.
- Plasser innerputen i yttertrekket.
- Tre løkken gjennom hullet i bunnen av yttertrekket. Resultatet skal se ut som på fig. A.
- Lukk glidelåsen på yttertrekket. Vær forsiktig så du ikke skader innerputen.
- Bruk alltid puten med yttertrekket på plass.

PLASSERING

Vicair anbefaler at installering og justering av Academy Junior puter foretas under oppsyn av terapeut eller selger.

- Sørg for at rullestol sete er rent og avfettet.
- Fjern beskyttelses papiret på de selvklebende velcro båndene.
- Plasser puten på rullestolsetet og trykk den fast. Påse at vender ned og bak på rullestolen (fig. B). Puten kan enkelt fjernes fra sete ved å trekke den av velcroen.
- Sitt på puten et par minutter, for å tilpasse puten til dine former.
- Hvis nødvendig, juster benstøttene på rullestolen. Føttene skal kun hvile på de mens lårene skal ha full kontakt med puten.

Dersom du ikke ønsker å bruke velcroen, kan du bare fjerne de selvklebende båndene. Merk deg at båndene som er festet til selve trekket ikke kan fjernes.

Justering av fyllet i putene

Hver Vicair® pute har sine egne unike fyllings grad, avhengig av størrelse og modell. Hvis nødvendig, kan antallet justeres ved å fjerne eller legge til celler fra forskjellige rom i puten. Du finner standard fyllings grad på etiketten som er festet i det indre trekket.

Sjekk for "bottoming out"

Haleben og bekken bør ha støtte fra luftcellene inne i puta; de skal ikke berøre bunnen av puten. En sjekk av "bottoming out" bør utføres ved førstegangs bruk og etter at det er foretatt justeringer i fyllingsgraden.

- La barnet sitte på puten i ca 5 minutter.
- La barnet lene seg forsiktig fremover i rullestolens sete.
- Terapeuten eller selgeren fører en hånd mellom puten og rullestolens sete.
- Sørg for at barnets er støttet av minst et fullt lag av SmartCells™.
- Puten skal ikke tas i bruk dersom "bottoming out" forekommer. I de fleste tilfeller vil en justering av fyllingsgraden løse problemet.

BRUK

Sjekk huden for rødhet

Sjekk barnets hud regelmessig for rødhet, særlig de første dagene. Dersom det oppstår rødhet etter 15 minutter, skal du ikke bruke puten. Ta da kontakt med terapeut eller selger.

Brukervekt

Max brukervekt 100kg.

Bruk ved høyt lufttrykk

Fordi hver enkelt SmartCell™ er fylt med luft, vil puten kunne oppleves forskjellig når den brukes under høyt lufttrykk eller i et fly. Under slike omstendigheter, kan putens fasthet justeres ved å fjerne noen celler fra hvert kammer. Vicair anbefaler at puten ikke brukes i høyder på over 2400 moh (8000 ft).

Bruk i kjøretøy

Det finnes foreløpig ingen testdokumentasjon rundt sikker bruk av Vicair® Academy Junior i kjøretøy. Vi vil derfor ikke anbefale å benytte systemet i kjøretøy.

Flytte puten til en ny bruker

Før man lar et nytt barn bruke puten, skal innerputen rengjøres og yttertrekket vaskes. Desinfiser begge deler. Se til at puten er riktig justert til det andre barnet.


Erstatting av yttertrekket

Ved normalt bruk, anbefaler Vicair å erstatte yttertrekket hvert år. Nye trekk kan kjøpes separat.

Flammesikkerhet

Ikke bruk eller legg puten nær en åpen flamme, eller kilder med høye temperaturer.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

 Advarsel: puten skal ikke høytrykkspyles eller vaskes i autoclave. Puten tåler ikke høy varme eller høyt trykk. Dersom vaskeanvisningen ikke følges, vil puten og/eller pute trekket mest sannsynlig eldes raskere.

Sjekk for slitasje eller flate celler

Hver tredje måned, bør puten sjekkes for slitasje og flate celler. Sjekk alle mekaniske deler for slitasje og se til at alle fester er sikret. Ved alvorlig skade, eller dersom et stort antall celler er flate, skal du ikke fortsette å bruke puten. Ta kontakt med forhandler.

Rengjøring av innerputen

- Tørk over innerputen med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. Vanskelige flekker eller merker kan fjernes ved først å væte og deretter bruke en myk børste til å løse opp flekken.
- Dersom det er nødvendig å fjerne celler før rengjøring bør du notere deg antall celler i hvert kammer.
- Ikke benytt aggressive slipemidler, eller skarpe objekter for å rengjøre innerputen.
- Ikke legg innerputen i vann eller annen væske.
- Ikke vask den fylte innerputen, eller cellene i vaskemaskin.

Rengjøring av yttertrekket

Yttertrekket kan vaskes i vaskemaskin med innsiden ut. Se instruksjoner på merkelappen på innsiden av trekket.

Desinfisering av puten

I tilfelle puten er tilsølt med kroppsvæske, og den skal brukes av en annen person, må puten desinfiseres for å unngå smitte.

- Rengjør innerputen og yttertrekket som beskrevet ovenfor. Bruk antibakterielt middel når du vasker yttertrekket.
- Spray yttertrekket og innerputen med desinfeksjonsmiddel. Bøy kamrene utover og sørg for at det også sprayes ned i mellomrommene.

GARANTI

Vicair tilbyr en begrenset garanti mot defekter i tilvirkningen og i materialene for en periode over to (2) år etter den opprinnelige kjøpsdato, forusatt at produktet er normalt brukt. Enhver skade som oppstår på grunn av unormal bruk, feil behandling, rengjøring eller neglisjering er ekskludert fra garantien. Skulle det oppstå en defekt i materialene eller tilvirkningen innen to (2) år fra den opprinnelige kjøpsdato, vil Vicair etter eget valg, reparere eller erstatte produktet uten ekstra kostnader. Yttertrekket er ekskludert fra denne garantien. Garantien begrenser seg til reparasjoner og erstatning av produktet, kostnadene skal ikke overskride produktets verdi.

For ytterligere produktinformasjon kan du besøke Vicairs hjemmeside: www.vicair.com.

WWW.VICAIR.COM

**VICAIR BV
Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands**

**T +31(0)75 642 9999
F +31(0)75 642 9990**

E info@vicair.com

070019-REV09/2015

