


Forenklet bruksanvisning **SoftAir®**

NB! Les alltid den fullstendige bruksanvisningen.



Yes, you can.®

Forklaring av kontrollpanelet på pumpen

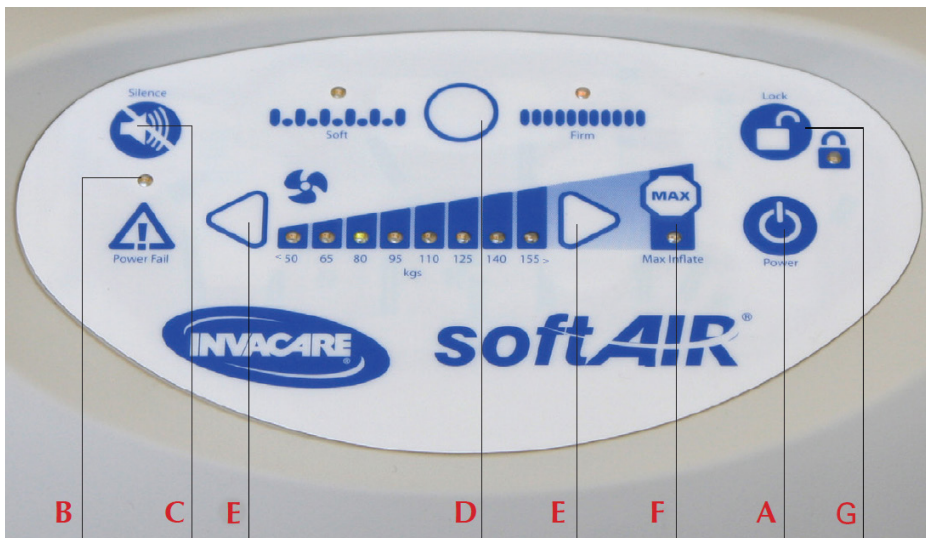

A Av/på-knapp

Hold knappen inne i 2 sekunder.

B Alarmlampe

Denne røde lampen blinker og det høres en lydalarm dersom kontrollenheten eller madrassstrykket svikter.

C Knapp for alarmdemping

Demper lydalarmen (på/av). Lydalarmen vil starte igjen etter 20 minutter hvis årsaken til svikten ikke løses.

D Knapp for valg av modus

Trykk på knappen for å velge mellom dynamisk og statisk madrass. Statisk modus går automatisk tilbake til vekslemodus etter 20 minutter.

E Pilknapper for regulering av trykk

Den grønne lampen lyser for å indikere hvilken av de åtte innstillingene for vekt som er i bruk.

F Knapp for stelfunksjon

Trykk på denne for å blåse madrassen opp til maksimal trykkinnstilling. Etter 30 minutter returnerer systemet automatisk til tidligere trykkinnstilling, av hensyn til pasientens sikkerhet.


G Kontrollenhetens låseknapp

Trykkes inn i minst to sekunder for å låse kontrollenhetens innstillinger. Trykk på låseknappen igjen i minst to sekunder for å låse opp systemet.

Forenklet bruksanvisning **SoftAir®**

Montering av madrassen i seng

1. Madrassen legges rett på sengens liggeflate. **Viktig!** Fest madrassen med stroppene, **kun** til sengens bevegelige deler.

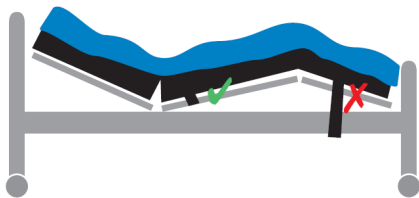

Stroppene må kun festes til de bevegelige delene av liggeflaten.

2. Sjekk at CPR-ventilen er montert korrekt.

Viktig! Trykk ned alle fire proppene samtidig.

Tips: Hvis pumpen gir alarm, sjekk om CPR-ventilen er montert slik at den er tett.



CPR i åpen tilstand.

CPR korrekt montert.

3. Pumpen festes ved å henge krokene over sengens endegavl. Fest slangen til pumpen. Plugg også inn strømledningen i pumpen og i strømuttak. Trykk så på power på pumpen i minst 2 sekunder.



Heng krokene over sengens endegavl.

Fest slangen til pumpen og trykk på power.

4. Det tar ca. 40 minutter før madrassen er fylt opp hvis alt er koblet riktig.

Viktig! Still da inn riktig brukervekt. Ta eventuelt en bunnstest, og madrassen er klar til bruk.

Ved MORS eller strømstans lengre enn en time, skal pumpen slås av og transportbeslaget settes på. Madrassen vil da holde på luften inntil 72 timer.



Transportbeslag.

Se fullstendig bruksanvisning for mer informasjon. Du kan også kontakte kundeservice på telefon 22 57 95 00.