


# Carebed Overmadrass



Trykkfordeling basert på statisk luft

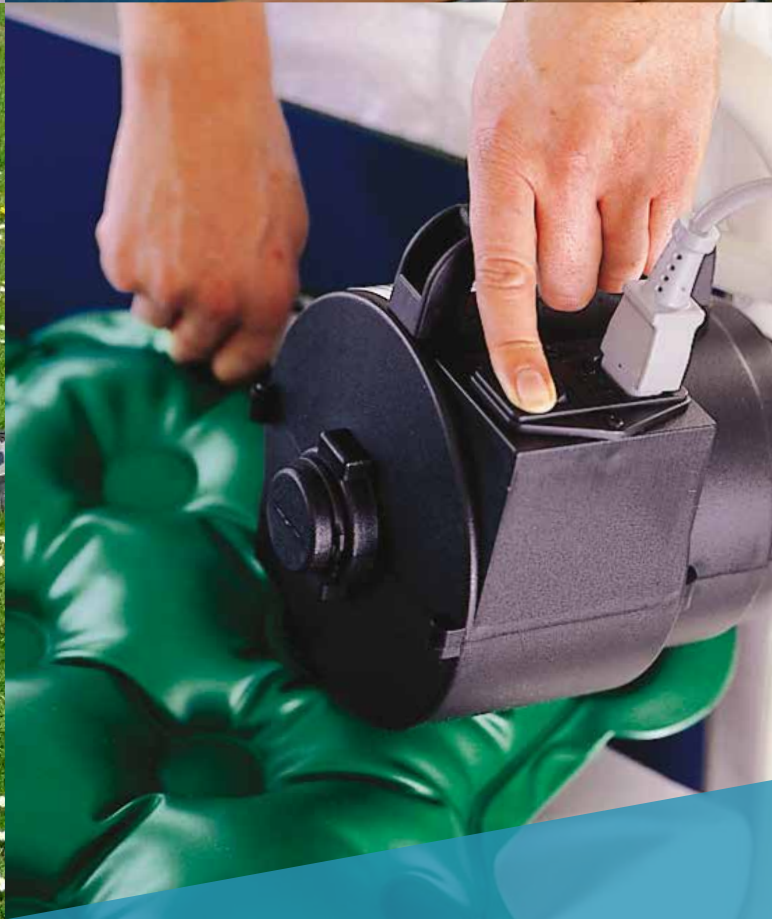

**Carebed** gir effektiv trykkfordeling både ved forebygging og behandling av trykksår. **Carebed** kan brukes til pasienter med middels risiko for å utvikle trykksår.



Madrasen har individuell tilpasning, og er svært enkel i bruk, noe som sikrer en korrekt og enkel håndtering for pleiepersonalet. **Carebed** følger sengens innstillinger og er meget stabil og komfortabel.

### Trykkfordeling med statisk luft


Det er mange faktorer som må tas i betraktning når det gjelder utvikling av trykksår. En av de avgjørende faktorene er mottrykket underlaget gir mot kroppen over tid. Vanlige madrasser gir ofte et for høyt mottrykk. Ved immobilitet kan dette føre til at blodtilførselen stopper opp på utsatte steder, slik at vevet dør og trykksår oppstår. For å forebygge trykksår, må mottrykket reduseres.



### Optimal funksjon

**Carebed** består av mer enn 300 separate celler fylt med luft. Luften transporteres og fordeles mellom cellene, og tilpasser seg pasientens form og vekt. Madrasen er meget enkel i bruk. Luft pumpes inn mens pasienten ligger på madrassen. Etter ca. ett minutt vil det være korrekt luftmengde i madrassen og ventilen lukker seg. Det er derfor umulig å fylle for mye luft i madrassen. **Carebed** er en anerkjent og innarbeidet madrass med gode kliniske resultater.

## Produktegenskaper

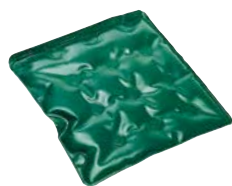

### Caresit

Konseptet med luftceller finnes også i seteputen Caresit. Kan f. eks. brukes i rullestol og i bil.



### Pumpe

Den elektriske pumpen sørger for at madrassen fylles med rett mengde luft.



### Vedlikeholdspumpe

Pumpen etterfyller madrassen automatisk (tilgjengelig som tilbehør).



### Andre anvendelsesområder

Konseptet brukes også til barne- og operasjonsmadrasser.

**Carebed** reduserer mottrykket ved at den lar pasienten synke godt ned i madrassen. Trykket fordeles over en større flate og blodtilførselen opprettholdes.

## Tekniske data



Maks. brukervekt:

<b>Størrelse Std</b>	900 mm	1900 mm	100 mm	3,8 kg	150 kg
<b>Operasjonsmadrass</b>	480 mm	1030/1700/2000 mm	100 mm	1,3 - 2,3 kg	150 kg
<b>Barnemadrass</b>	700 mm	1600 mm	100 mm		150 kg
<b>Pumpe</b>				1,6 kg	150 kg
<b>Caresit</b>	4 størrelser, fra 400 - 450 mm	4 størrelser, fra 400 - 500 mm	60 mm	0,3 - 0,8 kg	150 kg

Art. nr.	Overmadrass, statisk luft	Madrassmål cm	Produktbeskrivelse
652MFE	Carebed	90 x 200 x 10	Overmadrass, statisk luft
653MFE	Carebed	90 x 210 x 10	Overmadrass, statisk luft
654MFE	Carebed	90 x 215 x 10	Overmadrass, statisk luft
656MFE	Carebed	85 x 200 x 10	Overmadrass, statisk luft
671MFE	Carebed	70 x 160 x 10	Overmadrass, statisk luft
700MFE	Pumpe Carebed		
1495934	Vedlikeholdspumpe Carebed		
502MFE	Kork		
501MFE	Ventilinnsats		

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
0661 OSLO

