


Master GRIP®

Brugervejledning

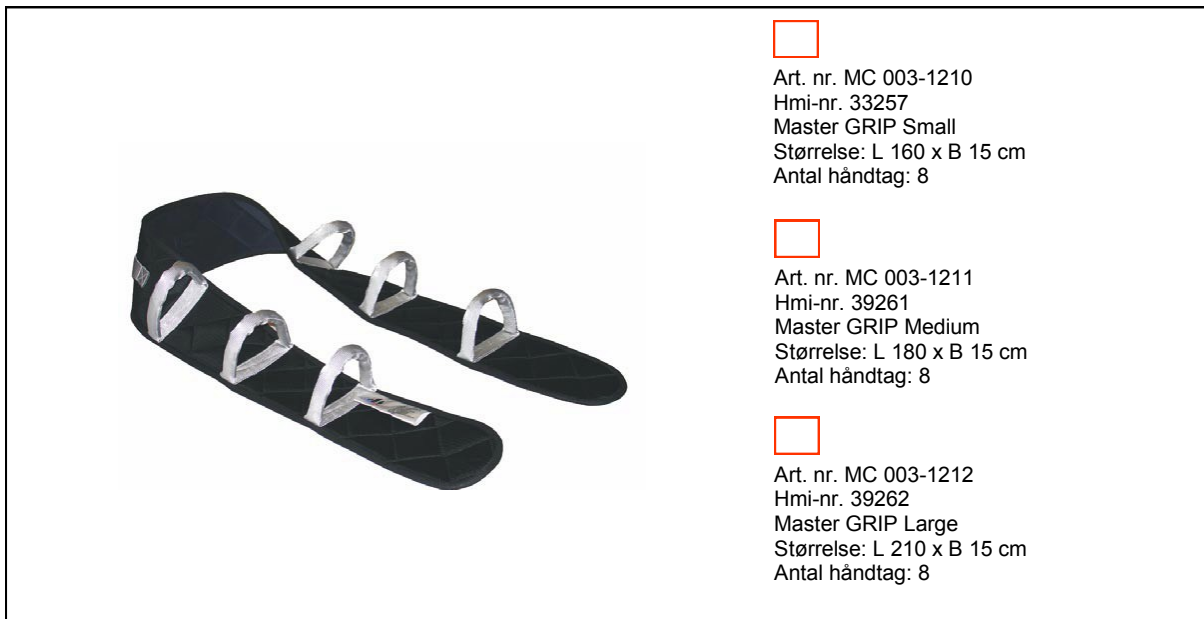

Når mobiliteten forringes....

Lav vægt


Fleksibel

Tryghed

Komfortabel

Aktivering

Visionær

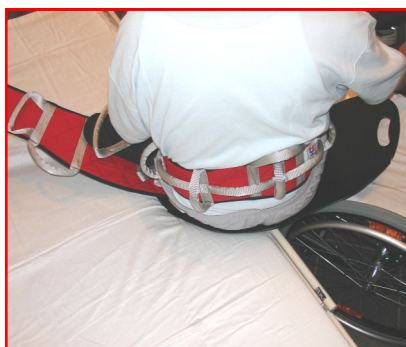


The Original Scandinavian Human Handling System

... forbedrer vi livskvaliteten

Master GRIP

The Original Scandinavian Human Handling System

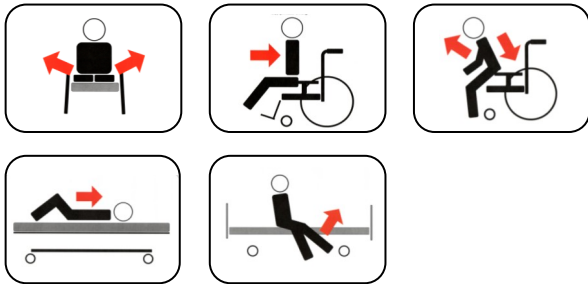

Vigtigt

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger og håndtag mindst en gang hver halve år.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

Ansvar

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse:

Master GRIP består af et polstret bånd med grebsvenlige ergonomiske håndtag. Det har skrid-sikker velourunderside, der låser mod brugeren.

Master GRIP "forlænger" hjælpers arme og fremmer derved en god og sikker håndtering af bruger, og skaber derved tryghed og aktivitet hos bruger. Derudover fremmer det gode arbejdsstillinger for hjælper.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Yderside:	PU belagt nylon	
Polstring:	Polyethylenskum	
Inderside:	100% Polyester	
Håndtag:	Rørbånd 100 % Polyester	
Polstring håndtag:	Polyethylenskum	

Vaskeanvisning



Master GRIP kan vaskes ved 70 grader C.

Produkterne kan også spritrenses med alle tilgængelige desinficeringsvæsker.



Skyllemiddel

Der må ikke anvendes skyllemiddel.



Master CARE
Højvænget 1
8330 Beder
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
info@master-care.dk
www.master-care.dk