

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

OBS: Kontroller at ingen av delene har blitt skadet under frakt. Hvis du oppdager skade, skal produktet IKKE brukes. Ta kontakt med speditøren/Invacare for å få ytterligere instruksjoner.

Sammendrag av sikkerhetsinformasjon

For å sikre at PreciseR_xTM installeres på en trygg og korrekt måte, MÅ disse instruksjonene følges:

⚠ ADVARSEL

Du MÅ IKKE bruke dette produktet eller tilgjengelig tilleggsutstyr uten først å ha lest og forstått denne veiledningen og eventuelle andre instruksjoner, for eksempel brukerhåndbøker, servicehåndbøker eller instruksjonsark som følger med dette produktet eller tilleggsutstyr. Hvis du har problemer med å forstå advarslene eller instruksjonene, ta kontakt med en kvalifisert person i helsevesenet, en forhandler eller teknisk personell før du bruker dette utstyret, for å unngå personskade eller skade på utstyret.

⚠ ADVARSEL FOR TILBEHØR

Produktene fra Invacare er utviklet og produsert spesielt for bruk sammen med tilbehør fra Invacare. Tilbehør fra andre produsenter er ikke testet av Invacare og er ikke anbefalt for bruk sammen med produkter fra Invacare.

⚠ ADVARSEL

IKKE RØYK når du bruker dette utstyret. Hold alle fyrstikker, tente sigaretter og andre antenneskilder borte fra rommet som dette produktet befinner seg i, og borte fra området hvor det blir gitt oksygen. RØYKING FORBUDT-skilt bør være plassert godt synlig. Tekstiler og andre materialer som normalt ikke brenner, blir lettantennelige og brenner kraftig i oksygenrik luft. Hvis denne advarselen ikke tas til følge, kan det føre til alvorlige branttilløp, skade på materiell og forårsake personskade eller død. Dersom olje, fett eller fettholdige stoffer kommer i kontakt med oksygen under trykk, kan dette forårsake en brå og voldsom antennelse. For eksempel bør du unngå håndkrem, matlagingsolje, sololje, solkrem og lignende produkter som inneholder olje. Hvis du bruker slike produkter, anbefaler Invacare at du vasker hendene før du bruker dette produktet. Slike stoffer MÅ holdes borte fra oksygenkonsentratoren, slanger, tilkoblinger og alt annet oksygenutstyr. IKKE bruk smøremidler, med mindre det er anbefalt av Invacare.

PreciseR_x pediatrik flowmeter er konstruert for et inngangstrykk på bare 34,5 kPa (5 psi).

Flowmeteret kan bare brukes sammen med Invacare-konsentratorer med 34,4 kPa (5 psi) utgangstrykk. Holdes utenfor rekkevidden til barn.

Produktet MÅ IKKE demonteres. Overlat vedlikehold og reparasjoner til kvalifisert servicepersonell.



Settet inneholder: Ett flowmeter

Settet inneholder ikke: Klemsikre oksygenlanger, pediatrik nesekanyle, fukterflaske og adapter (dersom aktuelt)

VANLIGE PRODUKTPARAMETERE

NOMINELT INNGANGSTRYKK:	34,5 ± 3,45 KPa (5 ± 0,5 psi)
OKSYGENINNTAK:	2 l/min
OKSYGENUTTAK:	0–750 cm ³ /min (0–¾ l/min)
TRINNJUSTERBAR FLOW	50 cm ³ /min (1/16 l/min)
NØYAKTIGHET, FLOWMÅLING:	± 10 % av hele måleområdet

Du finner mer informasjon om Invacares produkter, deler og tjenester på www.invacare.com

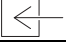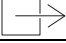BREDE:	11,94 cm (4,7 in)
HØYDE:	14,48 cm (5,7 in)
DYBDE:	14,48 cm (5,7 in)
VEKT:	0,8 kg (1,86 lbs)
FRAKTVEKT:	1,1 kg (2,40 lbs)
	Inngang
	Utgang
BRUKSTEMPERATUR:	10–35 °C (50–95 °F)
OPPBEVARINGSTEMPERATUR:	–29 til 70 °C (–20 til 158 °F)

Håndtering

Utpakking/kontroll

1. Se etter ytre tegn på skade på eske eller innhold. Dersom du ser tegn på sannsynlig skade, meld fra til speditør/forhandler for å få ytterligere instruksjoner.
2. Fjern all løseballasje fra esken.
3. Ta forsiktig alle komponenter ut av esken.

OBS: Behold all emballasje og esken for senere bruk.

4. Kontroller at det ikke er hakk, bulker, riper eller annen skade på flowmeterets overflate. Se over alle deler.

Oppbevaring

1. Oppbevar flowmeteret innpakket på et tørt område.
2. IKKE plasser andre gjenstander oppå et innpakket flowmeter.

Vanlig oppsett

ADVARSEL

Ikke plasser kanylen på pasienten før alle slanger er koblet til. Dersom ikke denne rekkefølgen følges kan det renne vann tilbake gjennom slangen.

Når det pediatriske flowmeteret skal justeres, MÅ flowmeteret på oksygenkonsentratoren stilles på 2,0 l/min. Hvis ikke dette gjøres, vil prosedyren medføre at pasienten får feil flow. Invacare anbefaler at det brukes klemsikre oksygenlanger (følger ikke med) sammen med dette produktet.

Hvis det ikke er foreskrevet bruk av fukterflaske, må ikke den total lengden av oksygenlangen fra det pediatriske flowmeteret og til pasienten overstige 7,6 m (25 ft), og den totale lengden av Alle slanger KAN IKKE overstige 15,2 m (50 ft).

Hvis det er foreskrevet bruk av fukterflaske, må ikke den total lengden av oksygenlangen fra fukterflasken og til pasienten overstige 7,6 m (25 ft), og den totale lengden av Alle slanger knyttet til det pediatriske flowmeteret KAN IKKE overstige 11,8 m (39 ft).

OBS: Se FIGUR 1 eller FIGUR 2 når det gjelder denne prosedyren.

1. Plasser det pediatriske flowmeteret på et bord.
2. Drei bryteren på det pediatriske flowmeteret til fullt åpen stilling.
3. Slå på konsentratorens strømbryter. Strømlampen på kontrollpanelet vil lyse GRØNT. Det vil bli avgitt alarmsignal som indikerer at systemet fungerer slik det skal.
4. Sett oksygenkonsentratoren til 2,0 l/min.


OBS: La konsentratoren kjøre i minimum 30 min for å sikre at konsentrasjonsnivået er tilfredsstillende.

OBS: Tilbehør – oksygenlanger, slangekoblinger, kanyle og fukterflaske med adapter leveres ikke med det pediatriske flowmeteret.

Oppsett dersom fukterflaske ikke er foreskrevet

OBS: Se FIGUR 1 når det gjelder denne prosedyren.

1. Koble en 2,1 m (7 ft) oksygenlange fra konsentratorens uttak til det pediatriiske flowmeterets inntak.
2. Koble en oksygenlange (vises ikke) på maks. 7,6 m (25 ft) til det pediatriiske flowmeterets uttak.
3. Fest den motsatte enden av oksygenlangen til en nesekanyle ved hjelp av en egnet slangekobling (vises ikke).

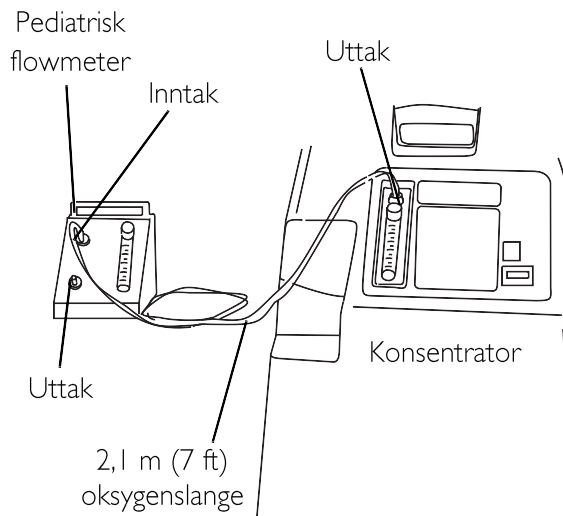


FIGUR 1 Vanlig oppsett – Oppsett dersom fukterflaske ikke er foreskrevet

Oppsett dersom fukterflaske er foreskrevet

OBS: Se FIGUR 2 når det gjelder denne prosedyren.

1. Koble en oksygenlange på maks. 2,1 m (7 ft) fra konsentratorens uttak til det pediatriiske flowmeterets inntak.
2. Følg anvisningene fra produsenten av fukterflasken om hvordan du fyller den på og kobler den til oksygenlangen.
3. Når du har fylt fukterflasken med vann, plasserer du den i fukterrommet på Invacare-konsentratoren (fremgangsmåten for montering av flasken er beskrevet i eierhåndboken for konsentratoren).
4. Koble en oksygenlange på maks. 2,1 m (7 ft) fra det pediatriiske flowmeterets uttak til fukterflaskens inntak (eventuelt ved hjelp av en egnet adapter).
5. Koble en oksygenlange (vises ikke) på maks. 7,6 m (25 ft) til fukterflaskens uttak (vises ikke).
6. Fest den motsatte enden av oksygenlangen til en nesekanyle ved hjelp av en egnet slangekobling (vises ikke).

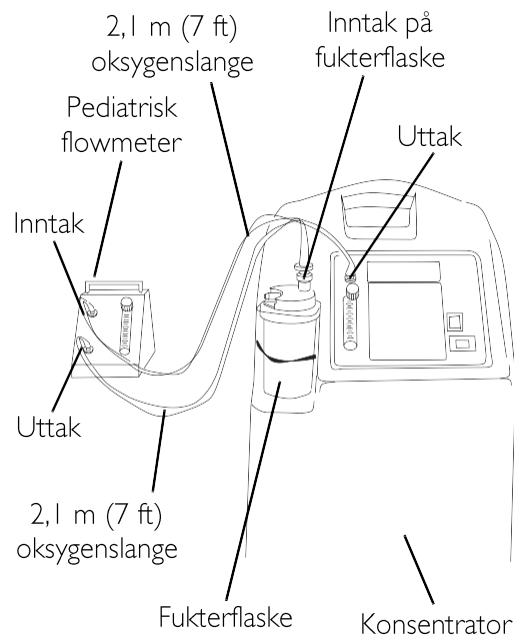

FIGUR 2 Vanlig oppsett – Oppsett dersom fukterflaske er foreskrevet

FORSIKTIG

IKKE legg klemsikre oksygenlanger på KALDE gulv, da det vil danne seg kondens på innsiden av slangene

Stille inn flow på det pediatriiske flowmeteret

OBS: Se FIGUR 3 når det gjelder denne prosedyren.

⚠ ADVARSEL

IKKE velg en annen innstilling, med mindre legen har foreskrevet en endring i flow for PreciseR_x pediatriisk flowmeter.

FORSIKTIG

IKKE la vann eller andre stoffer trenge inn i flowmeterets åpninger. IKKE senk sokkel, flowmeter eller slanger i væske.


1. Still inn det pediatriiske flowmeteret i samsvar med legens anvisning.

OBS: Flowen på konsentratorens standard flowmeter vil falle under innstillingen 2,0 l/min. etter at Invacare PreciseRx pediatriisk flowmeter er installert og i bruk.

2. Sentrer kulen på det pediatriiske flowmeteret med linjen for den foreskrevne flowen. Dette vil sørge for en nøyaktig flow.

3. Plasser kanylen på pasienten.

OBS: Enhetens utvendige overflater kan rengjøres med varmt såpevann. Rengjør med en myk, fuktig klut, og tørk grundig.

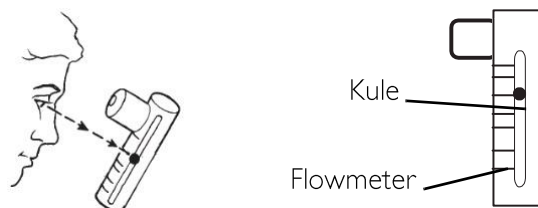

FIGUR 3 Stille inn flow på det pediatriiske flowmeteret

BEGRENSET GARANTI

Storbritannia:

Invacare Ltd, South Road, Bridgend Industrial Estate, UK-Bridgend CF31 3PY

Tlf.: (44) (0)1656 664 321, Faks: (44) (0)1656 667 532

UK@invacare.com

Irland:

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus, Seatown Road, Swords, County Dublin - Ireland

Tlf.: (353) 1 810 7084, faks: (353) 1 810 7085

eire@invacare.com

Invacare Corporation


www.invacare.com



Yes, you can.

USA

One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
440-329-6000
800-333-6900
Teknisk støtte
440-329-6593
800-832-4707

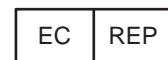

EU-representant

Invacare Deutschland GmbH
Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica
Tlf.: (49) (0)57 31 754 0
Faks: (49) (0)57 31 754 52191

Invacare Corporation
2101 E. Lake Mary Blvd.
Sanford, FL 32773
800-832-4707



© 2012 Invacare Corporation. Med enerett.
Det er forbudt å republisere, kopiere eller endre hele eller deler av denne veiledningen uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Invacare. Varemerker angis med TM og [®]. Alle varemerker eies av eller lisensieres til Invacare Corporation eller tilhørende datterselskaper med mindre annet er angitt.

Delnr. I150712_nn
Rev. C - 09/12

